

PROCEDURE

CHANGEMENT DE TELECOMMANDE

CLAVIA



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. CLAVIA I-LINE LSA/FSP/ FCD sans repose pied	3
3. CLAVIA I-LINE FCD avec repose pied	5
4. Vérification	9

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la télécommande, il vous faut :

- Tournevis plat

Temps de l'intervention : 5-10 Min

2. CLAVIA I-LINE LSA/FSP/ FCD sans repose pied


Regarder sous le fauteuil ou brancard au centre et repérer le boîtier d'alimentation (boîtier connexion des vérins) comme ci-dessous :



Sur le boîtier CB06, déclipser la barrette anti-arrachement sur le côté gauche uniquement. Il suffit de glisser un tournevis entre l'extérieur et le clip de la barrette puis de pousser vers l'intérieur comme expliqué ci-dessous.




Débrancher le connecteur de la télécommande du boîtier CB06 (emplacement HB sur la photo).

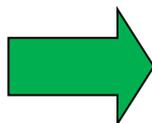

Décaler la barrette vers le bas suffisamment (sans trop forcer) pour pouvoir sortir le connecteur.
Reposer la barrette sans la reclipser.



Puis prendre la nouvelle télécommande et effectuer la procédure inverse.
Glisser le câble de la télécommande à travers la barrette.

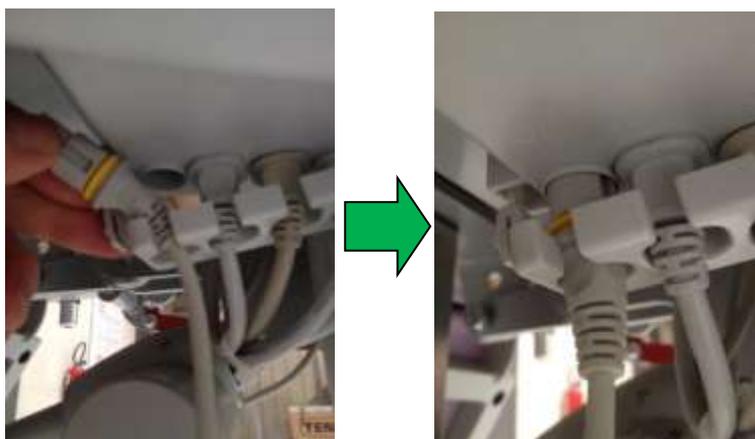

Puis refixer le connecteur. Bien faire attention au sens, encoche du connecteur vers les autres câbles.

3. CLAVIA I-LINE FCD avec repose pied

Regarder sous le fauteuil ou brancard au centre et repérer le boîtier d'alimentation (boîtier connexion des vérins) comme ci-dessous :



Sur le boîtier CB16, pour déclipser la barrette anti-arrachement, munissez-vous d'un tournevis plat.
Les clips se situent de l'autre côté du boîtier.

Commencer par retirer du côté de la télécommande comme ci-dessous :



Ensuite pousser les clips entre A et B. Tirer légèrement sur la barrette pour qu'ils se déclipent.



Faire ainsi de suite, inutile de retirer la barrette complète. Il faut juste pouvoir retirer la télécommande :



Débrancher la prise de la télécommande et remplacer par la nouvelle. Attention à respecter le sens il y a une encoche à placer vers vous comme ci-dessus.



Pousser correctement le connecteur, et reclipser l'ensemble de la barrette.

4. Vérification

Tester le bon fonctionnement du fauteuil ou brancard à l'aide de la télécommande.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX