


VESTIAIRE

SOLUTION D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT

MANUEL D'UTILISATION

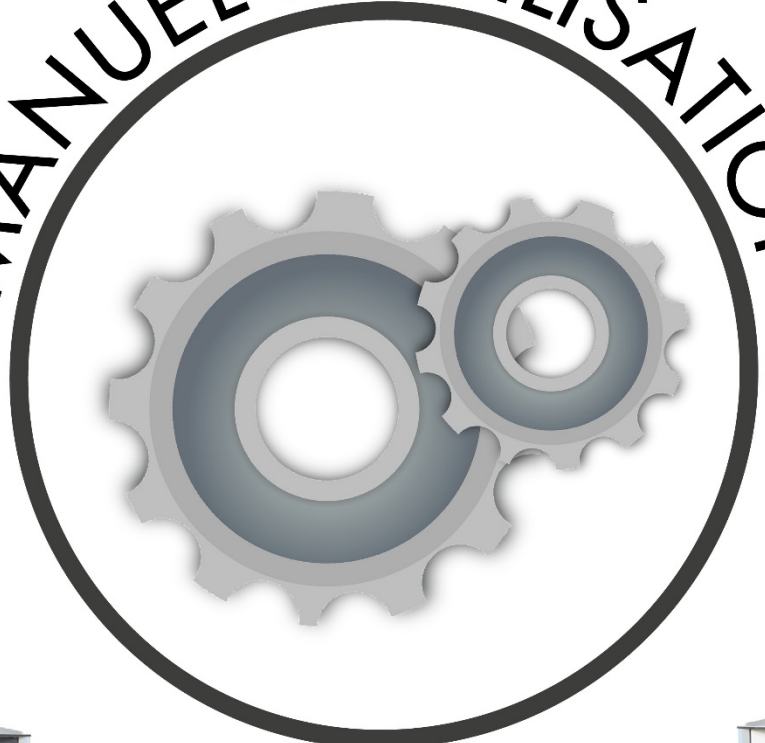

BMB MEDICAL
100 Avenue du Formans
CS 11001
01604 TREVOUX

 **BMB**
MEDICAL

BMB MEDICAL

100 Avenue du Formans

CS 11001

01604 TRÉVOUX CEDEX


Tél : +33(0)4 74 08 71 71

Fax : +33(0)4 74 08 71 72

www.bmb-medical.com

Ce manuel a pour but de vous familiariser à l'utilisation, à l'entretien et à la sécurité de votre nouveau dispositif médical. Nous vous conseillons vivement de lire soigneusement ce document et de suivre les recommandations pour une utilisation optimale en toute sécurité.

Certaines illustrations présentées sont à titre indicatif et ne représentent pas exactement le dispositif que vous avez entre votre possession.

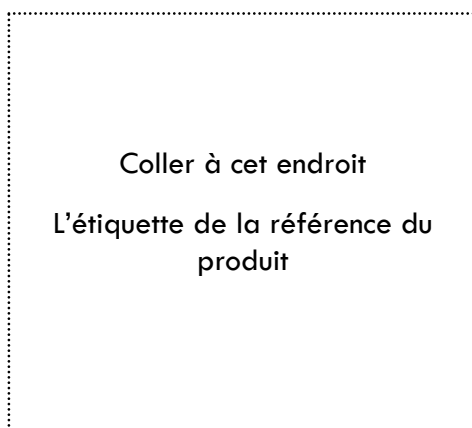

Les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis et n'engagent en aucune manière la société BMB MEDICAL. Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de BMB MEDICAL est illicite. Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon. Les illustrations de ce document ne sont pas contractuelles.

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION SPECIFICATIONS.....	4
1.1	PRESENTATION DU PRODUIT	4
1.1.1	VESTIAIRE AMBULATOIRE.....	4
1.2	DOMAINE D'APPLICATION	6
1.3	OBJECTIF DU MANUEL D'UTILISATION.....	6
1.4	CONSERVATION	6
1.5	SYMBOLES ET NORMES UTILISES.....	6
2	MODE D'EMPLOI.....	7
2.1	SYSTEME DE VERROUILLAGE A CLE	7
2.2	SERRURE DIGITALE	7
3	NETTOYAGE ET DESINFECTIION	7
3.1	INTRODUCTION	7
3.2	PERIODICITE.....	7
3.3	MATERIEL ET PRODUITS RECOMMANDES.....	8
3.4	CONSEILS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTIION.....	8
3.4.1	OPERATION DE NETTOYAGE SELON LES ELEMENTS.....	8
3.4.2	CONSIGNES A RESPECTER	9
4	PRECAUTIONS.....	10
4.1	UTILISATIONS ANORMALES.....	10
4.2	TRANSPORT ET STOCKAGE.....	10
4.2.1	TRANSPORT	10
4.2.2	STOCKAGE	10
4.3	GARANTIE.....	11
4.4	SERVICE APRES VENTE.....	11
4.5	ENVIRONNEMENT.....	11
4.5.1	MATERIEL USAGE.....	11

1 INTRODUCTION SPECIFICATIONS

1.1 PRESENTATION DU PRODUIT

1.1.1 VESTIAIRE AMBULATOIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
REFERENCE	VESTIAIRE
DESIGNATION	VESTIAIRE AMBULATOIRE
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE	52 kg (Charge maximale admissible comprenant le poids total des affaires (15kg) et des accessoires)
POIDS	25 kg
DIMENSION HORS TOUT	Largeur hors tout : 47,5 cm Longueur hors tout : 59 cm Hauteur hors tout : 126 cm
EQUIPEMENTS	Stratifié compact, Finition résine acrylique 4 roulettes double galets Ø 100mm Bac à chaussures amovible en ABS blanc Serrure mécanique à code Poignée de poussé Tiroir en en ABS blanc Penderie pour vêtement Système d'identification patient / fauteuil / chevet
OPTIONS DISPONIBLES	Coloris au choix : gris anthracite, noir ou blanc Serrure digitale

*BMB MEDICAL ne peut être en aucune façon tenue responsable des éventuels problèmes induits si le matelas utilisé ne correspond pas aux références matelas préconisées par BMB MEDICAL

VUE D'ENSEMBLE



1.2 DOMAINE D'APPLICATION

Le vestiaire est conçu pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. Il permet de stocker les affaires personnelles des patients.

1.3 OBJECTIF DU MANUEL D'UTILISATION

Professionnels de la santé, ce manuel d'utilisation a été réalisé pour vous dans le but de vous fournir toutes les informations nécessaires et l'ensemble des précautions d'usage à respecter pour une utilisation en toute autonomie et en toute sécurité.

Les instructions relatives à l'entretien et au suivi du produit garantissent sa durée de vie.

Il est donc indispensable que la totalité du personnel y ait accès et soit ainsi informée des procédures de manipulation et des risques liés à l'utilisation de ce dispositif médical. Celui-ci doit être manipulé par une personne qualifiée et sensibilisée aux risques inhérents à une mauvaise utilisation.

1.4 CONSERVATION

Ce manuel d'utilisation doit être conservé à proximité du produit dans un endroit destiné à cet effet. Il doit être maintenu à l'abri de tout élément et de toute substance compromettant sa parfaite lisibilité.

1.5 SYMBOLES ET NORMES UTILISES

	Signale que le non-respect de la recommandation peut entraîner la mise en danger du patient, de l'utilisateur, ou endommager le matériel.
---	---

2 MODE D'EMPLOI

2.1 SYSTEME DE VERROUILLAGE A CLE

Chaque vestiaire est vendu avec deux clés uniques. Ces deux clés sont affiliées à un seul vestiaire. Une clé universelle peut être commandée en option.

2.2 SERRURE DIGITALE

Il suffit de taper deux fois un code au choix à 4 chiffres et le vestiaire se verrouille. Pour ouvrir la porte, il faut taper une fois le code. En cas d'oubli, le master code à utiliser est le suivant : **22446688**

3 NETTOYAGE ET DESINFECTION

3.1 INTRODUCTION

Un nettoyage régulier et correct garantit la durée de vie du dispositif (cf. programme de nettoyage établi au moment de la mise en service du dispositif en désignant le personnel de référence).



Le fait de ne pas effectuer les opérations de nettoyage peut entraîner un risque d'infection dû à la présence de sécrétions et/ou de résidus sur le vestiaire.

Les conseils de nettoyage ci-après ne se substituent pas au protocole interne de votre établissement.

3.2 PERIODICITE

Le nettoyage doit être effectué :

- À chaque patient, c'est-à-dire entre deux patients.
- Intégralement chaque semaine

3.3 MATERIEL ET PRODUITS RECOMMANDES

N'utiliser que les produits nettoyants ou désinfectants autorisés et normalisés.

Molécules désinfectantes adaptées au mobilier :

- Aldéhydes
- Formaldéhydes
- Glutaraldéhydes
- Alcools
- Phénols
- Chlorhexidine
- Tensio actif amphotères
- Ammoniums quaternaires

Prendre connaissance des produits strictement prohibés par le fabricant

(Cf. liste ci-dessous)

Liste des produits strictement prohibés :

Solvants :	Essence / alcools supérieurs aliphatiques et aromatiques/cétones-esters / trichloréthylène-perchloréthylène
Base :	Soude 10% / Ammoniaque 10%
Acides :	Nitrique 10% / Chlorhydrique 30% / Citrique 10%
Divers :	Eau distillée / Eau de Javel / Poudres abrasives / Tout produit abrasif

- Ne pas utiliser d'ustensiles abrasifs ni d'eau de Javel peu diluée.
- Ne pas mélanger les produits.
- Respecter les dosages et dilutions prescrits.
- Utiliser des lavettes propres à usage unique.
- Effectuer le nettoyage et la désinfection avec des vêtements et des gants de protection.

3.4 CONSEILS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION

3.4.1 OPERATION DE NETTOYAGE SELON LES ELEMENTS

Après le nettoyage, séchage du VESTIAIRE et vérification du bon fonctionnement

3.4.2 CONSIGNES A RESPECTER

- L'ensemble des surfaces du mobilier doit être nettoyé.
- Lors du nettoyage ou de la désinfection, il est recommandé de :
 - Pulvériser ou appliquer à l'aide d'une lavette le produit.
 - Débuter par le mobilier le plus proche du patient en insistant sur les parties en contact avec les utilisateurs.
 - Procéder de haut en bas.
 - Laisser sécher le matériel.

Les produits tâchant (ex. : « produit bleu » ou éosine) doivent être nettoyés au plus vite afin d'éviter toute imprégnation.

4 PRECAUTIONS

4.1 UTILISATIONS ANORMALES



Ce VESTIAIRE est conçu et adapté aux pratiques et procédures médicales donc à une utilisation spécifique. Une utilisation anormale peut être la cause d'accidents pour l'utilisateur ou même celle d'irréremédiables détériorations.

La liste suivante des utilisations anormales du vestiaire n'est pas exhaustive et la société BMB MEDICAL s'en remet au bon sens des utilisateurs.

- Ne pas utiliser le vestiaire pour s'asseoir.
- Ne pas utiliser le vestiaire avec une charge supérieure à 15 kg.
- Ne pas laver le vestiaire, soit à grande eau, soit avec un jet sous pression (voir notice de nettoyage).
- Ou toute autre utilisation sans lien avec la fonction normale du vestiaire.

4.2 TRANSPORT ET STOCKAGE

4.2.1 TRANSPORT

Lors du transport du VESTIAIRE en vue de son stockage, il est recommandé, afin qu'il ne subisse aucun risque de choc ou de chute :

- De le sangler à un support du moyen de transport
- De le bâcher
- D'enclencher le frein
- De le mettre en position basse

Les dégâts provoqués pendant le transport ne sont pas couverts par la garantie. Les réparations et la substitution des pièces endommagées seront à la charge du client.

4.2.2 STOCKAGE

Lorsque le VESTIAIRE est stocké, s'assurer qu'il est :

- Freiné
- Bâché
- Dans une pièce tempérée et non humide (température : de +10°C à +40°C).

Pendant son stockage, aucun poids lourd ne doit être posé dessus.

Le vestiaire ne doit pas être considéré comme plan d'appui pour aucun type de matériel.

Le dispositif ne doit pas être exposé et encore moins être au contact de sources thermiques de combustion et d'agents inflammables.

4.3 GARANTIE

Matériel garanti 2 ans pièce et main d'œuvre.

Toutefois, la garantie des produits est rendue caduque par :

- Une utilisation anormale (*Paragraphe 4.2*)
- Le non-respect de toute autre condition de garantie
- Tout nettoyage inadapté
- L'utilisation d'accessoires ne provenant pas du fabricant

4.4 SERVICE APRES VENTE

Pour toute information relative à l'installation, à l'utilisation ainsi qu'à l'entretien du produit ou toute autre question, contacter le Service Après-Vente à l'adresse suivante : sav@bmb-medical.com ou votre distributeur local pour l'Étranger.

Grâce à votre « Espace Client » sur le site www.bmb-medical.com, accédez en ligne à vos matériels et réaliser vos demandes d'intervention et leur suivi directement par cette interface sécurisée.

L'opérateur doit lire attentivement les informations contenues dans ce manuel d'utilisation, en particulier celles concernant les précautions d'emploi pour la sécurité et les méthodes d'installation et d'utilisation.

En cas de doute sur l'interprétation correcte des instructions, ne pas hésiter à contacter le Service Après-Vente qui sera toujours à votre écoute.

Afin de faciliter la commande de pièces de rechange vous pouvez demander au service SAV les éclatés de vos produits, ainsi vous pourrez obtenir les références des pièces voulues.

4.5 ENVIRONNEMENT

4.5.1 MATERIEL USAGE



Le matériel en fin de vie doit entrer dans le circuit de récupération (déchetterie) adapté en vue de son recyclage.

Le démantèlement aisé du chariot-brancard permet son élimination et sa valorisation selon la réglementation en vigueur.



BMB MEDICAL
100 Avenue du Formans
CS 11001
01604 TREVOUX

