

PROCEDURE DE CHANGEMENT DE COLONNE CLAVIA I-LINE LSA



Sommaire

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Préparation du produit	3
3. Démontage colonne côté pied	5
4. Démontage colonne côté tête	7
5. Remontage colonne côté pied	11
6. Remontage colonne côté tête.....	16
7. Vérification	21


1. Préparation outillage et pièces

Pour procéder au changement d'une colonne sur un fauteuil CLAVIA, il vous faut :

- 1 colonne neuve
- Une visseuse avec embouts

Temps de l'intervention : 30 Min

Avant de commencer, installez-vous dans un lieu propre puis s'assurer que le produit est débranché du secteur.

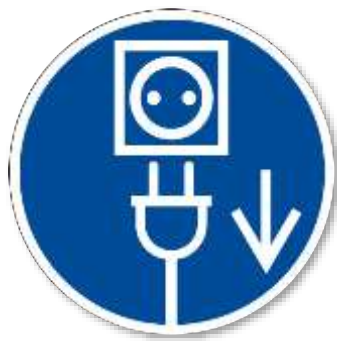

2. Préparation du produit

Pour commencer, retirer le matelas du brancard.

Ensuite, déscratcher le plan dur du milieu pour accéder à l'électronique (sur les anciennes versions le plan dur est collé au double face).



Afin d'éviter la détérioration de votre produit nous vous conseillons de protéger vos barrières (avec couverture, un carton au sol...), mettre les freins puis basculer votre Clavia sur un côté en faisant attention aux câbles afin de ne rien écraser.



Identifier le côté de colonne à changer et aller au paragraphe correspondant.

3. Démontage colonne côté pied

Coté couchage, débrancher le câble de la colonne défectueuse, pour cela enlever l'anti-arrachement avec une clé ou une clé à cliquet avec un embout Torx.



Retirer l'anti arrachement, avec le câble.



Conserver soigneusement le collier et les 2 vis.

Ensuite dévisser les 4 vis de la colonne avec une visseuse muni d'un embout Torx.



Une fois le côté supérieur de la colonne dévissée, il vous reste le côté châssis. Pour cela dévisser les 4 vis à l'aide de la visseuse avec embout Torx.



Retirer la colonne défectueuse, en l'inclinant afin de la sortir facilement comme ci-dessous :



Aller au paragraphe 5.

4. Démontage colonne côté tête

Coté couchage, dans un premier temps dévisser les 4 vis de la colonne à l'aide de la visseuse.



Ensuite, débrancher la colonne défectueuse, pour cela enlever l'anti-arrachement avec une clé ou clé à cliquet avec un embout Torx.

Pour la deuxième vis difficile d'accès, écarter légèrement la liaison de la colonne afin d'atteindre la vis. (voir photo)





Une fois que l'anti arrachement est dévissé, retirer le câble.



Une fois le côté supérieur de la colonne dévissé, passer coté châssis afin de retirer les 4 vis à l'aide de la visseuse.



Retirer la colonne défectueuse, en la mettant de travers afin de la ressortir facilement.



Aller à l'étape 6.

5. Remontage colonne côté pied

Munissez-vous de votre nouvelle colonne.

Avant de l'installer, vous devez mettre la nouvelle colonne à une hauteur inférieure mais proche de l'autre colonne. pour cela débrancher au niveau du boîtier la colonne qui toujours fixé sur le produit. Dans ce paragraphe, vous devez débrancher le connecteur 2.



BOITIER

Sur le boîtier CB06, déclipser légèrement la barrette anti-arrachement sur le côté gauche et droit (utiliser un petit tournevis plat). Il suffit de glisser le tournevis entre l'extérieur et le clip de la barrette puis de pousser vers l'intérieur comme expliqué ci-dessous.



Une fois la barrette déclipser, débrancher la colonne pied (numéro 2).

Pour rappel :

1 – Vérin de relève buste

2 – Vérin colonne tête


3 – Vérin de relève jambe

4 – Vérin colonne pied

HB – Télécommande ou répartiteur

Brancher votre colonne neuve avec son câble



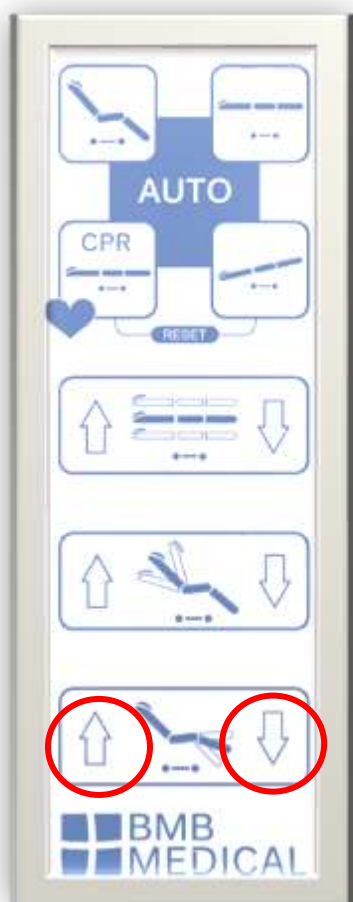

Effectuer la procédure SAV, pour cela prendre la télécommande de votre Clavia , puis appuyer sur les 2 touches du relève jambe.

La colonne se lève, laissé la monter de façon à ce qu'elle soit à peu près au même niveau que celle déjà installé sur le Clavia.


Vous avez une marge de décalage d'environ de 7cm maximale.

Une fois la colonne au même niveau débranchez-la , puis installer là sur votre produit ; mettez la de travers afin de l'installer plus facilement.





Positionnez-vous coté roue du Clavia , puis commencer par visser la colonne en ne serrant pas complètement les vis afin de laisser du jeu .

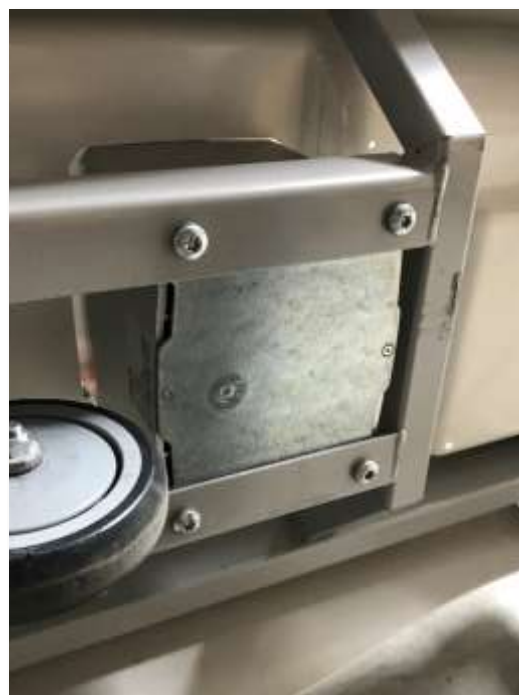

Une fois cette étape effectuée, passez coté couchage afin de fixer la colonne.



Les 4 vis installées, brancher votre colonne avec le câble, puis fixer l'anti-arrachement.



Terminer de resserrer les vis de la colonne coté pied, puis redresser votre produit.



Réeffectuer la procédure SAV, afin de réinitialiser les 2 colonnes. Cette fois laissez monter les 2 colonnes en butée haute (le produit effectue un bip sonore lorsque ce point a été atteint)

6. Remontage colonne côté tête

Munissez-vous de votre nouvelle colonne.

Avant de l'installer, mettre à niveau les 2 vérins d'hauteur variable, pour cela débrancher au niveau du boîtier la colonne qui fonctionne.



BOITIER

Sur le boîtier CB06, déclipser la barrette anti-arrachement sur le côté gauche et droit (utiliser un petit tournevis). Il suffit de glisser le tournevis entre l'extérieur et le clip de la barrette puis de pousser vers l'intérieur comme expliqué ci-dessous.




Une fois la barrette déclipser, débrancher la colonne tête (numéro 2).

Pour rappel :

- 1 – Vérin de relève buste
- 2 – Vérin colonne tête
- 3 – Vérin de relève jambe
- 4 – Vérin colonne pied
- HB – Télécommande ou répartiteur

Brancher votre colonne neuve

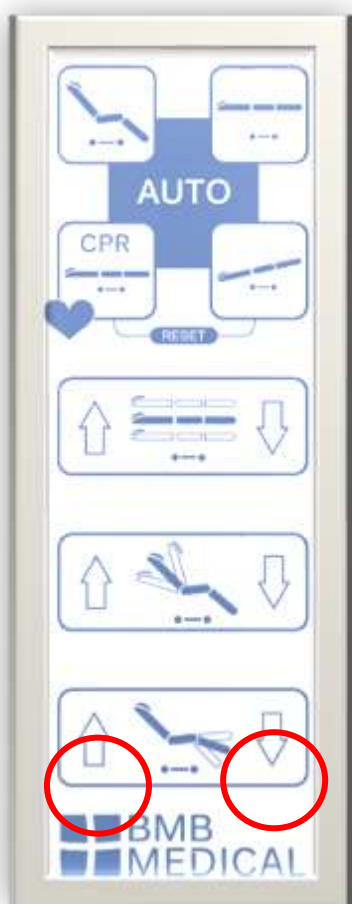

Effectuer la procédure SAV, pour cela prendre la télécommande de votre Clavia , puis appuyer sur les 2 touches du relève jambe.


La colonne se lève, laissé la monter de façon à ce qu'elle soit à peu près au même niveau que celle déjà installé sur le Clavia.

Vous avez une marge de 7cm maximale.

Une fois la colonne au même niveau redébranchez-la, puis installer là à son emplacement en la mettant de travers afin de l'installer facilement.



Positionnez-vous coté roue du Clavia, puis commencer par visser la colonne en ne pas serrant pas complètement afin de laisser du jeu lors du serrage des vis coté couchage.

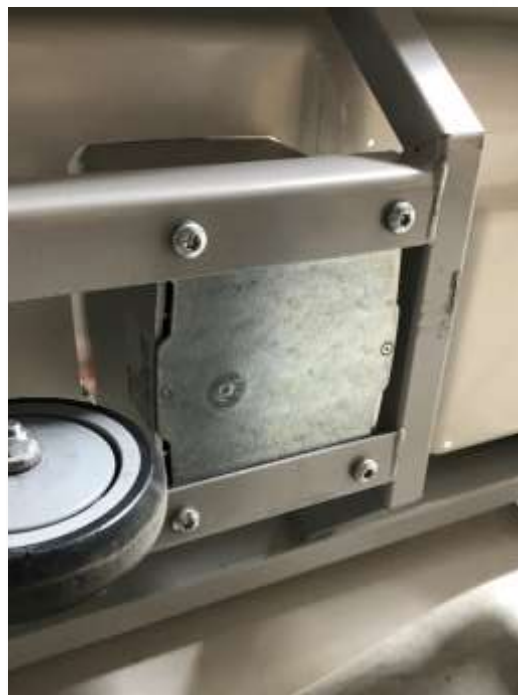

Une fois cette étape effectuée, passez coté couchage afin de brancher et fixer la colonne.

Dans un premier temps brancher votre colonne. En veillant à passer le câble par-dessus la liaison de la colonne (voir photo), puis fixer l'anti-arrachement.



Une fois l'anti-arrachement fixé, rapprocher la liaison à la colonne afin de permettre sa fixation avec les 4 vis.



Puis terminer de resserrer les vis de la colonne, puis redresser votre produit.



7. Vérification

Effectuer la procédure SAV (appuyer sur les 2 touches du relève jambes), puis les touches de hauteur variable.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux