

# PROCEDURE

## REMPACER VIS PAR AXE DU VERIN RELEVÉ BUSTE I-CARE





## SOMMAIRE

- 1. Préparation outillage et pièces..... 3
- 2. Démontage ..... 3

## 1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de vérin, il vous faut :

- Clé plate de 17
- Jeu de clé Allen
- Cutter
- Lime

Temps de l'intervention : 10-15 Min

Remonter le relève buste pour pouvoir changer facilement les axes.

## 2. Démontage



Changer la  
vis qui passe  
à travers la  
tringle

Retirer le bouchon pour cela prendre un cutter et placer la lame entre la patte et le bouchon et faire levier



Placement de la lame

Dévisser la vis à l'aide d'une clé de 17 et d'une clé Allen.

Retirer la vis.

Avant de mettre l'axe, prendre une lime ronde et retirer les copeaux de peinture pour que l'axe passe correctement dans la patte.

Prendre l'axe inox, et le faire passer dans la patte, et si besoin taper dessus avec un maillet pour le rentrer entièrement.

Placer le clip (face plate plaque sur la patte).

Placer le clip de l'autre côté de la même manière.

Inutile de changer la vis arrière qui passe dans la tête de déclenchement.

Faire le changement de l'autre côté du relève buste.



## CONTACT



### Mail

sav@bmb-medical.com



### Téléphone

04 74 08 71 73



### Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



### Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



### Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX