

PROCEDURE

INSTALLATION PLAQUE DE BLOCAGE DES MANCHONS D'ACCOUDOIRS





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	3


1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder à l'installation des plaques, il vous faut :

- Une clé plate ou à cliquet de 13
- Un jeu de clé Allen
- 2 plaques de maintien

Temps de l'intervention : 10 Min

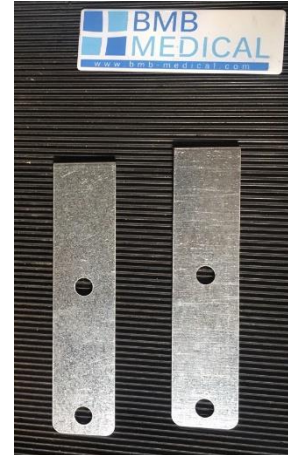

2. Démontage

Pour faciliter le démontage de l'assise, mettre le produit en position relax.



Ensuite glisser votre main entre l'assise et le relève buste et soulever pour accéder sous l'assise.

Puis déscratcher l'assise du tube avant et vous pourrez la retirer.




Désormais, vous accédez à l'assise. Repérer les 3 vis (dans le cas d'un CAREXIA FP) :




Il est normal d'avoir 2 vis du côté de la manette pour créer une butée et éviter de plaquer l'accoudoir contre la manette.

A l'aide d'une clé Allen et une clé plate ou à cliquet, dévisser les 3 vis et écrous.

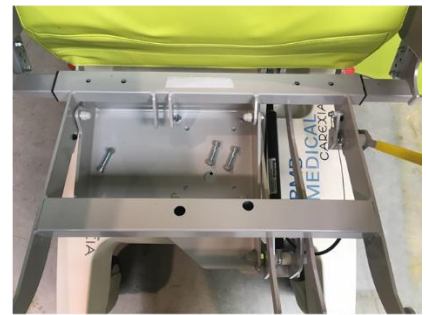

3. Installation de la plaque

Puis positionner la plaque de maintien, de façon à ce que le pli vienne bloquer le manchon noir et remettre les vis à leur place respectivement. Réaliser la même chose pour le côté opposé.

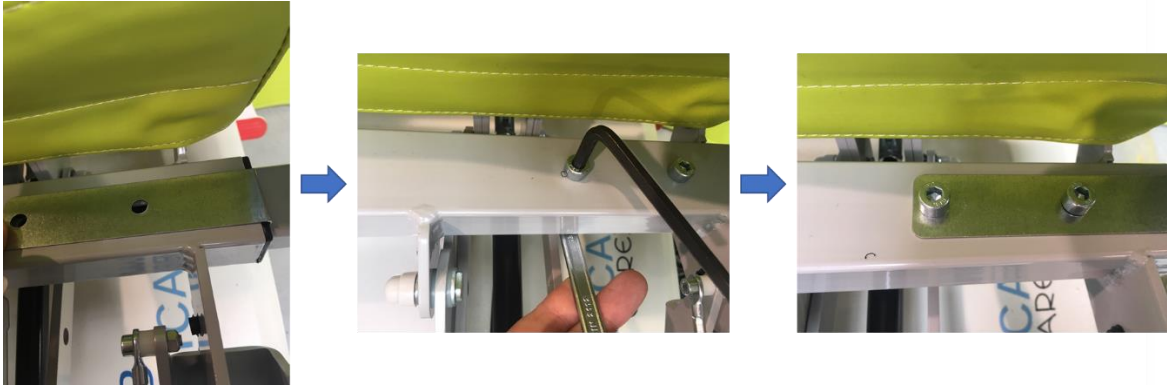


Vérifier, que la plaque est correctement installée.



Il ne reste plus qu'à remettre la garniture de l'assise en la scratchant.



Puis repositionner l'assise de façon à ce que les têtes de vis de la traverse se logent dans les encoches de la garniture.

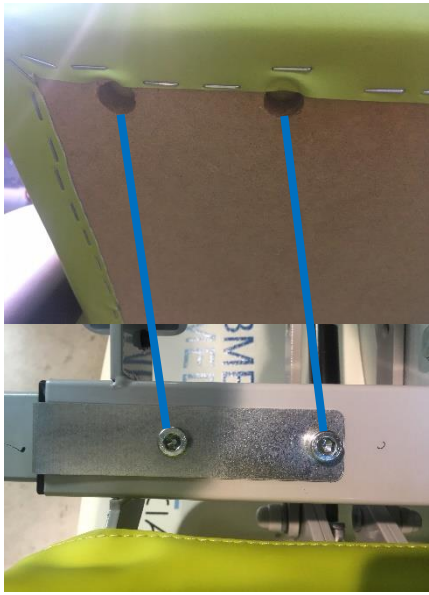

CONTACT



Mail
sav@bmb-medical.com



Téléphone
04 74 08 71 73



Site internet
<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client
<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale
100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX

