

# PROCEDURE DE REGLAGE DES VERINS DE RELEVÉ BUSTE CAREO





## SOMMAIRE

- 1. Préparation outillage et pièces..... 3
- 2. Démontage ..... 3

## 1. Préparation outillage et pièces




Pour procéder au réglage des vérins, il vous faut :

- Clé plate de 17
- Jeu de clé
- Cutter ou tournevis fin

Temps de l'intervention : 15 Min

## 2. Démontage

Positionner le relève buste de façon à ce que les vérins soient verticaux.

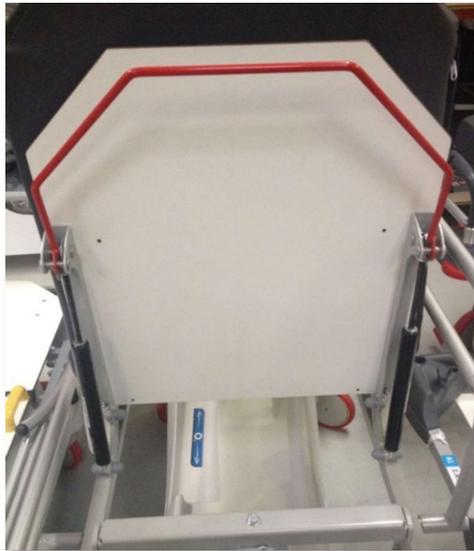

La première étape va consister à vérifier, si le réglage est correct, le positionnement du vérin dans la tête de déclenchement doit être comme ci-dessous :



S'il y a un espace supérieur à 1 mm comme ci-dessous, c'est que le réglage doit être refait.




Si le vérin est dans ce cas, alors vous devez procéder à son réglage.

Dévisser le contre écrou au niveau de la tête de déclenchement :



Retirer les 2 bouchons en partie basse du vérin à l'aide d'un cutter ou tournevis fin

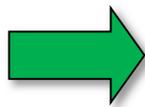

Dévisser la vis et l'écrou de fixation du vérin de façon à ce que le vérin se positionne verticalement par son propre poids.



Désormais vous pouvez visser le vérin dans la tête de déclenchement jusqu'à ce que la pin de déclenchement soit en contact (ou  $< 1$  mm) de la tringle de relève buste. Vous pouvez effectuer que des demi-tours (La partie basse du vérin doit être dans l'axe du trou de fixation). ATTENTION, si la pin est trop en appui sur la tringle, le vérin se déclenchera légèrement et le relève buste remontera tout seul.

Lorsque votre serrage est correct, serrer le contre écrou et refixer le vérin en partie basse. Ne pas oublier de mettre les rondelles polyamides et le bouchon.

Réaliser le même réglage sur l'autre vérin.

## CONTACT



### Mail

sav@bmb-medical.com



### Téléphone

04 74 08 71 73



### Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



### Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



### Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX