

PROCEDURE CHANGEMENT CREMAILLERE ACCOUDOIR CAREXIA



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	3
3. Remontage.....	7

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la crémaillère d'accoudoir, il vous faut :


- Clé plate de 10
- Clé Allen
- Maillet
- Crémaillère

Temps de l'intervention : 20 Min

2. Démontage

Dans un premier temps, se mettre dans un lieu de travail adapté.

Pour commencer, décaler votre accoudoir du relèvement buste puis activer la manette pour le positionner à la perpendiculaire du bras.


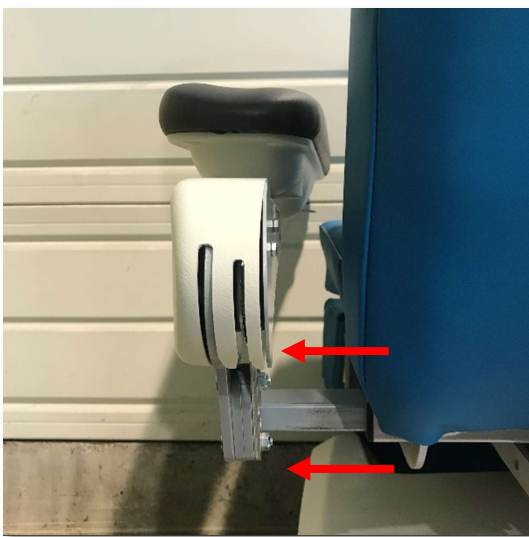


Repérer les 2 clips plastiques sur le capot.




Puis retirer les, pour cela prendre un outil avec un embout fin, comme une clé Allen ainsi qu'un maillet, et appuyer d'un coup sur le centre pour y faire tomber l'axe central.


Puis retirer l'autre partie.

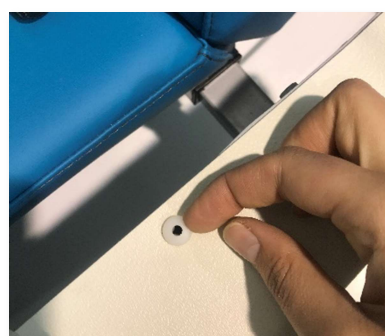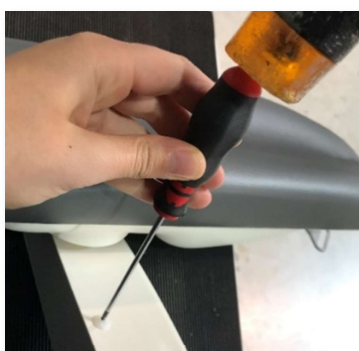

Retirer le capot de l'accoudeoir délicatement afin d'accéder à l'ensemble du système.

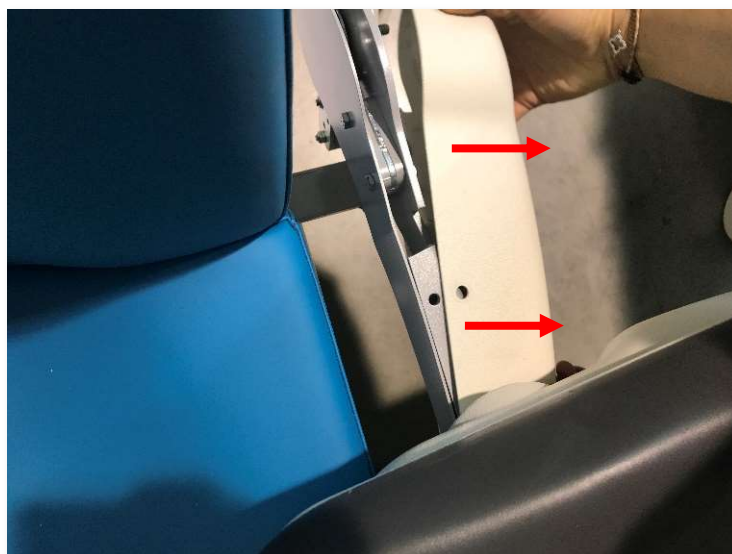

Repérer les 4 vis, puis enlever les à l'aide de 2 clés de 10 en commençant par celles qui maintiennent la tôle.

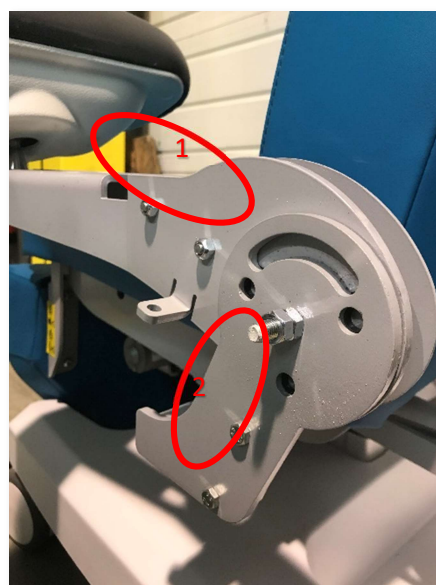



Dévisser les 2 vis qui maintiennent la charnière. Une fois tout dévisser mettre de côté l'ensemble des pièces.




3. Remontage

Positionnez-vous dos au CAREXIA pour plus de facilité.



Dans un premier temps, prendre 2 vis et les positionner dans les trous de perçage sur la partie basse de l'accoudoir comme photos ci-joint, puis ajouter les 2 entretoises ainsi que votre nouvelle crémaillère.

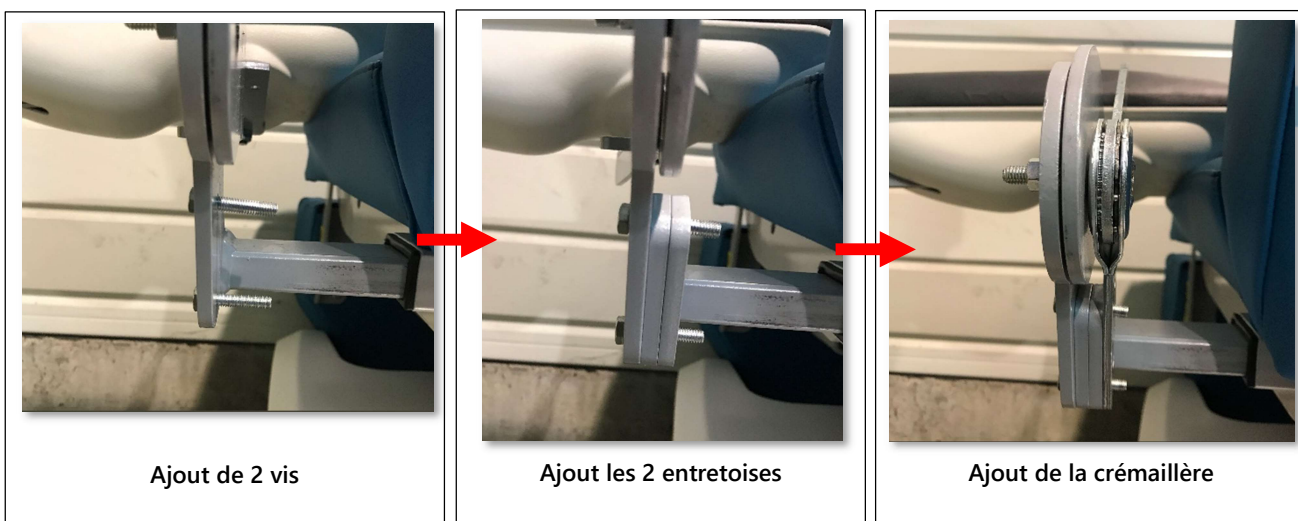



Veuillez à ce que la charnière soit dans le bon sens.



Une fois tout est en place, visser le tout à l'aide de 2 clés de 10 et de vos 2 écrous.




Prendre la tôle d'accoudoir, au niveau des 2 trous de perçage ajouter 2 vis. Enfiler une entretoise, ainsi que votre crémaillère puis ajouter la dernière entretoise.




Une fois cette étape effectuée, ramener le reste de l'accoudoir à vous afin de positionner l'ensemble à votre bras d'accoudoir face au 2 vis. Une fois en face il vous suffit de passer les 2 vis dans les trous de perçage prévus.

Afin de fixer le tout, ajouter les 2 écrous en les serrant à l'aide de 2 clés de 10.

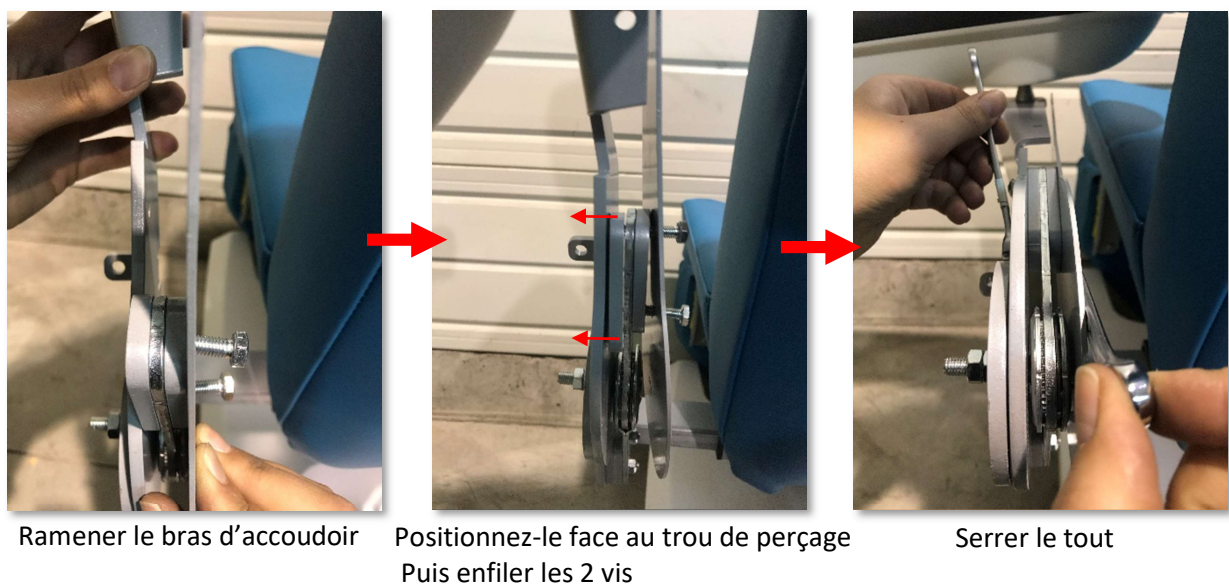


Vous avez terminé le changement de la crémaillère, avant de remettre le capot d'accoudoir. Tester le fonctionnement de l'accoudoir.

Repositionner votre bras droit face à l'accoudoir en activant la manette.

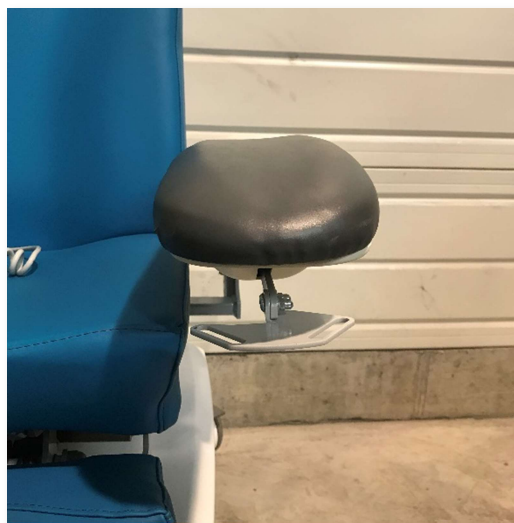

Tester ensuite le fonctionnement de la charnière, soulever votre accoudoir, en bloquant à différents niveaux puis allez jusqu'en butée afin de redescendre complètement l'accoudoir.

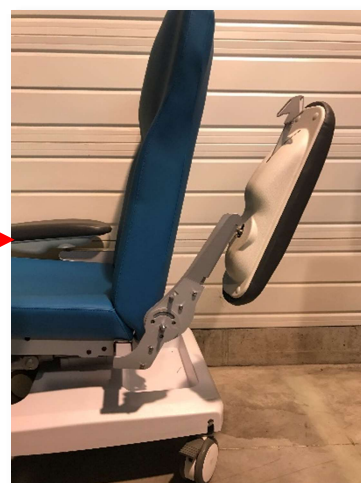

Une fois que le contrôle de l'accoudoir est effectué, il ne vous reste qu'à ajouter le capot en le bloquant avec les rivets blancs.





CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux