

PROCEDURE INSTALLATION BATTERIE CAREXIA





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	4
3. Installation nouvelle batterie.....	6
4. Vérification.....	8

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la batterie, il vous faut l'outillage suivant :

- Tournevis plat

Préparer les pièces détachées suivantes :

- Batterie VEFPTBB
- Scratch D35

Temps de l'intervention : 10 Min

Afin de faciliter le confort de travail et l'accès, placer le fauteuil en position urgence dans la position la plus haute.



Lors du démontage, veillez à bien faire attention au positionnement de vos mains. Ne pas les passer dans le mécanisme.




2. Démontage

Pour commencer débrancher le produit du secteur.


Pour pouvoir accéder aux boîtiers (batterie et boîtier de commande), vous devez déscratcher l'assise à l'arrière et la basculer vers l'avant. Ensuite retirer les scratchs, pour pouvoir retirer l'assise.




La batterie est placée à gauche et le boîtier à droite.

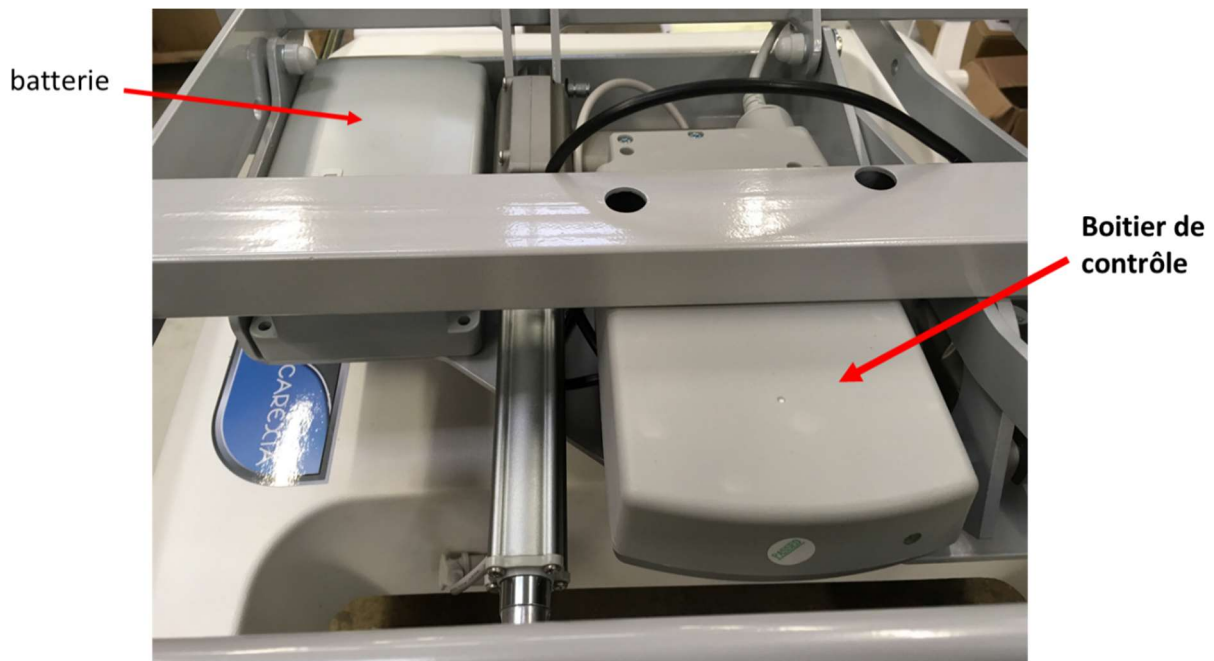

Pour déconnecter la batterie du boîtier, munissez-vous d'un tournevis. Repérer l'encoche sur le boîtier et appuyer à l'aide du tournevis tout en tirant le capot vers l'avant.

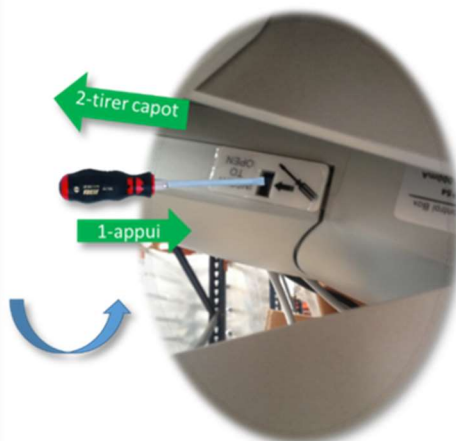

Vous accédez à l'ensemble de la connectique.

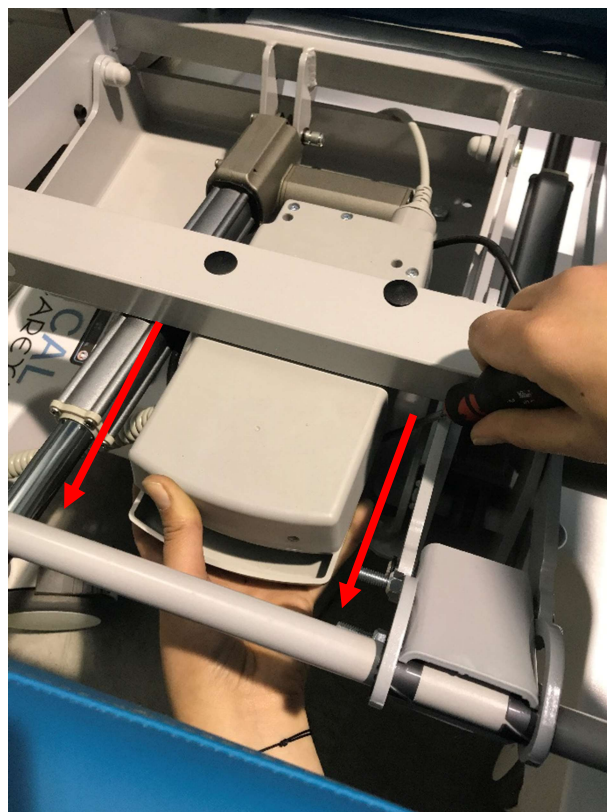

Vue du dessous



Connecteur Batterie


Le connecteur de batterie est placé à droite au fond. Déconnecter le et déscratcher la batterie de son support.

3. Installation nouvelle batterie


Prendre la nouvelle batterie :



Installer le scratch sous la batterie afin de la fixer sur l'assise. La led doit être placée sur l'avant et le cordon sortir latéralement vers le boîtier de commande.

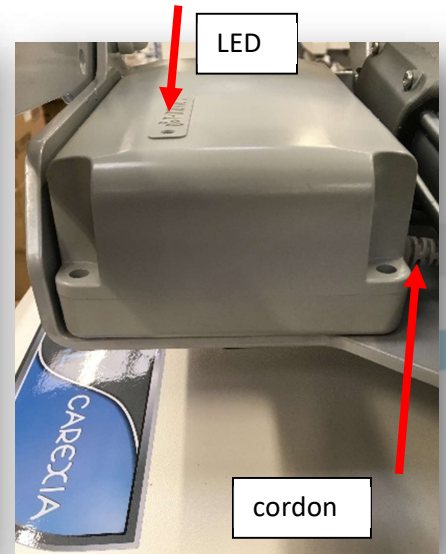

Reconnecter la batterie sur le boîtier, sur l'embase jaune « TBB ».

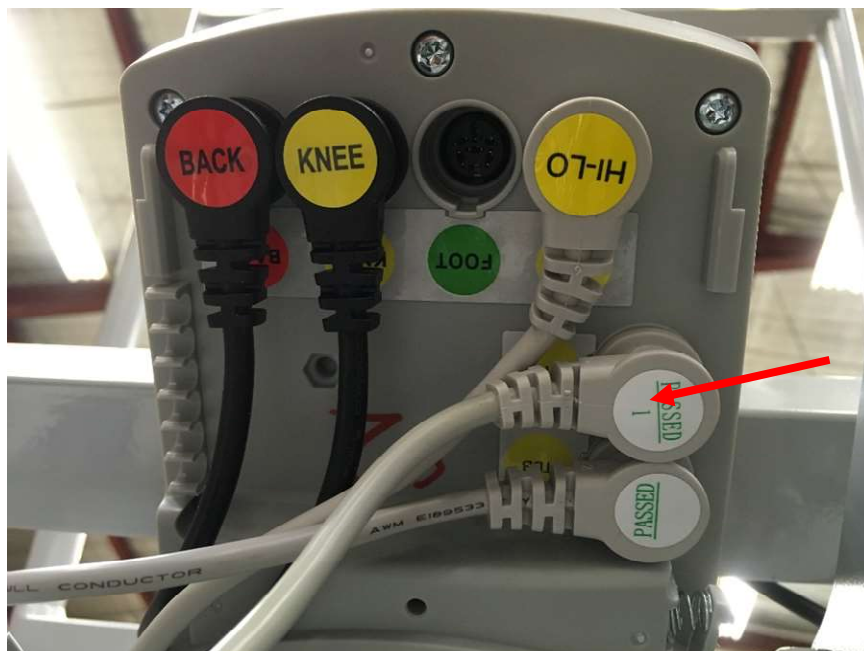

Clipser correctement le câble sur la barrette de maintien

Vérifier que le voyant de batterie clignote (ce qui indique que la connexion est correcte)

Remettre le cache du boîtier de commande.

Reprendre la garniture de l'assise, et rescratché la sur le tube de traverse rond puis reposer la correctement sur l'arrière en s'assurant qu'elle soit correctement scratchée.

4. Vérification

Remettre le produit en position fauteuil pour vérifier que le produit fonctionne correctement sur batterie.

Puis brancher le produit sur le secteur et tester le fauteuil dans toutes ses positions jusqu'en butée de chaque vérin.

CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux