

# PROCEDURE INSTALLATION BARRE DE POUSSEE CAREXIA





## SOMMAIRE

- 1. Préparation outillage et pièces..... 3
- 2. Montage ..... 3

## 1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la barre de poussée, il vous faut :

- Un tournevis cruciforme
- Clé Allen de 5

Temps de l'intervention : 10 Min

## 2. Montage

Pour information, la barre de poussée du Carexia se fixe à l'aide des trous de perçage présents sur la structure relève buste (photo ci-dessous)



Dos au Carexia , repérer à travers la garniture la traverse.



Une fois la traverse repérée, trouver les 2 trous de fixation, au toucher cela fait 2 petites bosses.

Une fois que vous êtes sûr de l'emplacement de ces 2 trous percer la garniture à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Faites la même chose de l'autre côté, la barre de poussée se fixe avec 4 vis de fixation.

Une fois cette étape effectuée, prenez votre barre de poussée puis installez-la avec les 4 vis (BHC 8X25) à l'aide de votre clé Allen de 5.



## CONTACT



### Mail

sav@bmb-medical.com



### Téléphone

04 74 08 71 73



### Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



### Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



### Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX