

PROCEDURE

CHANGEMENT DU BOITIER DE

COMMANDE CAREXIA





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	3
3. Remontage.....	7
4. Vérification.....	8

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du boîtier, il vous faut :

- Tournevis plat
- Jeu de clé Allen ou vissuese avec embouts

Les fauteuils Carexia possèdent 4 soft possible en fonction du modèle. Lors de la commande de votre boîtier, bien indiquer le n° de série ou le n° du soft indiqué sur le boîtier.

Le n° du soft est indiqué soit :

- À la main sur les premières versions de boîtiers
- Soit avec une pastille de couleur à l'avant.



Temps de l'intervention : 10-15 Min


2. Démontage

Dans un premier temps, se mettre dans un lieu de travail adapté. Puis débrancher votre produit de la prise secteur.

Positionnez-vous face à votre CAREXIA. Afin de procéder au changement du boîtier, si vous pouvez, incliner le relève buste légèrement, pour pouvoir retirer la garniture d'assise en la déscrachant à l'arrière et la basculer vers l'avant. Puis retirer les scratchs, pour pouvoir retirer l'assise.




Repérer le boîtier de contrôle :

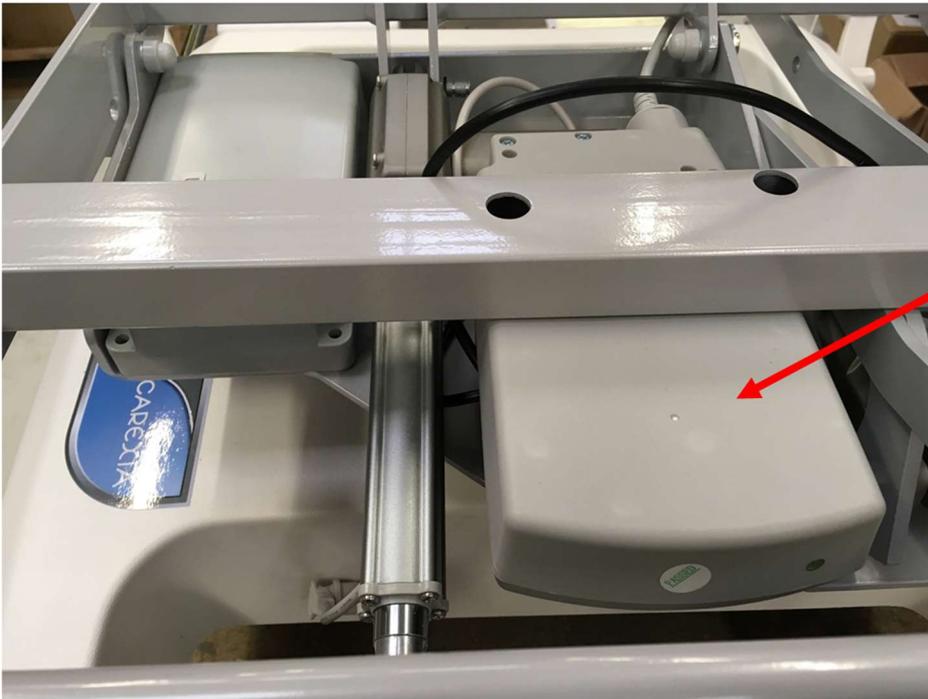


**Boîtier de
contrôle**

Vous devez débrancher tous les câbles présents sur le boîtier.

Pour cela, ouvrez le boîtier, en vous munissant d'un tournevis. Repérer l'encoche sur le boîtier et appuyer à l'aide du tournevis tout en tirant le capot vers l'avant.

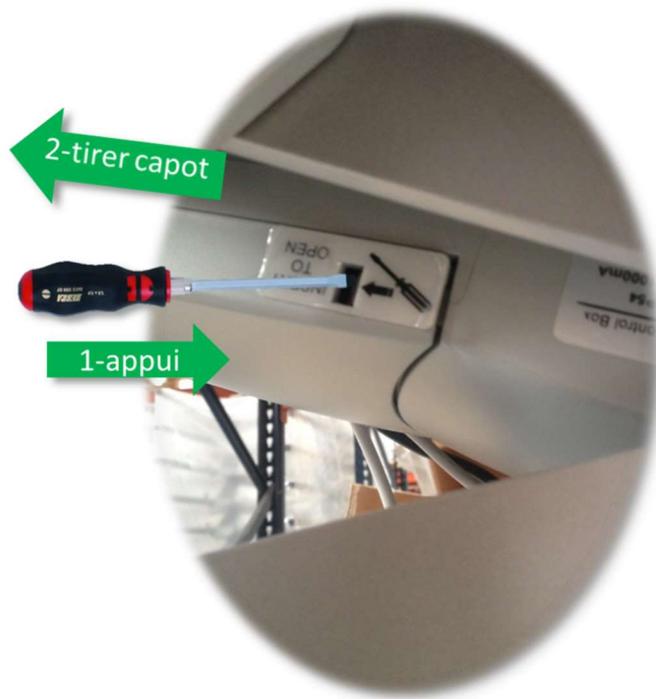

Vous accédez à l'ensemble de la connectique.

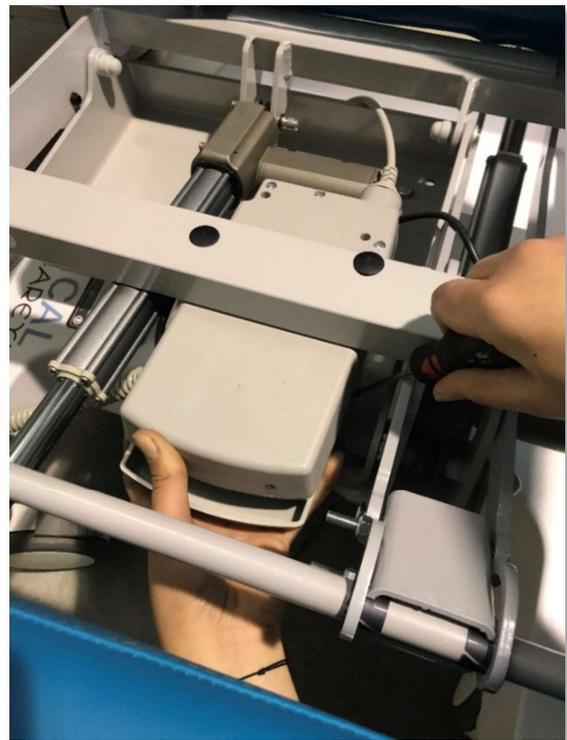




Vue du dessous

N'hésitez pas à repérer les fils afin de faciliter le branchement lors de l'installation du nouveau boîtier.

Débrancher les câbles de vérins, télécommande ainsi que le câble d'alimentation à l'arrière. Puis procéder au dévissage des 2 vis de fixation en maintenant le boîtier lors du dévissage.

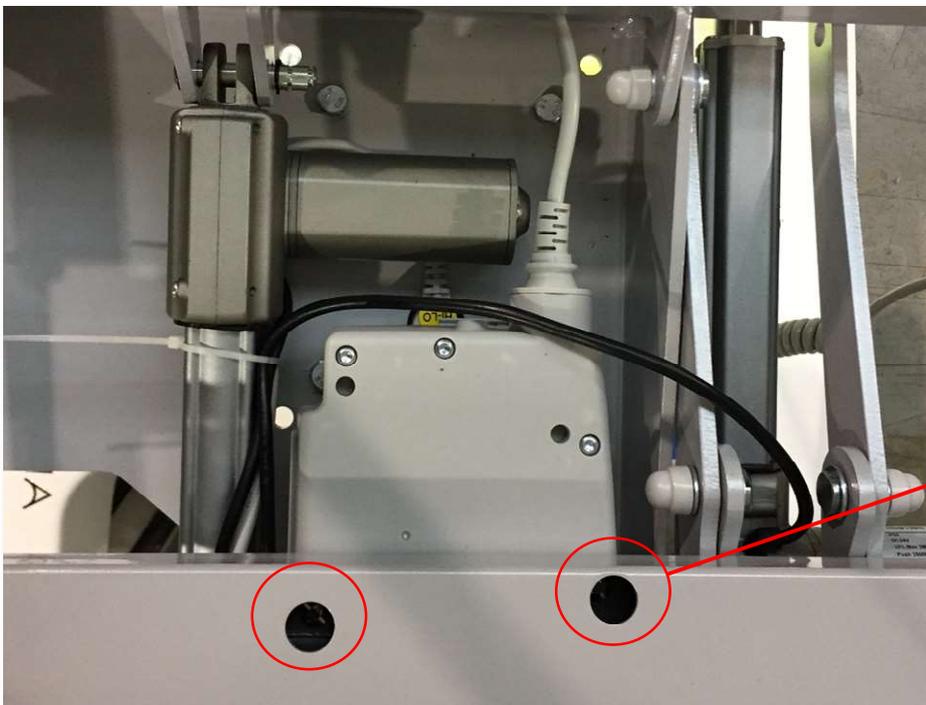

Retirer le boîtier.

3. Remontage


Munissez-vous de votre nouveau boîtier, pour plus de facilité pour la suite ouvrir le cache du boîtier à l'aide d'un tournevis en appuyant sur la languette en faisant glisser le capot.



Commencer par refixer le boîtier sur la traverse à l'aide des 2 vis. Rebrancher le câble d'alimentation à l'arrière du boîtier. **ATTENTION DE BIEN RESPECTER LE PASSAGE DU CABLE NOIR DU VERIN D'ASSISE. IL DOIT PASSER AU DESSUS DU BOITIER COMME CI-DESSUS.**



Ensuite rebrancher l'ensemble des câbles en respectant leur emplacement. Et clipser les câbles dans la barrette à gauche prévu pour cela.

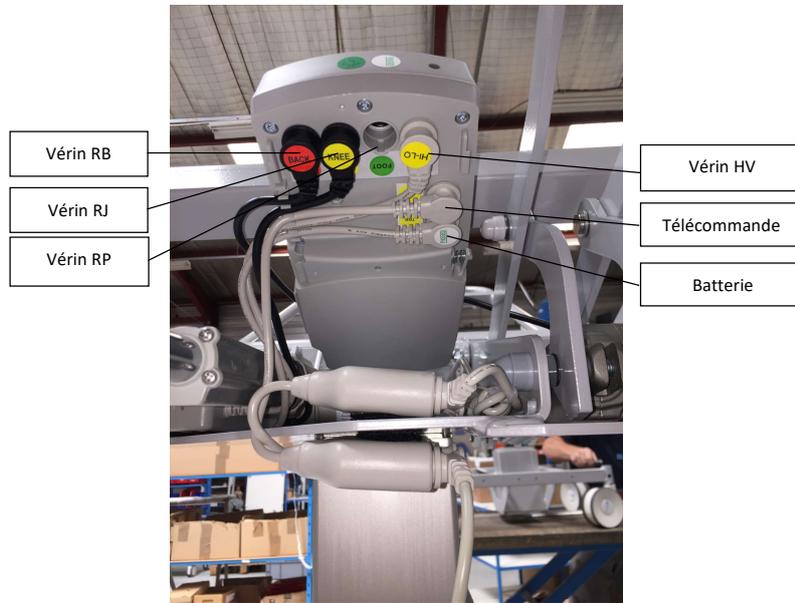

4. Vérification

Avant de refermer le boîtier, rebrancher le câble d'alimentation et vérifier que la led verte est bien allumée sur la face avant du boîtier.

Ensuite effectuer quelques mouvements de tous les vérins pour s'assurer qu'ils sont correctement branchés.

Ensuite refermer le boîtier en reclipant le cache.





Prendre la nouvelle garniture et la placer correctement sur le tube avant et rescratcher (attention à bien faire passer le tissu au-dessus des vis).



Ensuite reposer l'assise. Les trous de l'assise doivent retomber sur les vis de la traverse.



Remettre en position accueil.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX