

PROCEDURE

CHANGEMENT GARNITURE

ASSISE, BUSTE ET JAMBE





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Garniture relève buste	3
3. Garniture assise	7
4. Garniture relève jambe	9
5. Vérification.....	11

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement des garniture, il vous faut :

- Tournevis plat
- Visseuse avec embouts
- Jeu de clé Allen



Temps de l'intervention : 5 Min / Garniture

2. Garniture relève buste

Pour commencer, écarter les accoudoirs afin de faciliter l'enlèvement de la garniture.



Si vous possédez une barre de poussée ou support rouleau, commencer à dévisser les 4 vis de support.

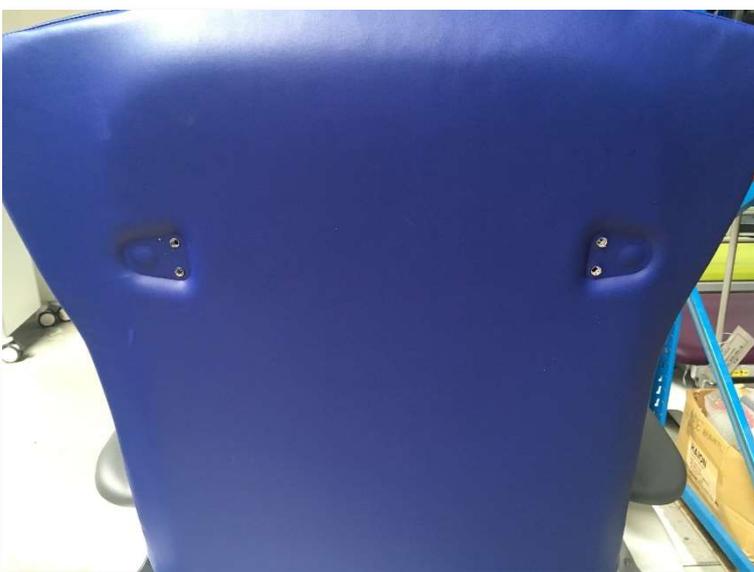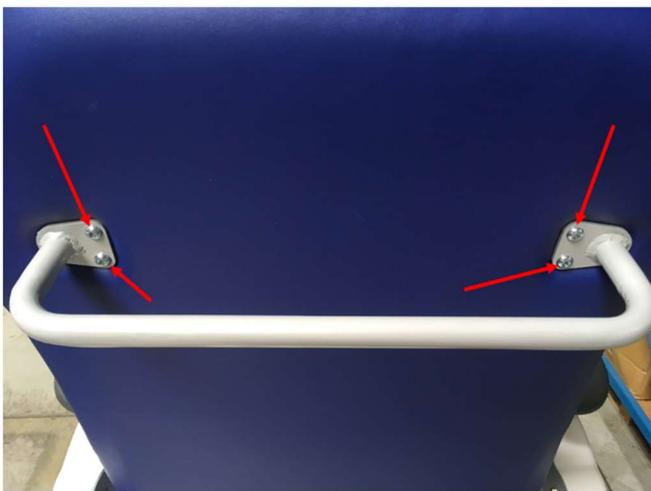

Ensuite déscratcher la garniture par le bas.






Il ne reste plus qu'à la tirer par le haut pour la sortir de son armature.



Prendre la nouvelle garniture et l'insérer dans l'armature métallique. S'assurer qu'elle coulisse entre les 2 revêtements noirs.



L'insérer jusqu'en bas et remettre les scratchs. Dans le cas où ils sont difficiles d'accès remonter l'assise et passer par devant pour bien scratcher en partie basse.

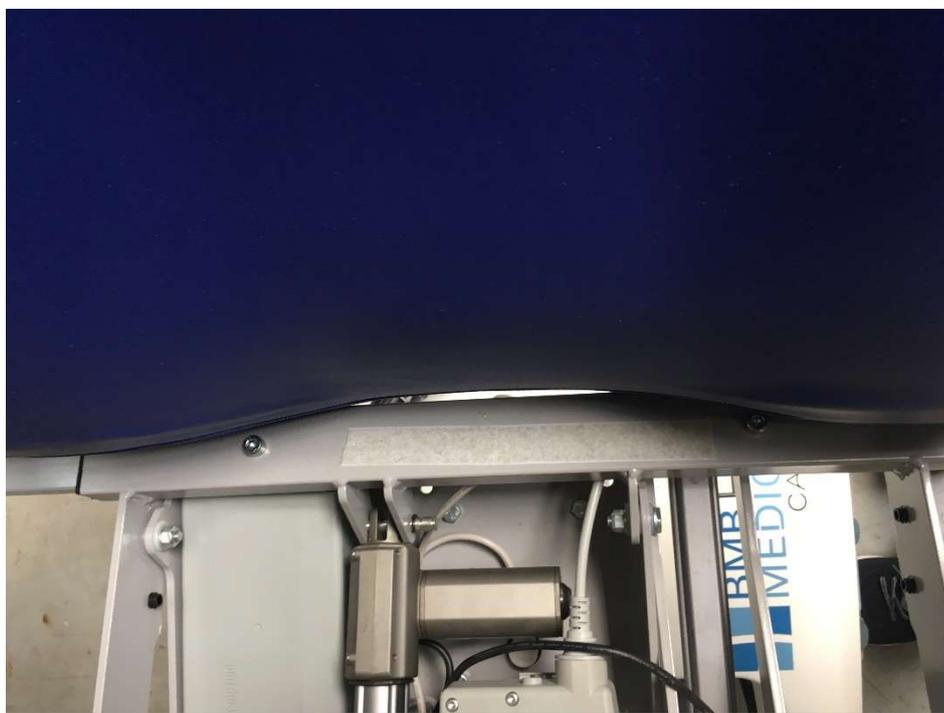

Une fois la garniture en position, il faut refixer la barre de poussée. Repérer au toucher l'emplacement des écrous sur l'armature et utiliser un tournevis pour percer le revêtement.

Puis placer la barre de poussée de façon à être centré sur les trous. Pour commencer à visser, prendre une clé Allen (nous déconseillons d'utiliser la visseuse au risque de rater le taraudage de l'écrou). Lorsque que les vis sont pré vissées, vous pouvez utiliser la visseuse pour le serrage.

3. Garniture assise

Pour faciliter le démontage de l'assise, mettre le produit en position relax.



Ensuite glisser votre main entre l'assise et le relève buste et soulever pour accéder sous l'assise.



Ensuite déscratché l'assise du tube avant et vous pourrez la retirer.



Prendre la nouvelle garniture et la placer correctement sur le tube avant et rescratché (attention à bien faire passer le tissu au-dessus des vis).




Ensuite reposer l'assise. Les trous de l'assise doivent retomber sur les vis de la traverse.



4. Garniture relève jambe

Pour changer la garniture de relève jambe, il y a uniquement 6 vis à dévisser.

Prendre une clé Allen et dévisser la fixation du relève jambe. Attention à bien maintenir la garniture.

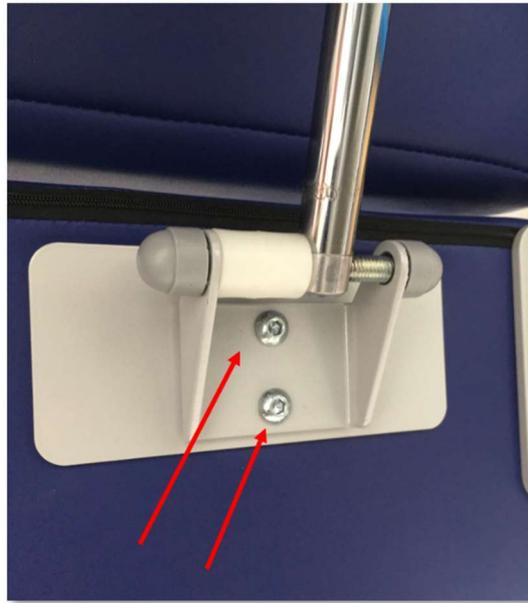

Ensuite retirer les 4 vis de fixation de la garniture relève jambe sur les articulations.



Ensuite sur la nouvelle garniture, il y a déjà les 4 inserts pour la fixation des articulations relève jambe. Par contre les 2 inserts de la fixation du vérin ne sont pas visibles mais présentes. Pour cela, au toucher, repérer l'emplacement des 2 trous puis percer au tournevis.



Ensuite monter la garniture sur le produit en serrant les 4 vis des articulations ainsi que les 2 vis de la fixation de la tige du vérin.

5. Vérification

Vérifier l'absence de jeu de la garniture du relève jambe.

Vérifier que l'assise est correctement en place et scratchée.

Vérifier que la garniture relève buste est correctement scratchée.

Effectuer des mouvements de l'ensemble des vérins pour que chaque garniture se mettent correctement en place.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX