

PROCEDURE CHANGEMENT DE TELECOMMANDE CAREXIA



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	3
3. Remontage.....	6
4. Vérification.....	7

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la télécommande, il vous faut :

- Tournevis plat

Temps de l'intervention : 10 Min


2. Démontage

Dans un premier temps, se mettre dans un lieu de travail adapté. Puis débrancher votre produit de la prise secteur.


Positionnez-vous face à votre CAREXIA. Afin de procéder au changement de la télécommande, vous devez accéder au boîtier de contrôle pour cela retirer la garniture assise en la déscrachant à l'arrière et la basculer vers l'avant. Puis retirer les scratches, pour pouvoir retirer l'assise





Repérer le boîtier de contrôle :

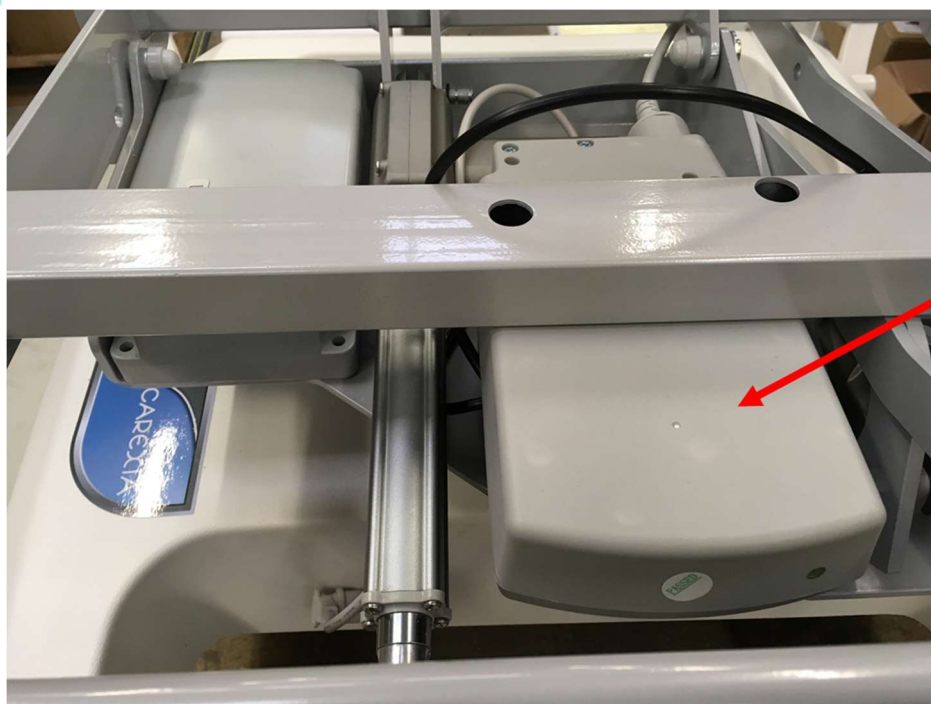

Pour déconnecter la télécommande du boîtier, munissez-vous d'un tournevis. Repérer l'encoche sur le boîtier et appuyer à l'aide du tournevis tout en tirant le capot vers l'avant.

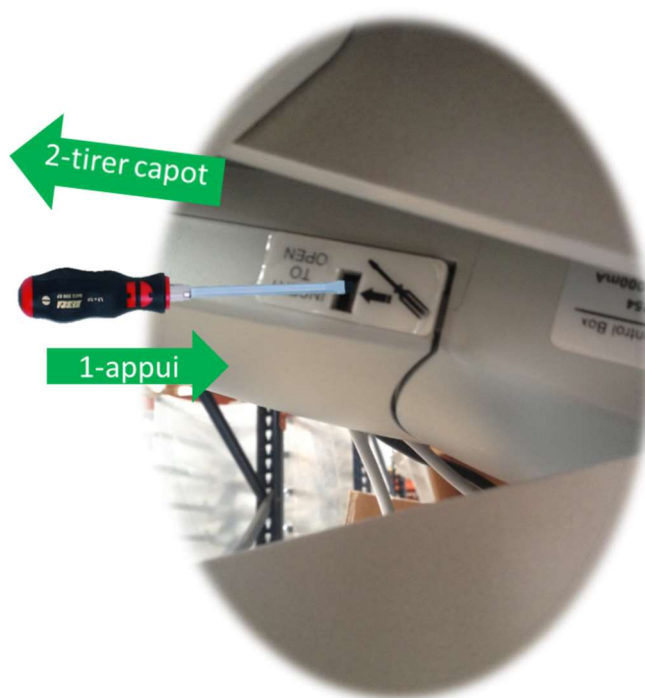

Vous accédez à l'ensemble de la connectique.

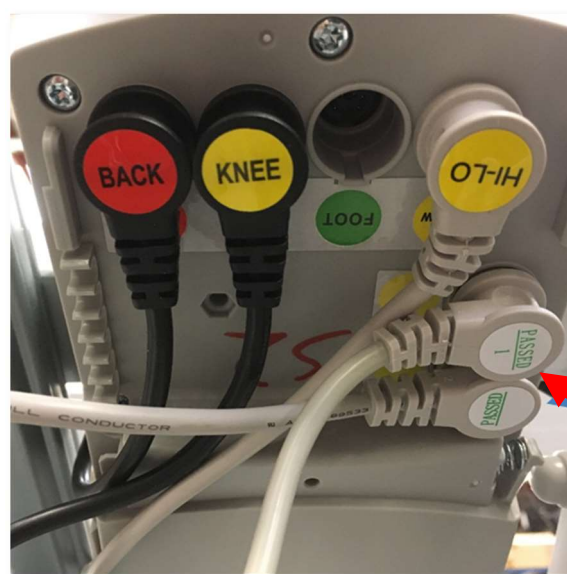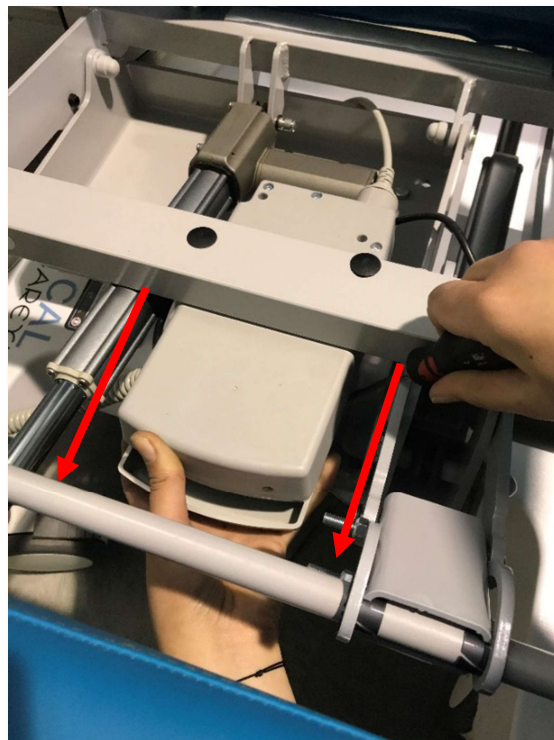

Vue du dessous

Connecteur Télécommande


Le connecteur de la télécommande est placé à droite (voir photo). Déconnecter le et retirer la télécommande défectueuse.

3. Remontage

Prendre la nouvelle télécommande. Passer le câble par-dessous du côté du relève jambe jusqu'au boîtier.

Puis reconnectez-la sur le boîtier sur l'embase jaune « TH ». Bien appuyer pour que l'insertion et le contact soit correct.

Ensuite, clipser correctement le câble de votre télécommande sur la barrette de maintien.

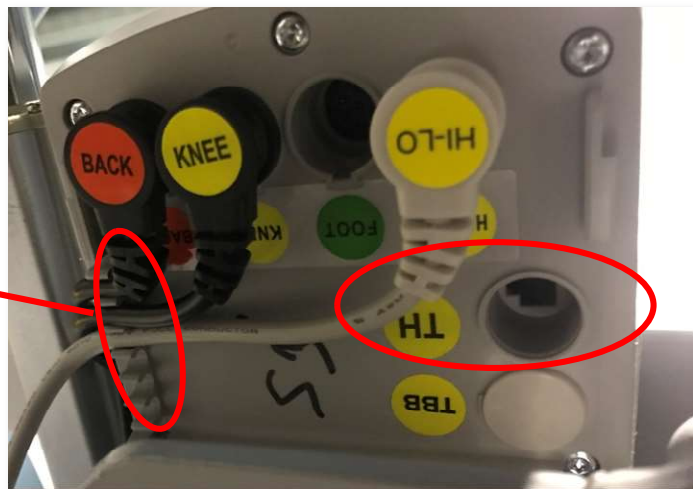


4. Vérification

Brancher votre produit sur le secteur et tester toutes ses positions jusqu'en butée de chaque vérin.

Une fois que toutes les fonctions sont contrôlées remettre le cache du boîtier de commande. Il ne reste qu'à remettre en position la garniture de l'assise.

Commencer par remettre sur le tube avant et remettre le scratch.

Repositionner l'assise correctement pour l'aligner avec le scratch arrière.

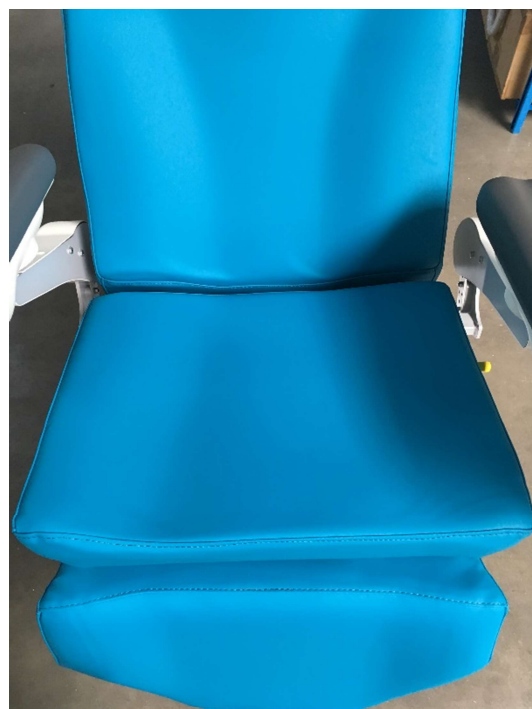

CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux