

PROCEDURE

CHANGEMENT DU VERIN

RELEVE BUSTE CAREXIA





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	4
3. Remontage.....	8
4. Vérification.....	11

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du vérin, il vous faut :

- Clé plate de 17
- Visseuse avec douille de 17 (pas obligatoire)
- Clé plate de 16
- Tournevis plat
- Frein filet
- Maillet
- Pince coupante

Temps de l'intervention : 15-20 Min

Afin de faciliter le confort de travail et l'accès, placer le fauteuil en position urgence dans la position la plus haute.




Lors du démontage, veillez à bien faire attention au positionnement de vos mains. Ne pas les passer dans le mécanisme.



2. Démontage


Pour commencer, prendre un tournevis et faire pression dans l'encoche sur le côté pour déverrouiller le cache du boîtier de commande.

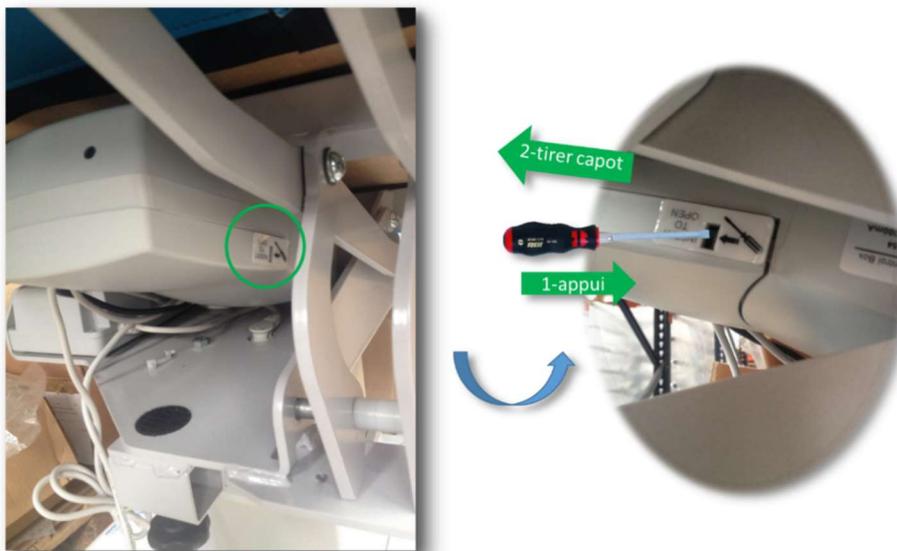

Le vérin de relèvement buste assise est situé sous le fauteuil à droite face au fauteuil (gauche en tant que patient). Pour éviter tous risques éventuels, nous vous conseillons de placer un support sous le buste pour le soulager.




Placer vous côté relève buste. Retirer les 2 clips de l'axe.

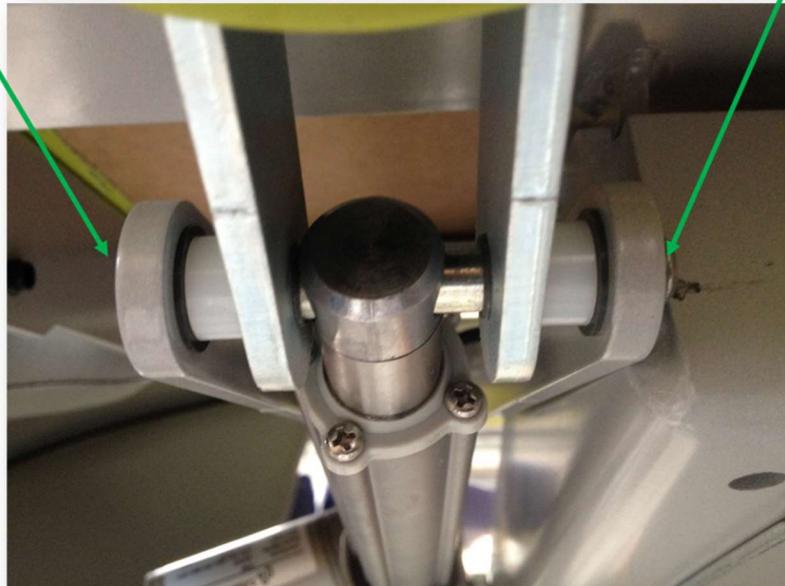

A l'aide d'un maillet et d'un tournevis décaler l'axe de diamètre 10 mm suffisamment afin de pouvoir retirer le vérin.


Attention à ne pas le sortir entièrement pour que le relève buste reste en position.

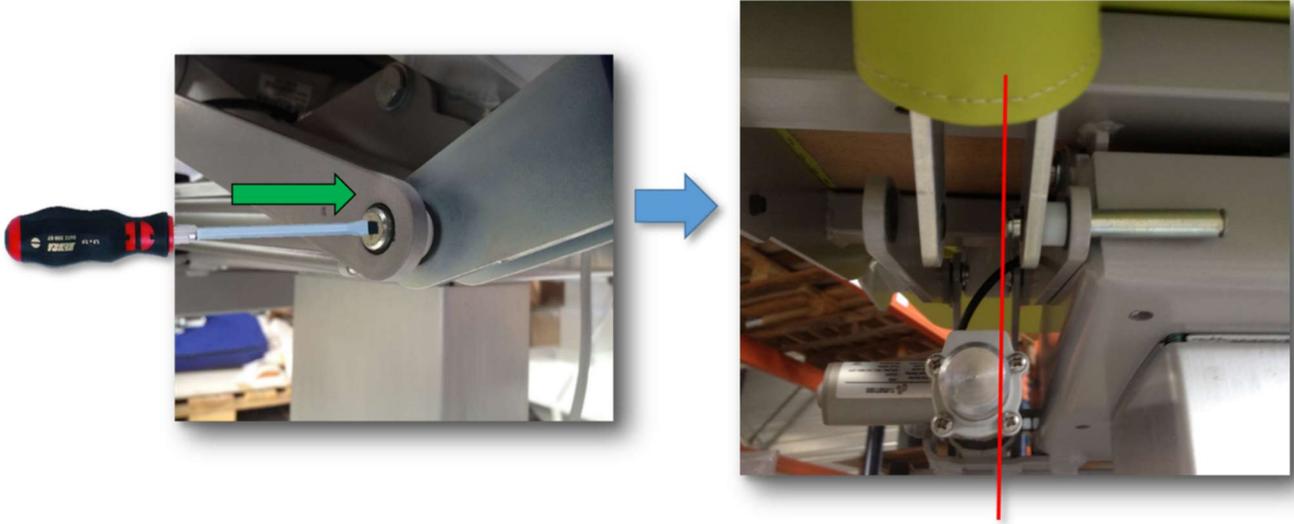

Veillez à bien récupérer l'entretoise blanche pour la réinstaller au remontage.

Ensuite placer vous côté pied du fauteuil.

Commencer par retirer les bouchons gris de chaque côté.

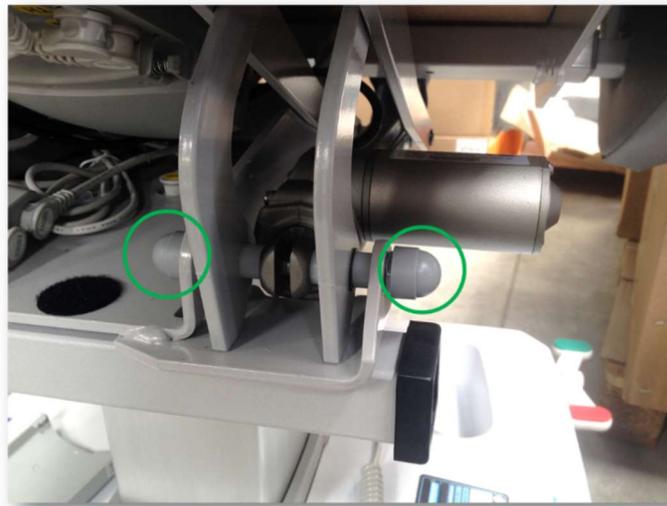

Prendre une clé de 17 et une autre de 17(ou 16 en fonction de la vis)

Commencer par retirer l'écrou.

Ensuite pour retirer la vis, vous devez utiliser la clé de 17 pour maintenir le contre-écrou et dévisser avec la visseuse (ou clé)




Inutile de retirer la vis, il suffit de s'arrêter à la dernière entretoise.

Récupérer les 2 entretoises.

Ensuite, il faut débrancher le vérin du boîtier de commande. Pour cela déconnecter le câble noir avec pastille rouge « BACK ».

MAINTENIR LE BOITIER AVEC L'AUTRE MAIN

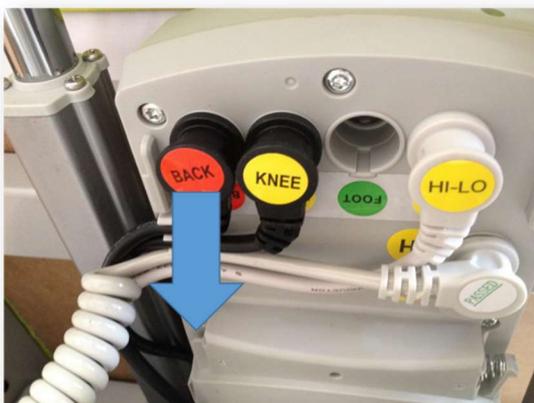

Vous pouvez désormais retirer le vérin.

Vous devez avoir de côté après le démontage :

- 2 clips noirs
- 2 entretoises blanches d'une épaisseur de 7.5 mm
- 1 entretoise épaisseur 10 mm
- 2 bouchons gris de diamètres différents
- 1 écrou

3. Remontage

Prendre le vérin neuf et commencer par passer le câble sous le fauteuil entre l'assise en bois et le boîtier de commande puis entre le vérin de relève jambe et le boîtier. Maintenir le boîtier d'une main et connectez-vous sur l'entrée « back » en rouge.




Ensuite, il faut commencer par refixer le vérin côté pied.

Pour cela prendre la visseuse et la clé de 17 plate pour bloquer le contre-écrou. Visser jusqu'à ce que la vis sorte de la tige du vérin.

Prendre l'entretoise 10 mm, relever la patte et placer l'entretoise en sortie de la tige du vérin puis rabattre la patte pour la maintenir. Placer la seconde entretoise de 7.5 mm entre la patte et le support inférieur. Et prendre un axe (tournevis) pour le placer à l'intérieur des entretoises pour les maintenir en position.

Prendre l'entretoise 10 mm, relever la patte et placer l'entretoise en sortie de la tige du vérin puis rabattre la patte pour la maintenir. Placer la seconde entretoise de 7.5 mm entre la patte et le support inférieur. Et prendre un axe (tournevis) pour le placer à l'intérieur des entretoises pour les maintenir en position.

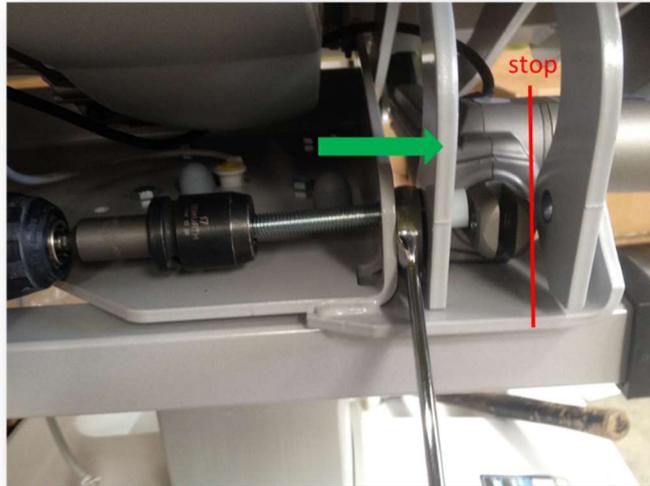

Prendre l'entretoise 10 mm, relever la patte et placer l'entretoise en sortie de la tige du vérin puis rabattre la patte pour la maintenir. Placer la seconde entretoise de 7.5 mm entre la patte et le support inférieur. Et prendre un axe (tournevis) pour le placer à l'intérieur des entretoises pour les maintenir en position.



Relever la patte et placer entretoise 10 mm




Rabattre la patte pour bloquer l'entretoise



Placer la 2nde entretoise 7,5mm et rentrer un axe pour les garder en position

Puis visser, tout en maintenant le contre écrou avec la clé de 17 jusqu'à ce que la tête de vis soit en contact avec la tôle. Ensuite prendre une clé de 17 (voir 16) pour maintenir la tête de vis et serrer le contre-écrou à l'aide de l'autre clé.

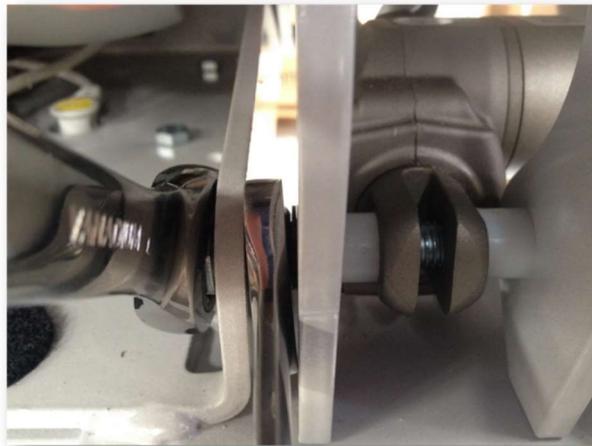

Serrage du contre écrou


Sur le filet de la vis, déposer du frein filet fort avant de remettre l'écrou. Serrer de façon à ce que les entretoises puissent tourner légèrement.




Pour finir, remettre les bouchons sur la tête de vis et l'écrou (attention au diamètre).

Placez-vous côté buste désormais.


Placer votre vérin dans l'axe afin de pouvoir y repasser l'axe. Prendre un maillet pour pousser l'axe jusqu'à ce qu'il traverse la tige du vérin et la patte (voir ci-dessous). Ne pas aller plus loin car il faut placer l'entretoise de 7.5 mm.

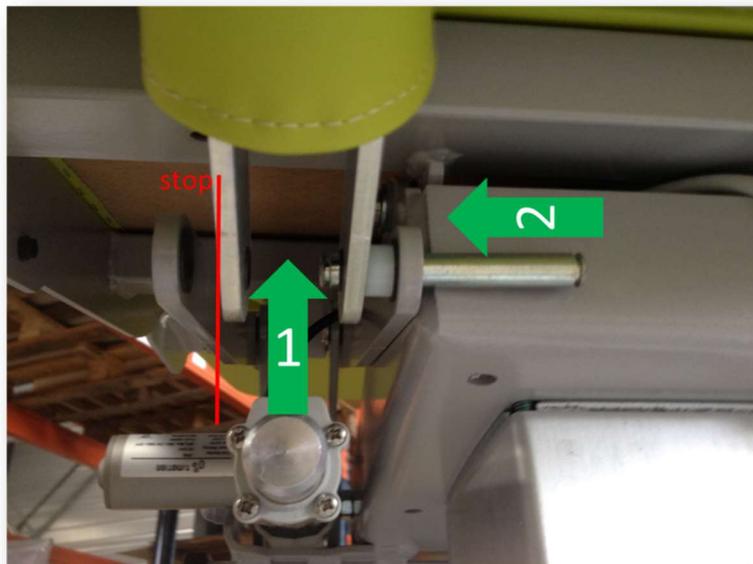

Après avoir positionné l'entretoise, à l'aide du maillet, pousser l'axe.

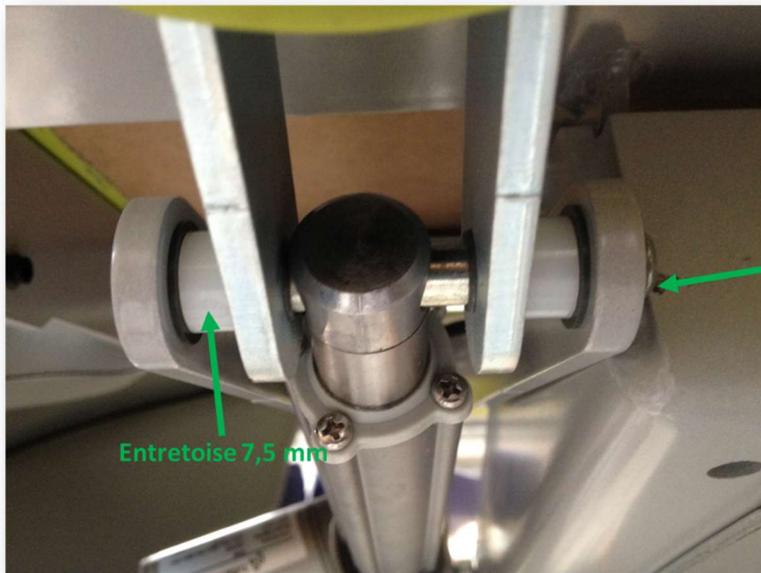

Pour finir, commencer par remettre le clip à l'intérieur et ensuite pour remettre le clip extérieur maintenir à l'aide de la main la longue patte extérieure (légère pression pour insérer le clip).

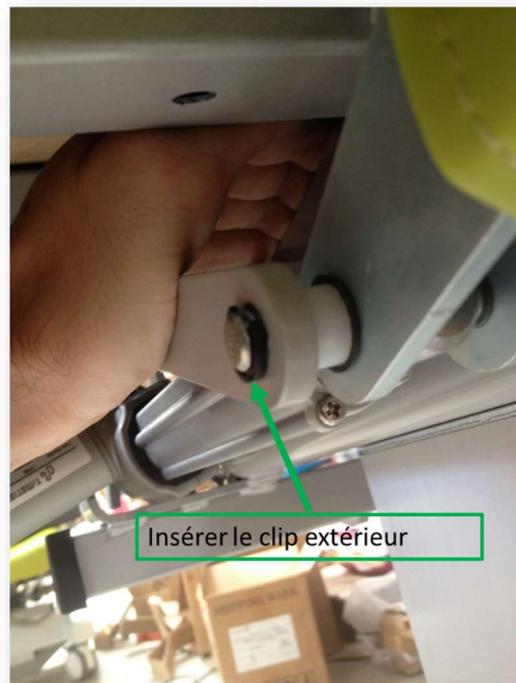

Pour finir remettre le capot du boîtier de commande en le glissant

4. Vérification

Tester le fauteuil dans toutes ses positions jusqu'en butée de chaque vérin .

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX