

PROCEDURE

CHANGEMENT DU VERIN

RELEVE JAMBE CAREXIA





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	4
3. Remontage	7
4. Vérification	9

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la batterie, il vous faut :

- Tournevis plat

Temps de l'intervention : 10-15 Min

Afin de faciliter le confort de travail et l'accès, placer le fauteuil en position urgence dans la position la plus haute.



Lors du démontage, veillez à bien faire attention au positionnement de vos mains. Ne pas les passer dans le mécanisme.




**ATTENTION
A VOS MAINS
RISQUE
D'ECRASEMENT**

2. Démontage

Pour commencer, débrancher votre produit du secteur.

Au niveau du boîtier de contrôle, prendre un tournevis plat et faire pression dans l'encoche sur le côté pour déverrouiller le cache du boîtier de commande.

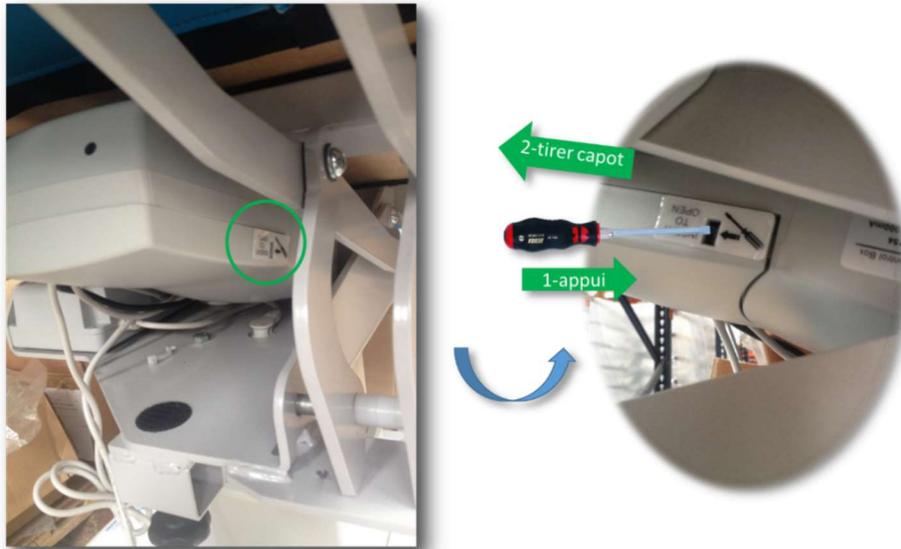

Débrancher le câble du vérin relève jambe (KNEE) du boîtier.




Le vérin de relève jambe est situé sous le fauteuil, pour y accéder vous devez retirer la garniture assise.



1- Soulever la garniture assise

2- Retirer les scratches.

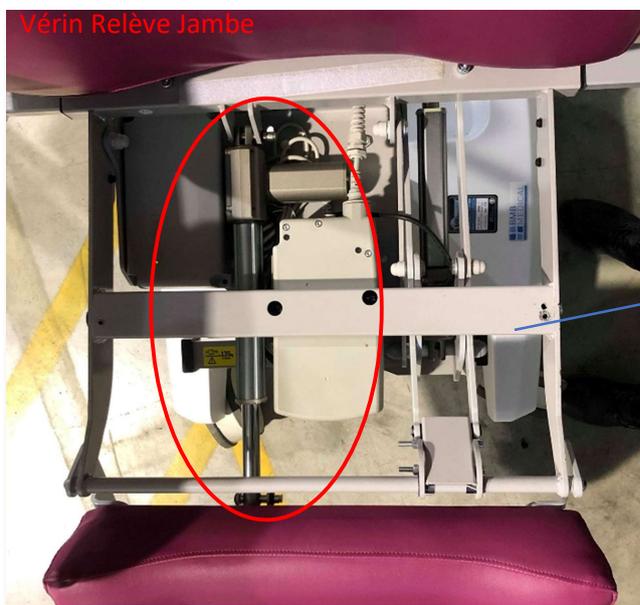


3- Retirer complètement la garniture,
puis mettez la de côté.

Repérer les deux axes qui permettent le maintien du relève jambe sur le fauteuil.




Retirer ces axes afin de pouvoir enlever le vérin, pour cela à l'aide d'un tournevis plat retirer les clips noirs, puis faire glisser les axes comme indiqué sur les photos. (Pas besoin de les retirer complètement)

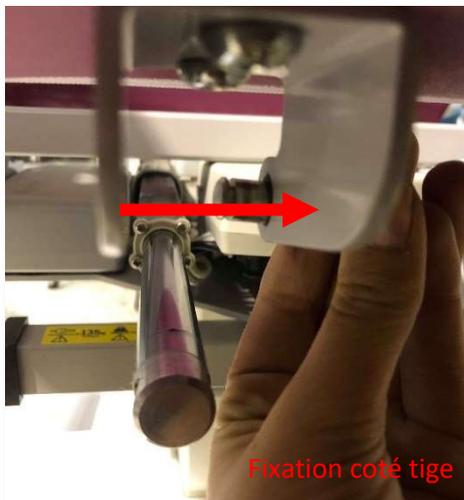

Une fois les 2 axes décalé, vous pouvez retirer le vérin défectueux.

3. Remontage


Munissez-vous de votre nouveau vérin, passez-le sous la structure assise comme sur la photo, tige en première.

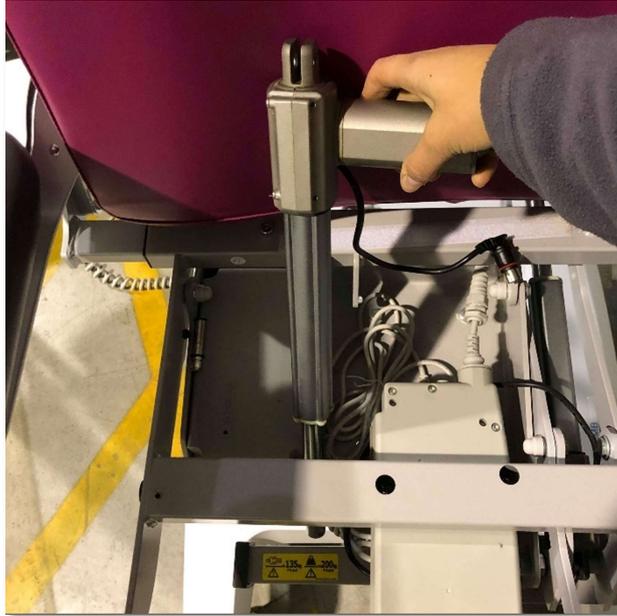


Positionner le vérin face aux pattes de fixation, en faisant attention au câble de branchement.



Une fois que tout est en place, procédez à la fixation du vérin. Placer les axes puis repositionner les clips.

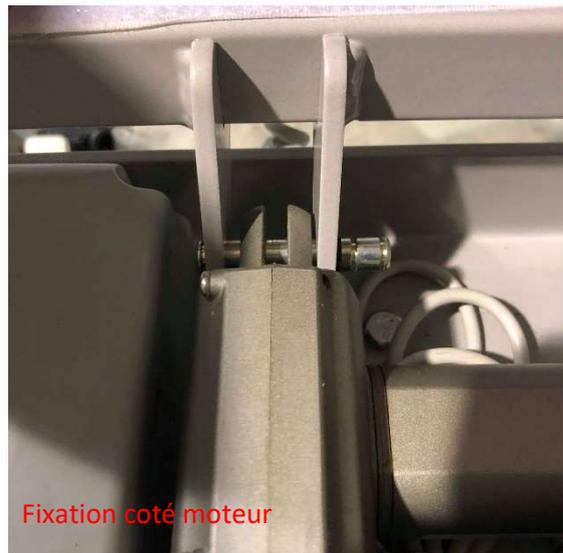

Lorsque vous procédez à la fixation de la tige, faire attention aux 2 entretoises qui se trouvent sur chaque extrémité de la patte, si celles-ci se déclipsent remettez les en place, sinon cela risquera de vous gêner lors de la mise en place des clips.

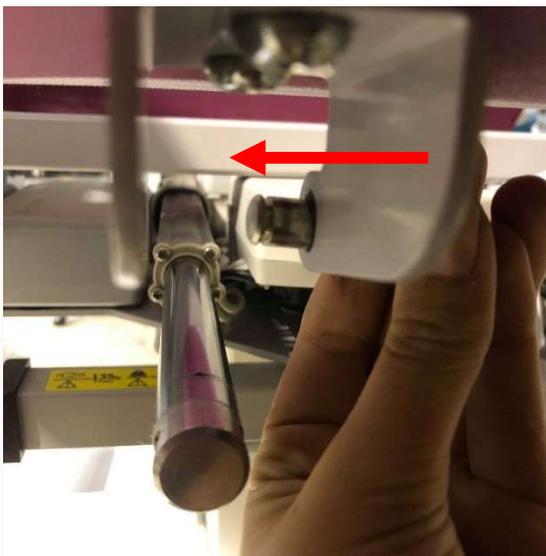

Une fois le vérin fixé, procédez à son branchement, bloqué le câble du vérin dans le passe câble, voir photo ci-dessous. Puis branché le vérin à son emplacement (KNEE). Refermer le boitier.



4. Vérification

Brancher votre fauteuil sur secteur puis tester le fauteuil dans toutes ses positions jusqu'en butée de chaque vérin.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX