

PROCEDURE CHANGEMENT DE BARRE DE POUSSEE



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	3
3. Remontage	4
4. Vérification	6
5. Contact.....	7

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la barre de poussée, il vous faut :

- Clé à pipe de 13
- Frein filet vert

Temps de l'intervention : 5-10 Min

2. Démontage

Munissez-vous d'une clé à pipe de 13, puis desserrer la vis qui maintient la barre de poussée.



Mettre de côté la vis ainsi que la rondelle, puis retirer la barre de poussée défectueuse.



3. Remontage

Prenez votre nouvelle barre de poussée, insérez-la à son emplacement (trou au niveau de l'angle).



Une fois la barre de poussée mise en place, fixez-la. Pour cela munissez-vous de votre vis ainsi que la rondelle et ajoutez le frein filet vert tout autour puis visser l'ensemble avec la clé à pipe de 13.



4. Vérification

Vérifier que votre barre de poussée soit bien fixée, et vérifier son fonctionnement en levant la bague de verrouillage pour pouvoir baisser la poignée.



CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux