

PROCEDURE CHANGEMENT BATTERIE SUR CLAVIA



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	3
3. Remontage	6
4. Vérification	8

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la batterie, il vous faut :

- Tournevis plat
- Clé Allen de 4
- Clé de 8



Temps de l'intervention : 15 Min

2. Démontage

Débrancher le produit de la prise secteur.

Regarder sous le fauteuil ou brancard au centre, et repérer le boîtier d'alimentation (boîtier connexion des vérins) comme ci-dessous :



Puis débrancher le câble de la batterie. Pour cela, il faut déclipser l'anti-arrachement, munissez-vous d'un petit tournevis pour l'enlever. Lorsque celui-ci est retiré vous pouvez débrancher le câble batterie.





Il vous reste à dévisser la batterie, pour cela vous devez enlever les deux vis, à l'aide d'une clé de 8 et d'une clé Allen, en veillant à maintenir la batterie dans vos mains.



3. Remontage

Munissez-vous de votre nouvelle batterie et placez-la à son emplacement. La sortie du câble de la batterie doit se trouver tête en bas, comme ci-dessous.



Revisser les 2 vis de fixation.



Brancher le câble de la batterie sur le boîtier.



Attention : Enfoncer convenablement le câble puis placer l'anti-arrachement



L'anti-arrachement doit être visible (il empêche le câble de sortir)

Puis rebrancher le câble alimentation sur votre secteur, en veillant à ce que la led verte du boîtier est bien allumée.

4. Vérification

Débrancher le produit de la prise secteur, puis manipuler la télécommande. Le produit se déplace, vous avez correctement installé la batterie.

Dans le cas où le produit n'effectue aucun mouvement et ne bipe pas, vérifier le branchement.

Dans le cas où le produit effectue un Bip long, laisser le produit sur le secteur pour recharger la batterie.

CONTACT



Mail
sav@bmb-medical.com



Téléphone
04 74 08 71 73



Site internet
<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client
<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale
100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX