

PROCEDURE CHANGEMENT GARNITURE



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage du matelas fixe	3
3. Démontage et remontage des structure sur le matelas	10
3.1. Plaque de relève buste.....	10
3.2. Barre de poussée.....	11
3.3. Articulations relève buste	11
3.4. Armature de relève jambe	12
3.5. Repose pied (si CLAVIA FCD)	13
4. Vérification	17

1. Préparation outillage et pièces




Pour procéder au changement du doigt d'indexage, il vous faut :

- Cutter et tournevis fin
- Clé plate de 13, 16, 17
- Jeu de clé Allen
- Frein filet fort
- Visseuse si besoin + embouts
- Un matelas neuf

Temps de l'intervention : 60 Min

2. Démontage du matelas fixe

Pour commencer, mettre le fauteuil en position assise comme ci-dessous puis débrancher la prise secteur.

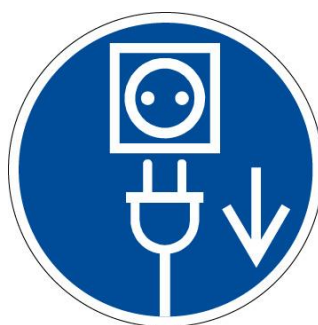

Si vous possédez un repose pied :

Il faut commencer à débrancher le câble du vérin de repose pied. Pour cela, identifier le boîtier de contrôle sous l'assise entre les 2 colonnes.



Retirer la barrette « anti-arrachement » à l'aide de tournevis en déclinçant au niveau de chaque connecteur (attention de ne pas le casser).



Débrancher le câble (position 5), et suivre ce câble jusqu'au repose pied et couper les rilsans, pour rendre le câble indépendant. Ramener le connecteur vers le vérin de repose pied.



Dans le cas, ou vous n'avez pas de repose pied, vous démarrez à cette étape :


Il faut retirer les accoudoirs. Pour cela, placer vous derrière la relève buste et prendre un tournevis fin ou cutter et retirer les 4 bouchons.



A l'aide d'une clé de 13, retirer les écrous et rondelles.



Vous pouvez désormais, sortir les accoudoirs en les maintenant par l'articulation en acier.

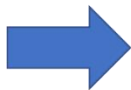

Placer les sur un support adapté et propre.

Dans le cas, ou vous possédez, une protection sur votre relève jambe, déclipser la.




Se positionner de nouveau derrière le relève buste, au niveau de la plaque de support vérin, retirer le clip de l'axe d'un côté uniquement. Enlever l'axe, tout en maintenant le vérin. Pour faciliter le retrait de l'axe, faire des mouvements avec le relève buste.



Basculer le vérin pour le poser sur le capot.

Désormais se placer sous le relève jambe, et réaliser la même procédure :

- Retirer le clip
- Sortir l'axe en maintenant le vérin
- Déposer le vérin sur le capot.

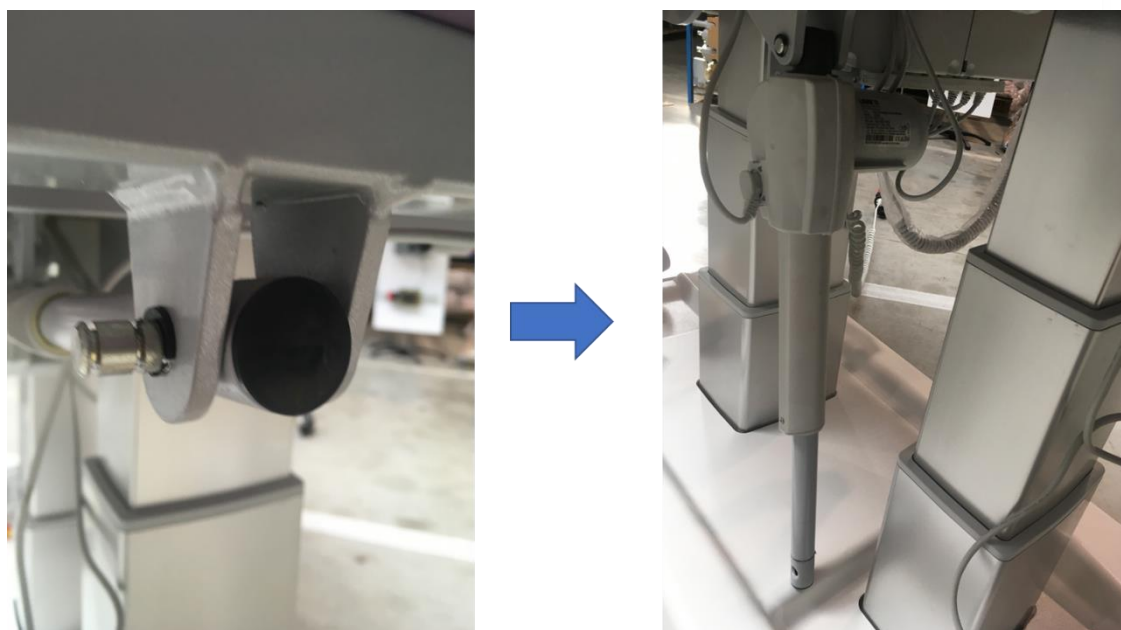


Il ne reste plus qu'à dévisser les 2 vis de fixation des pattes de relèvement buste et les 2 vis de fixation de l'armature de relèvement jambe.



Le matelas est désormais désolidarisé de la structure.

Positionner une table à côté et demander l'aide à une autre personne pour retourner le matelas sur la table de façon à avoir les structures visible (vers le haut).

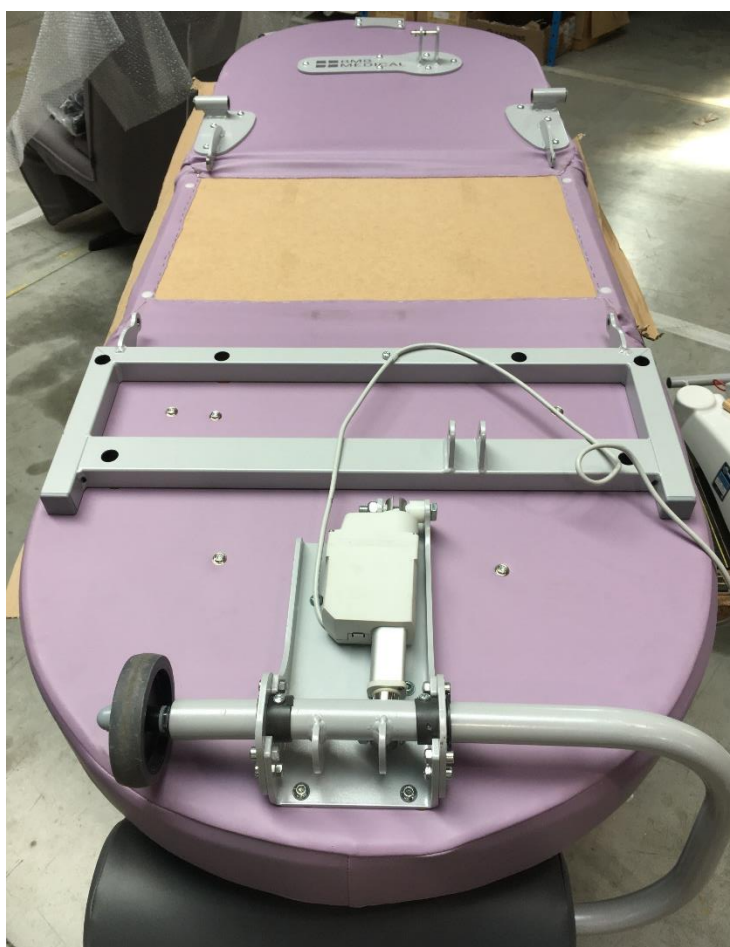


3. Démontage et remontage des structure sur le matelas

3.1. Plaque de relève buste

Prendre le matelas neuf et le positionner à côté de l'autre matelas. Le but est de démonter chaque structure sur l'ancien matelas pour réinstaller sur le nouveau matelas.

Commencer par démonter à l'aide d'une visseuse si besoin, la tôle de fixation du vérin relève buste.

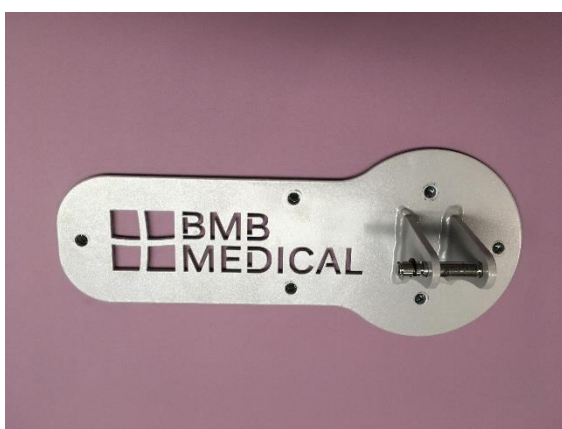

Puis repositionner la, sur le nouveau matelas, et positionner et visser les vis une à une à la main. **Nous déconseillons de visser directement avec la visseuse pour ne pas endommager les inserts en cas de mauvais positionnement.**


Lorsque toutes les vis sont positionnées, vous pouvez visser avec la visseuse mais avec un couple de 18 Nm max.



Si vous avez une barre de poussée, dévisser la et positionner la sur le matelas neuf. Toujours positionner les vis en premier, puis serrer avec la visseuse en respectant le couple.

3.2. Barre de poussée

Si vous avez une barre de poussée, dévisser la et positionner la sur le matelas neuf. Toujours positionner les vis en premier, puis serrer avec la visseuse en respectant le couple.

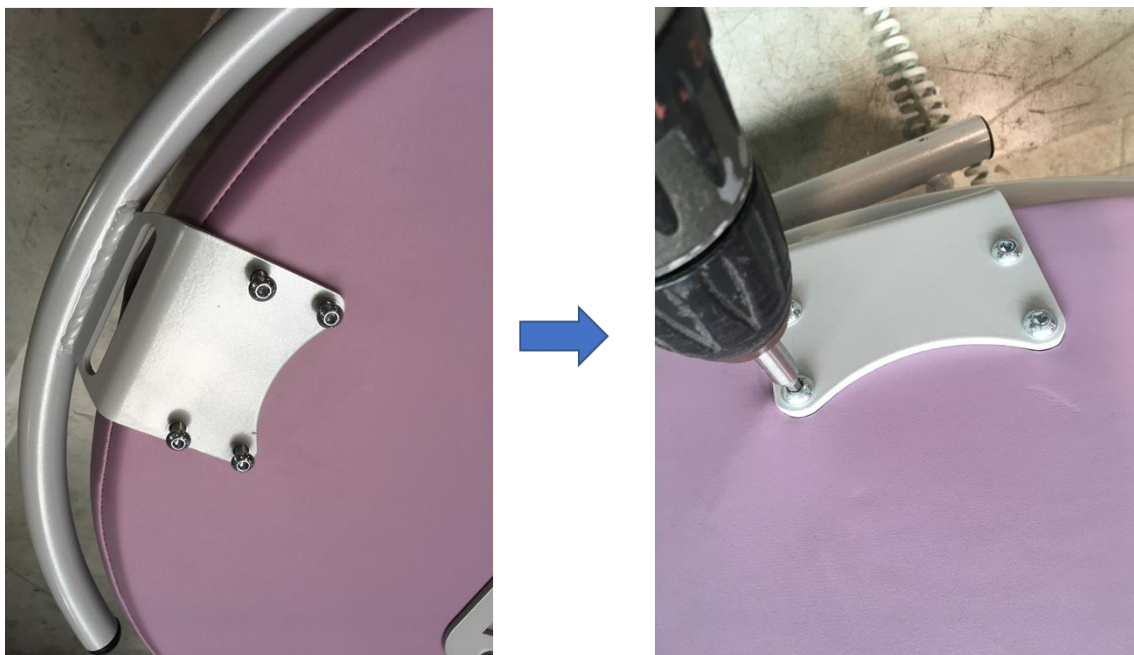

3.3. Articulations relève buste

Démonter les articulations une à une, et les réinstaller sur le nouveau matelas. Comme précédemment, positionner les vis et visser ensuite à la visseuse en respectant le couple.



3.4. Armature de relève jambe

Si vous ne l'avez pas fait, retirer la vis de fixation du câble de repose pieds.



Dévisser les 6 vis de fixation de la structure de relève jambe puis la revisser sur le nouveau matelas.



Dévisser les vis à bois qui permettent de fixer les pressions (dans le cas où vous aviez une protection relève jambe).



3.5. Repose pied (si CLAVIA FCD)

Pour pouvoir accéder aux vis de fixation du repose pied, vous devez démonter en partie la fixation du vérin. Pour cela prendre une clé de 16 et 17.



Dévisser les 6 qui maintiennent la plaque repose pied et repositionner le sur le nouveau matelas. Et Comme pour les autres structures, positionner les vis avant de visser avec la visseuse.



Ensuite replacer les pressions dans le cas où vous possédez une protection relève jambe.

Remettre la vis autoforeuse dans la structure pour maintenir le fil du repose pied.




Votre matelas est prêt, il ne reste plus qu'à le replacer sur le produit, pour cela demander l'aide une assistance pour le retourner et le positionner sur la structure.



Remettre les 2 vis de fixation des articulations de relève buste en déposant du frein filet fort sur la vis au préalable. Ne pas oublier de remettre les polyamides de chaque côté de la patte comme ci-dessous.

Attention : la vis doit être positionner dans l'axe de l'écrou. Ne pas forcer au risque d'endommager le taraudage de l'écrou soudé.

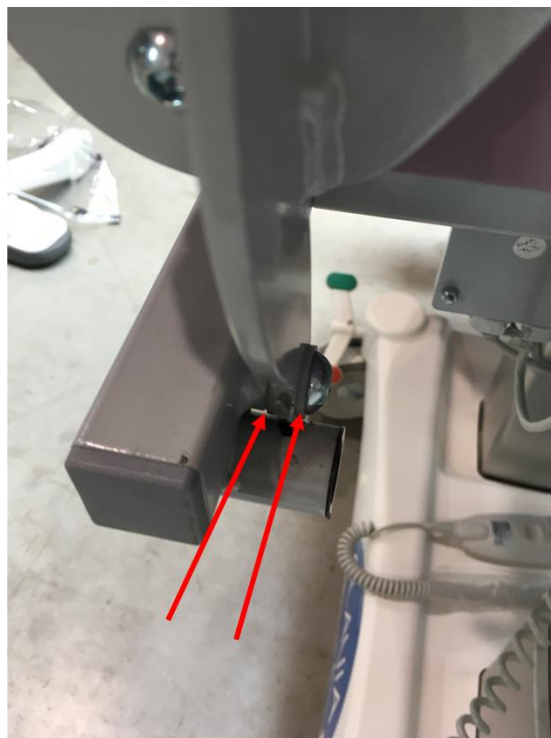

Faire la même chose au niveau de la fixation de la structure du relève jambe en ajoutant les rondelles polyamides.



Remettre les axes de fixations des vérins de relèvement buste et relèvement jambe.



Remonter les accoudoirs. Dans le cas où les axes ne coïncident pas avec les trous du couchage, pour faciliter le remontage, rebrancher le produit sur secteur et abaisser le relèvement buste.



Remettre la rondelle acier, l'écrou puis le bouchon de chaque côté.

Dans le cas du repose pied, repasser le câble jusqu'au boîtier de commande et rebrancher sur l'entrée
5. Remettre la barrette anti-arrachement.

Pour maintenir l'ensemble des câbles remettre un rilsan.

Remettre la protection de relève jambe en position.

Votre produit est prêt.

4. Vérification

S'assurer que le produit est branché au secteur et effectuer des courses complètes de chaque vérin pour vérifier les mouvement du matelas.

CONTACT



Mail
sav@bmb-medical.com



Téléphone
04 74 08 71 73



Site internet
<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client
<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale
100 avenue du Formans, 01604 TREVoux