

PROCEDURE

CHANGEMENT DU VERIN RELEVÉ BUSTE ET JAMBE CLAVIA



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	3
2.1. Vérin de relève buste	4
2.2. Vérin de relève jambe	9
3. Remontage	11
3.1. Vérin de relève buste	11
3.2. Vérin de relève jambe	13
4. Vérification	14

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement des vérins, il vous faut :

- Tournevis plat

Préparer les pièces détachées suivantes :

VECLRB CO (Clavia i-line)

VECLRJ CO (Clavia I-line)




Temps de l'intervention : 10 Min

2. Démontage


Avant de commencer, mettre le fauteuil si possible dans une position assise et haute afin de faciliter la maintenance. Mettre le produit en position frein.

Ensuite s'assurer que le produit est débranché du secteur.

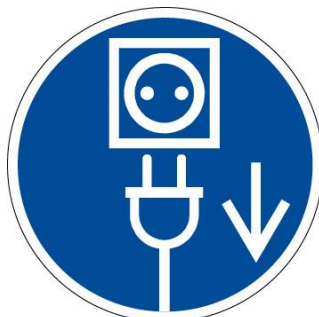


2.1. Vérin de relèvement buste

Repérer le vérin de relèvement buste, placé à l'arrière du produit.

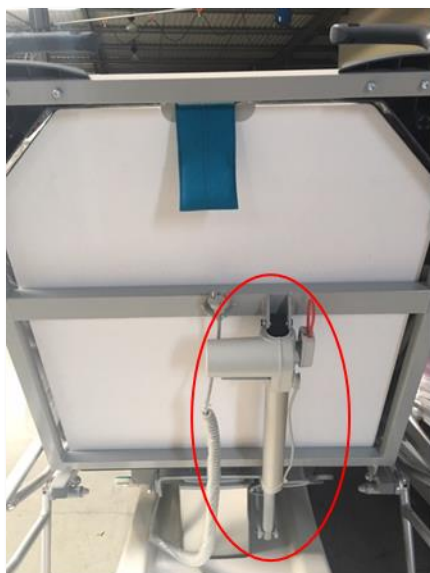


Pour commencer, il faut déconnecter le câble. Pour cela, se munir d'un tournevis plat fin pour déclipser l'anti-arrachement comme ci-dessous. Attention de ne pas le perdre.

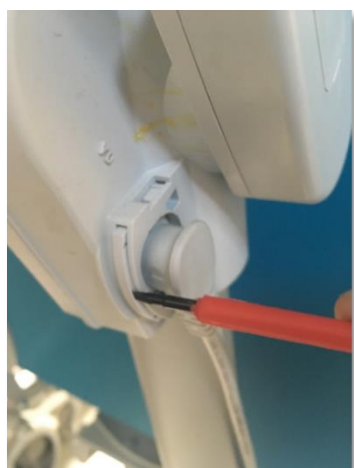

Ensuite il ne reste plus qu'à démonter le vérin.

Prendre le tournevis plat et retirer le clip d'un côté uniquement sur l'axe du haut et sur l'axe du bas.

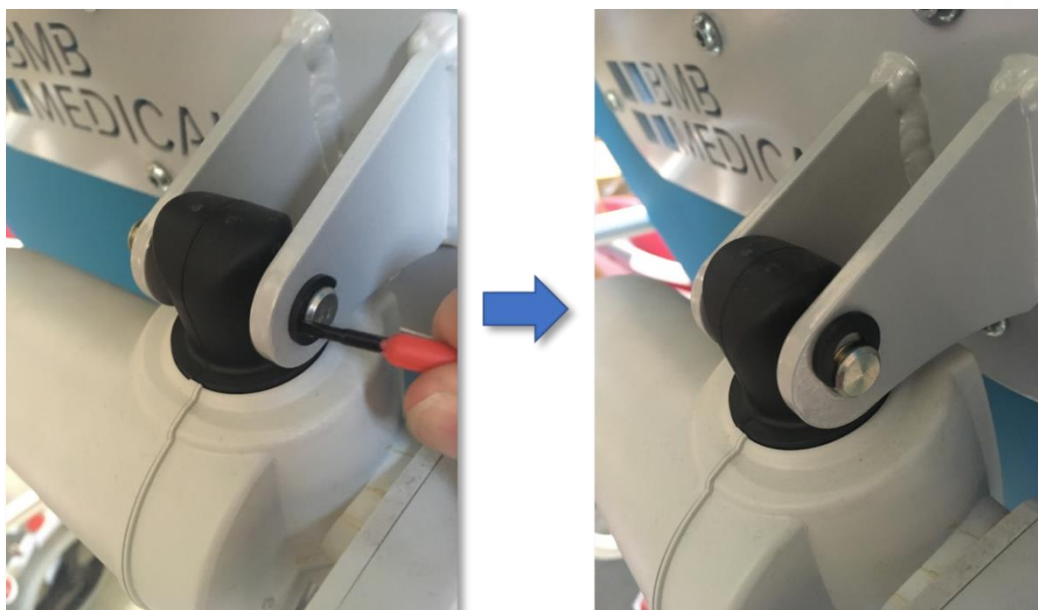

Bien mettre les clips de côté idéalement dans un récipient.

Puis commencer par retirer l'axe du haut tout en maintenant le carter du vérin afin qu'il ne bascule pas et maintenir le relève buste



Déposer le carter du vérin sur le capot.

A l'aide d'une pince coupante, retirer le rilsan qui maintient le câble d'alimentation du relève buste.



Puis retirer l'axe inférieur en maintenant la tige du vérin.




Remarque : Dans le cas où vous possédez une vis et un écrou, dévisser l'ensemble. Il sera important de remplacer cela par le système d'axe et clips pour faciliter le montage.


Dans le cas où vous n'avez pas commandé le câble de déverrouillage d'urgence (CLVE CO DVU), il faut récupérer le câble de déverrouillage d'urgence sur le vérin démonté.

Pour cela, prendre le tournevis plat pour faire coulisser le capot.

Retirer le câble des 2 encoches.

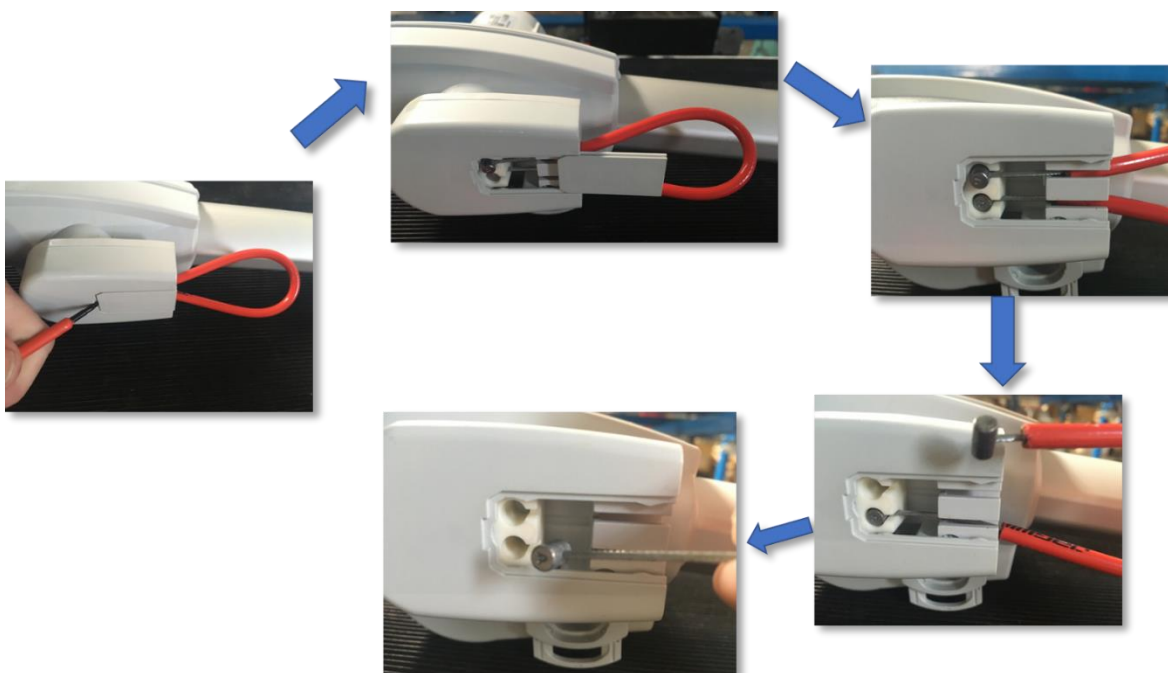

Prendre le vérin neuf et retirer le cache comme précédemment. Pour installer le câble procéder comme ci-dessous :

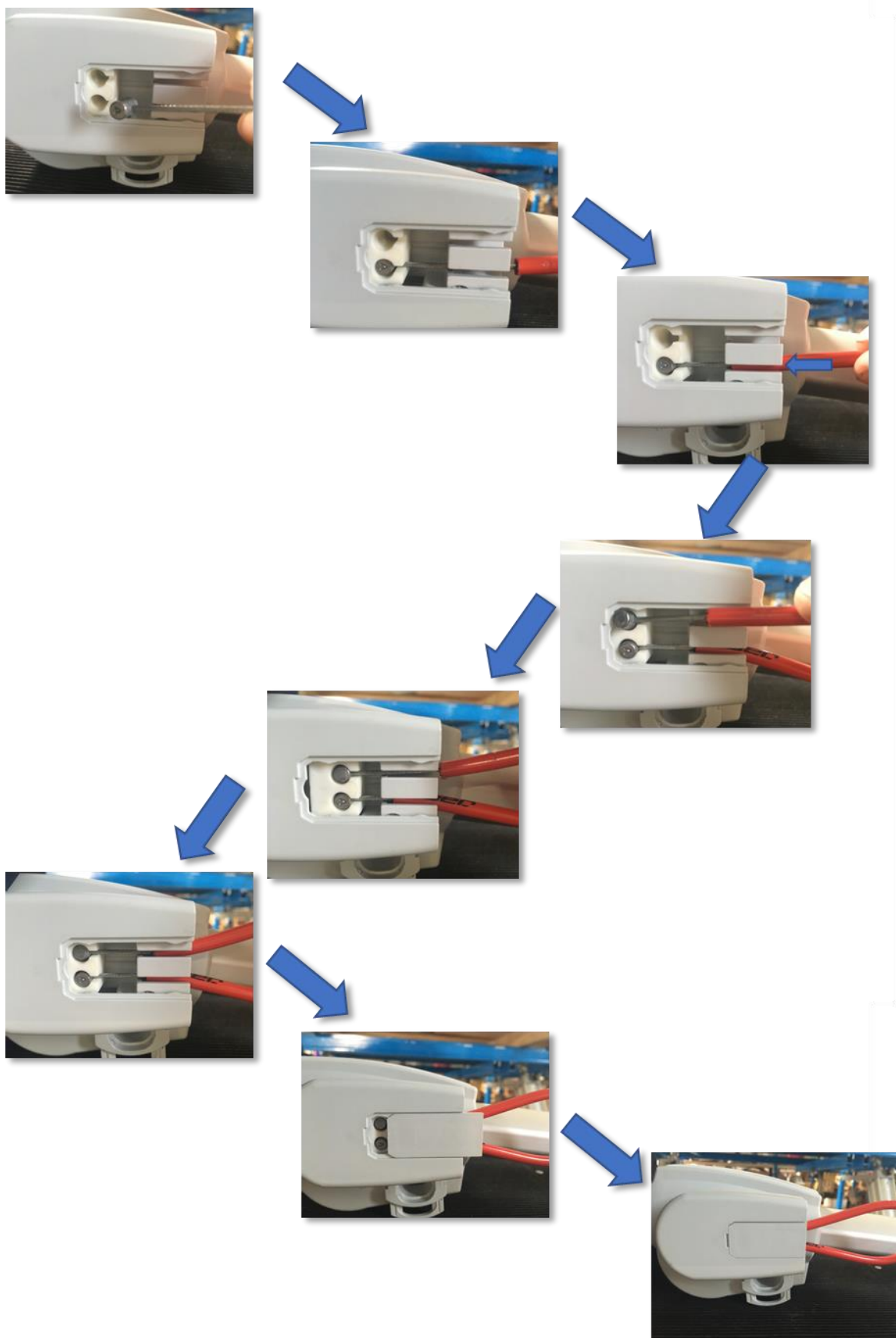


Le vérin de relève buste est prêt.

2.2. Vérin de relève jambe

Repérer le vérin de relève jambe.



Pour commencer, il faut déconnecter le câble. Pour cela, se munir d'un tournevis plat fin pour déclipser l'anti-arrachement comme ci-dessous. Attention de ne pas le perdre.

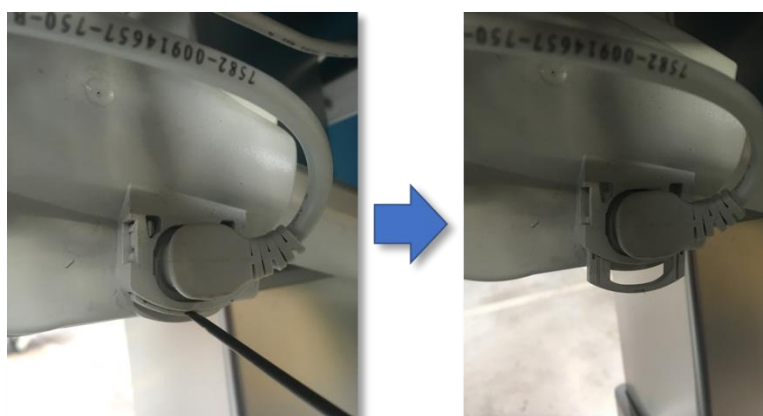

Ensuite il ne reste plus qu'à démonter le vérin.

Prendre un tournevis plat et retirer le clip d'un côté uniquement sur l'axe de la tige et sur l'axe du carter.



Bien mettre les clips de côté idéalement dans un récipient.

Puis commencer par retirer l'axe de la tige tout en maintenant le vérin afin qu'il ne bascule pas.

Déposer la tige du vérin sur le capot. Puis retirer l'axe inférieur en maintenant le carter du vérin.



3. Remontage

3.1. Vérin de relèvement buste

Prendre le vérin neuf, avant de le positionner, assurez-vous que le câble soit bien dans la chappe et ensuite positionner le vérin.




Passer l'axe et remettre le clip.


Attention de bien vérifier le sens du clip. L'encoche doit être vers l'extérieure.



Sur la partie haute, positionner le vérin puis passer l'axe et insérer le clip.

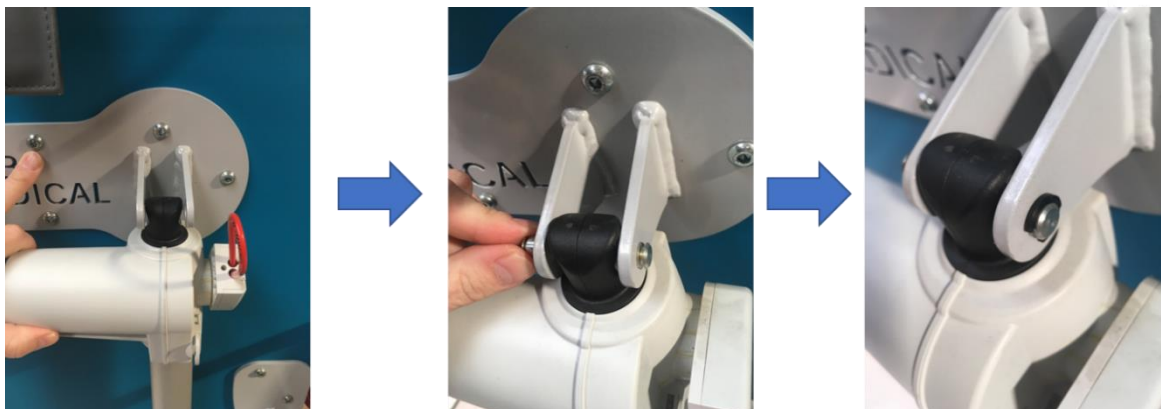

Ensuite, reconnecter le câble au vérin et verrouiller avec l'anti-arrachement.

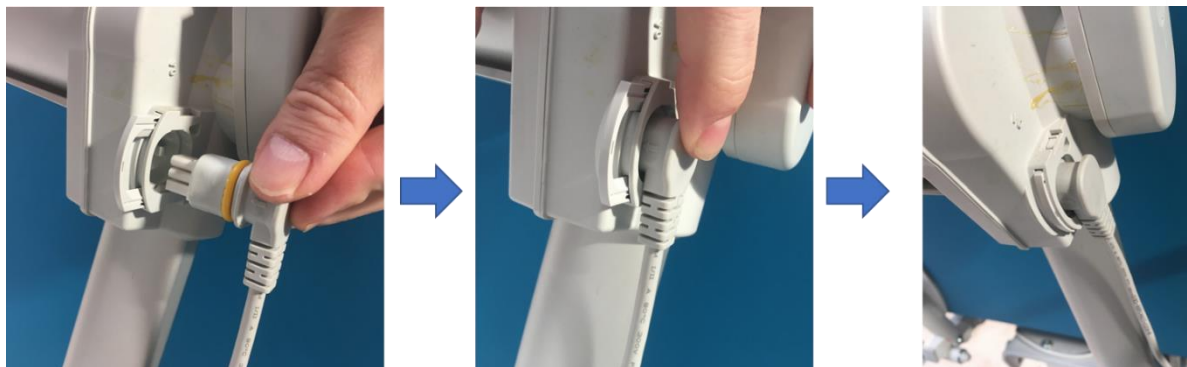

Pour finir, il ne reste plus qu'à fixer le câble sur le vérin à l'aide d'un rilsan comme ci-dessous :




3.2. Vérin de relève jambe

Avant de positionner le vérin de relève jambe, assurez-vous que le câble passe bien entre les 2 parties métalliques puis positionner le carter du vérin de relève jambe dans son emplacement. Attention de bien vérifier le sens du vérin, le connecteur doit être vers l'extérieur du produit.




Puis insérer l'axe et mettre le clip.

Faire de même, pour la fixation de la tige sur l'armature de relève jambe.

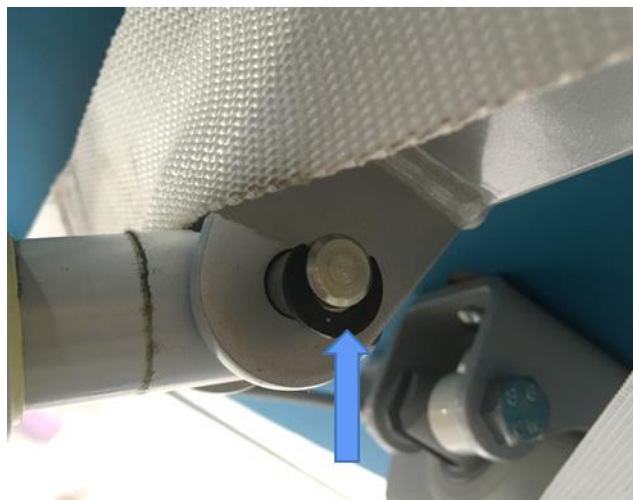

Ensuite, il faut reconnecter le câble sur le vérin de relève jambe. Vérifier que l'anti-arrachement soit bien retiré et insérer le connecteur (attention au détrompeur).

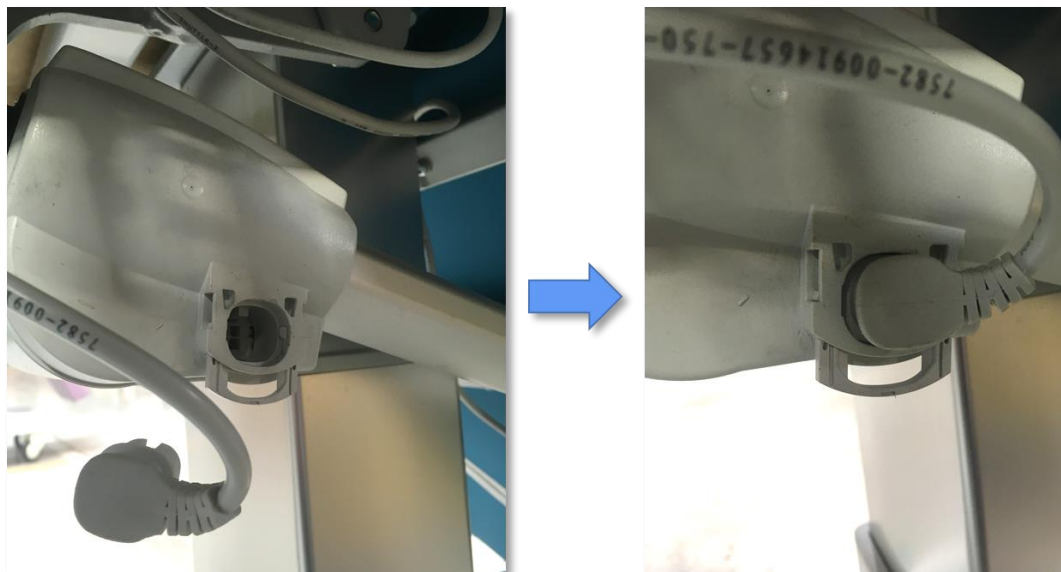

Puis pousser l'anti arrachement pour le verrouiller.

4. Vérification

Pour commencer, rebrancher le produit sur secteur et vérifier que la led verte du boîtier est allumée (ce qui indique que la puissance arrive bien au boîtier).

Ensuite, appuyer sur la montée du relève buste jusqu'en butée haute. Puis le redescendre jusqu'en butée basse afin de vérifier la course complète.

Réaliser la même chose pour le vérin de relève jambe.

Votre produit est correctement paramétré.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux