

PROCEDURE

CHANGEMENT

BOITIER DE COMMANDE



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Remplacement de boîtier.....	3
3. Reset et vérification	10

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du boîtier de commande, il vous faut :

- 1 jeu de clé Allen
- Une clé plate de 10
- Un petit tournevis
- Le boîtier neuf de rechange



Temps de l'intervention : 10 Min

2. Remplacement de boîtier


Regarder sous le fauteuil ou brancard au centre et repérer le boîtier d'alimentation (boîtier connexion des vérins) comme ci-dessous :



Ensuite, débrancher le câble d'alimentation placé à l'arrière du boîtier.



Puis pour débrancher la batterie, munissez-vous d'un petit tournevis pour déclipser l'anti-arrachement. Lorsque celui-ci est enlevé vous pouvez débrancher le câble batterie.

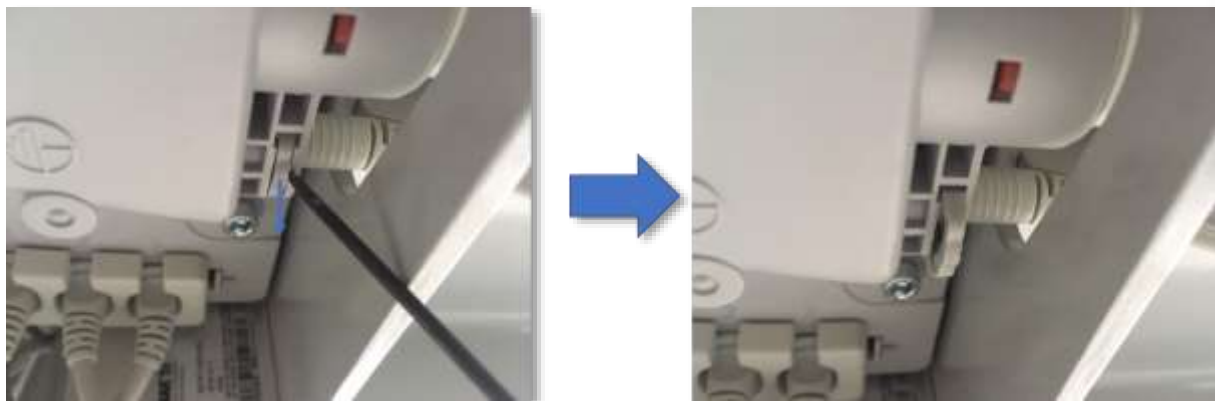

Sur le boîtier CB06, déclipser la barrette anti-arrachement sur le côté gauche et droit (utiliser un petit tournevis). Il suffit de glisser le tournevis entre l'extérieur et le clip de la barrette puis de pousser vers l'intérieur comme expliqué ci-dessous.





Bien mettre de côté cette barrette anti-arrachement.

Ensuite, retirer le matelas du couchage. Si votre plan dur d'assise est scratché, tiré dessus pour pouvoir accéder au boîtier.



Dans le cas où vous possédez un plan dur collé ou d'un matelas fixe, accéder à l'aide d'une clé à plate à l'écrou au centre du boîtier en la passant entre le matelas et le boîtier.

Munissez-vous, d'une clé Allen et d'une clé à plate (idéalement à cliquet)

Dévisser la vis qui maintient le boîtier sur son support avec la clé Allen tout en maintenant l'écrou avec la clé à cliquet.

Emplacement vis + écrou à dévisser pour
sortir le boîtier



Pour le désolidariser de son support effectuer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.



Ensuite prendre le nouveau boîtier en s'assurant que la référence correspond à l'ancien (mise à part l'indice d'évolution du soft).

Débrancher les câbles un à un en les branchant sur le nouveau boîtier. Ainsi il n'y a pas de risque d'erreur de branchement.

Pour rappel :


1 – Vérin de relèvement buste

2 – Vérin colonne tête

3 – Vérin de relèvement jambe

4 – Vérin colonne pied

HB – Télécommande ou répartiteur

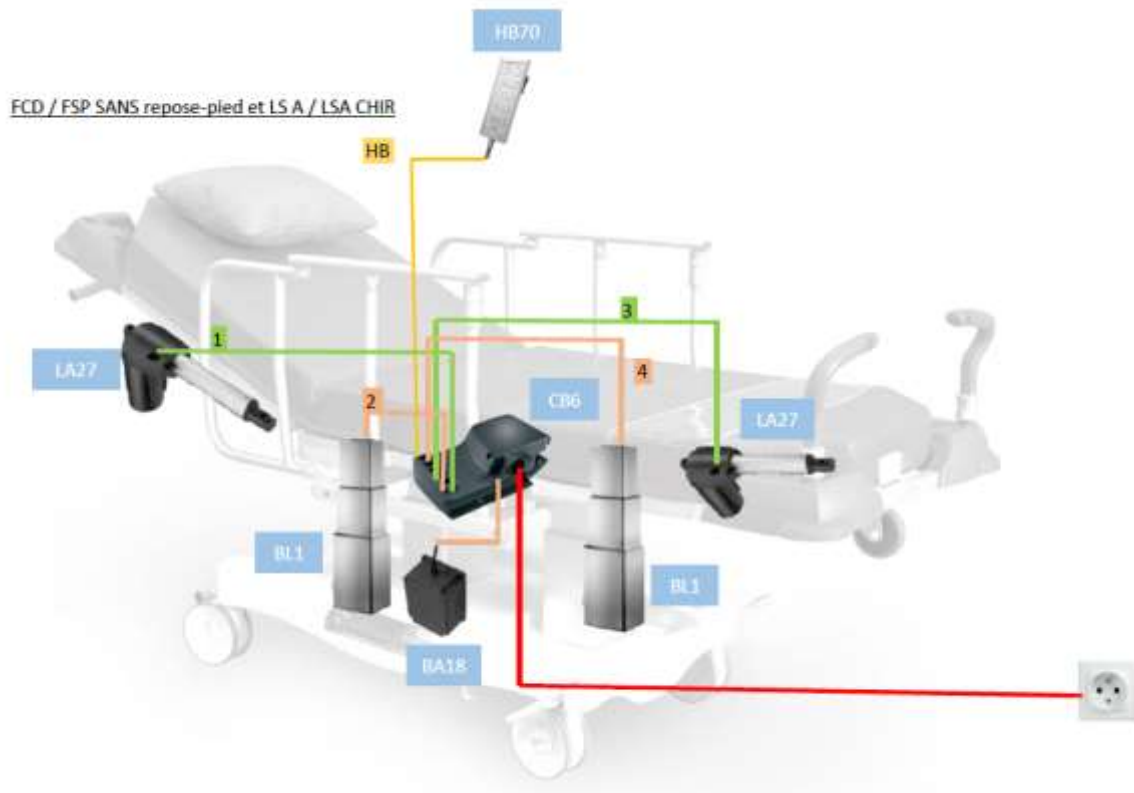

Attention : il faut absolument respecter le branchement des colonnes et ne pas inverser entre la colonne pied et la colonne tête. Risque de casses mécaniques

Puis replacer le boîtier de commande dans son logement en effectuant le même mouvement de rotation. Puis fixer le en remettant la vis et l'écrou. Attention de ne pas serrer trop fort pour ne pas casser les fixations plastiques du boîtier.

Rebrancher le câble secteur sur le boîtier ainsi que la batterie.



Attention : Enfoncer convenablement le câble puis placer l'anti-arrachement



L'anti-arrachement doit être visible (il empêche le câble de sortir)

Remettre la barrette anti-arrachement sur le boîtier pour maintenir l'ensemble des câbles.



Remettre le plan dur sur les scratches correctement et remettre le matelas par-dessus.

Avant de remettre le produit dans le service il faut effectuer une vérification et un reset.

3. Reset et vérification

Etant donné que le boîtier est paramétré usine, le produit doit être réinitialisé.

Pour commencer, rebrancher le produit sur secteur et vérifier que la led verte du boîtier est allumée (ce qui indique que la puissance arrive bien au boîtier).

Ensuite, appuyer sur la monter de hauteur variable jusqu'à ce que le produit arrive en butée haute (le produit bipé lors de son déplacement jusqu'en haut).

Il faut réaliser la même chose pour le vérin de relève buste jusqu'en butée.

Votre produit est correctement paramétré.

Ensuite, vérifier chaque mouvement en réalisant des courses complètes jusqu'en butée de chaque vérin.

Il faut tester les touches automatiques (accueil, CPR...) pour s'assurer que les mouvements de colonnes soient respectés.

Pour finir, débrancher le produit du secteur et tester sur batterie (permet de vérifier que la batterie est correctement branchée).

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux