

# **PROCEDURE**

## **CHANGEMENT GARNITURE REPOSE**

### **PIED CLAVIA FCD**



## SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces .....	3
2. Démontage.....	3
3. Remontage .....	5

## 1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du coussin de repose pied, il vous faut :

- Clé Allen de 5

**Temps de l'intervention : 10 Min**

## 2. Démontage

Pour commencer, il faut déhouser le repose pied. Pour cela, tourner le cylindre afin d'accéder à la fermeture et l'ouvrir.



Ensuite compresser le coussin de la façon suivante pour pouvoir le déhouser :



Désormais, vous accédez à la vis qui maintient la mousse sur le tube. Prendre une clé Allen et dévisser la vis.



Il ne vous reste plus qu'à tirer sur le cylindre pour sortir l'ensemble du tube.



Conserver la vis et la rondelle pour le remontage.

### 3. Remontage

Prendre le nouveau repose pied.



Ouvrir le fermeture éclair.



Ensuite mettre le cylindre debout avec le trou vers le bas et compresser par-dessus pour déhouser.

Insérer le cylindre dans le tube repose pied comme ci-dessous.



Remettre la rondelle et la vis pour maintenir la mousse.



Puis recomprimer l'ensemble pour pouvoir remettre la housse sur la mousse et fermer la fermeture éclair et remettre en position le cylindre (fermeture vers le bas).



## CONTACT



**Mail**

sav@bmb-medical.com



**Téléphone**

04 74 08 71 73



**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>



**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>



**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX