

# PROCEDURE

## CHANGEMENT DE MOUSSE D'ACCOUDOIR



## SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces ..... 3
2. Démontage..... 4

## 1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement des mousses d'accoudoirs, il vous faut :

- Clé plate de 17 et 8
- Clé Allen
- Lubrifiant
- Tournevis



**Temps de l'intervention : 10 Min**


## 2. Démontage

Se placer dans un lieu de travail adapté pour pouvoir déposer les pièces de l'accoudoir sans les dégrader (accoudoir à déposer sur protection...).

Activer la manette de l'accoudoir pour le positionner à la perpendiculaire du bras.



Repérer les 3 clips plastique sur le capot de l'accoudoir.

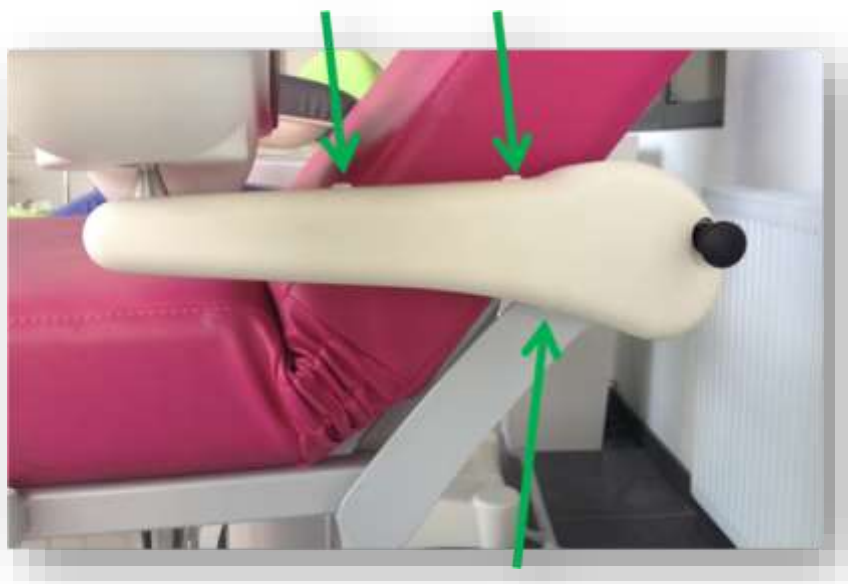

Pour chaque clip, prendre un outil avec un embout fin, comme une clé Allen, et appuyer d'un coup sur le centre pour y faire tomber l'axe central. Puis retirer l'autre partie.



Lorsque vous aurez retiré les 3 clips du capot, décaler suffisamment le capot pour avoir accès à la vis de fixation de l'accoudoir.

Prendre la clé plate de 17 et desserrer l'écrou qui maintient l'accoudoir (dans le cas où vous avez une ancienne version) sinon dévisser les 3 vis de fixation.



Puis retirer l'accoudoir du bras. Poser le sur un support adapté pour ne pas abîmer le repose bras de l'accoudoir.

Prendre un tournevis et faire levier sous le capot au niveau de chaque vis plastique pour pouvoir le retirer. Attention de ne pas casser les clips et de dégrader l'accoudoir avec l'outil (ne pas dégraper avec le tournevis).



Lorsque vous êtes à l'étape ci-dessous, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'accoudoir à la plaque en décalant le capot. Les vis sont accessibles sans retirer le capot. Si vous souhaitez, retirer complètement le capot, vous devez dévisser les deux vis de la palette de commande.



Remplacer votre mousse d'accoudoir.

### 3. Remontage

Commencer par replacer la nouvelle garniture sous la tôle Puis revisser les 2 vis.

Repositionner le capot blanc de l'accoudoir en le clipsant avec les vis plastiques blanches.

Remonter l'accoudoir sur le bras d'accoudoir dans son logement, puis revisser l'écrou ou les 3 vis en fonction de la version que vous possédez.

Repositionner le capot du bras inférieur en position. Puis remettre les clips blancs (RIVPLASTCI)



Positionner la  
tige au centre  
puis prendre un  
maillet pour  
rentrer l'axe.



Appuyer (sans effort important) sur l'extrémité de l'accoudoir. Il ne doit pas s'abaisser.

L'accoudoir est fait pour supporter le poids d'un bras reposé. Il n'est pas fait pour s'appuyer régulièrement dessus.

## CONTACT



**Mail**  
[sav@bmb-medical.com](mailto:sav@bmb-medical.com)



**Téléphone**  
04 74 08 71 73



**Site internet**  
<http://www.bmbmedical.com/>



**Espace client**  
<http://bmb-ubicx.com>



**Adresse postale**  
100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX



