

PROCEDURE

RESSERRAGE BRAS INFÉRIEUR



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Réglage	3
3. Remontage	5

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au réglage, il vous faut :

- Clé plate de 17 et 13
- Clé Allen

Temps de l'intervention : 10-15 Min


2. Réglage

Placer vous dans un lieu de travail adapté pour pouvoir déposer les pièces de l'accoudoir sans les dégrader (accoudoir à déposer sur protection...).

Activer la manette de l'accoudoir pour le positionner à la perpendiculaire du bras.



Repérer les 3 clips plastique sur le capot de l'accoudoir.

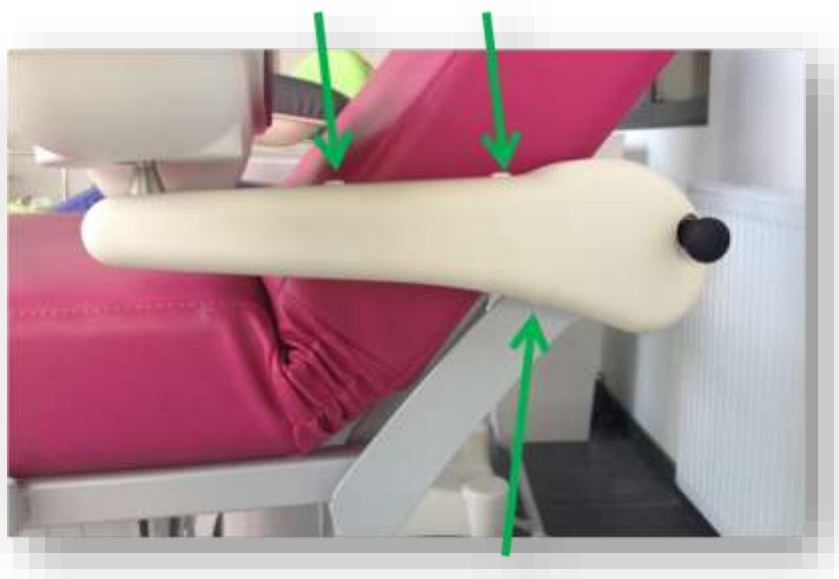

Pour chaque clip, prendre un outil avec un embout fin, comme une clé Allen, et appuyer d'un coup sur le centre pour y faire tomber l'axe central. Puis retirer l'autre partie.



Pour pouvoir retirer le capot, il ne reste que le doigt d'indexage à dévisser à l'aide d'une clé plate de 17.



Retirer le capot délicatement, attention à la partie avant soulever légèrement.



Prendre une clé plate de 13 et resserrer la vis arrière qui maintient l'ensemble.



Attention de ne pas trop serrer sinon le mouvement du bras est dur voir bloqué. Tester le mouvement du bras si besoin.

3. Remontage

Pour commencer, repositionner le capot sur le bras. Bien faire attention à l'encoche sur l'avant.



Ensuite, revisser le doigt d'indexage toute en appuyant légèrement sur le capot pour pouvoir visser correctement jusqu'au bout.



Et pour finir remettre les clips blancs un à un pour fixer le capot sur le bras.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX