

PROCEDURE

BRANCHEMENT PRISE CB06 SUR

BOITIER CHARGE

I-CARE EZGO



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces..... 3
2. **Branchement**..... 3

1. Préparation outillage et pièces



Cette installation se fait uniquement si le brancard est un i-care EZGO et avec l'option plicature / relève buste électrique (boîtier CB06 CO)

Pour procéder à cette installation/modification il vous faut l'outillage suivant :

- Un tournevis plat isolé
- Un tournevis cruciforme
- Une pince à dénuder
- Un cutter

Temps de l'intervention : 10 Min

2. Branchement

Avant de commencer, il faut en priorité débrancher le brancard du secteur.



Repérer le boîtier de charge (boîtier gris fixé sur une plaque)


A l'aide du tournevis cruciforme, dévisser les 6 vis du boîtier pour pouvoir retirer le capot.

Attention à bien enlever l'autocollant jaune et noir d'avertissement.

A l'intérieur, il y a 2 cartes électroniques :


Carte
sécurité

Carte
puissance

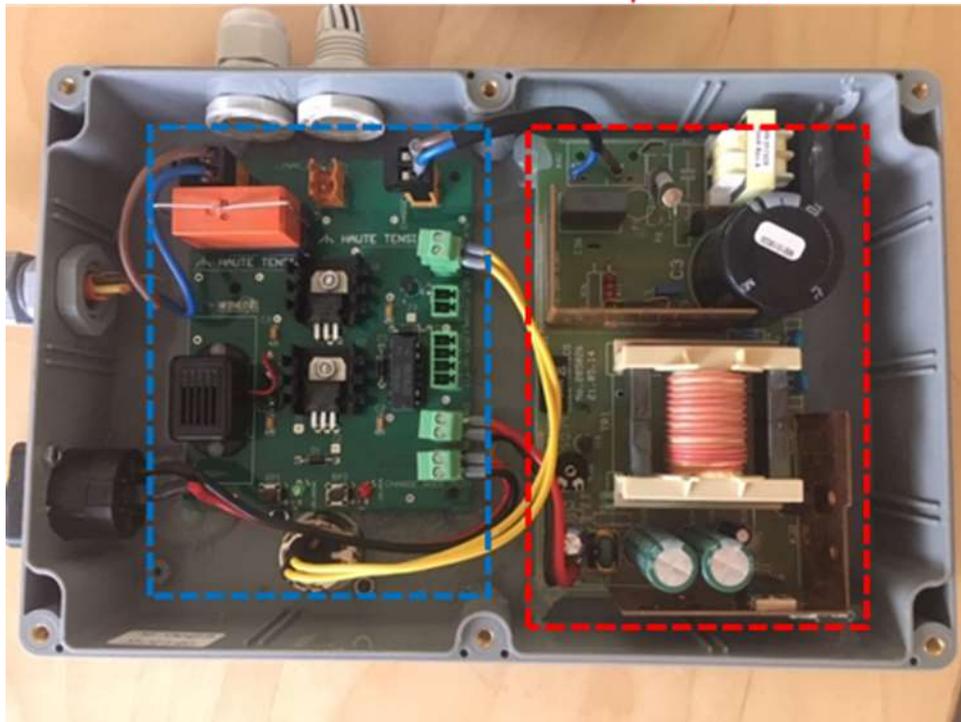

Il faut regarder la carte qui gère la sécurité donc la carte à gauche.

la carte

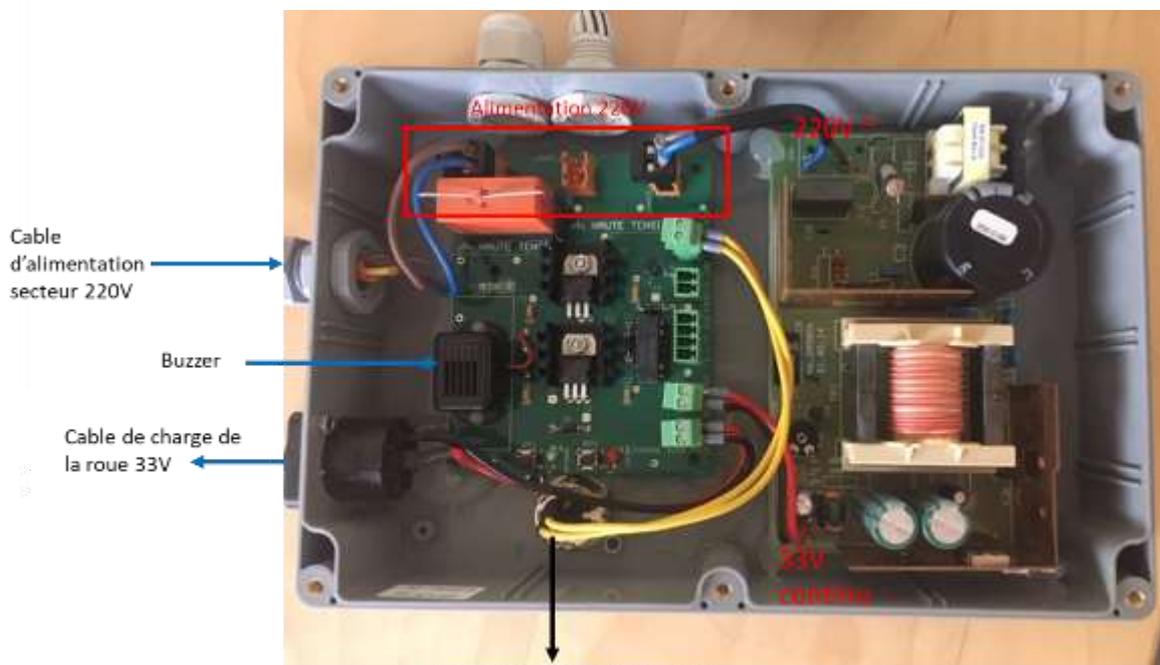

Shunt (permet de s'assurer que le câble de charge de la roue est bien rebranché sur le boîtier)

Prendre le câble d'alimentation du boîtier LINAK et couper le câble secteur au niveau de la prise comme ci-dessous.



Ensuite dénudé les fils comme ci-dessous.



Sur le boîtier, dévisser l'écrou du presse étoupe et le mettre sur votre câble d'alimentation.

Puis passer le câble dans le boîtier en s'assurant que le joint est bien présent. Ensuite insérer les fils et serrer avec la vis.


Attention de bien respecter le sens de branchement.



Il ne reste plus qu'à brancher le connecteur à son emplacement « LINAK_Box_out1 »



Vérifier que le fil neutre (bleu) est en bas et la phase (marron) en haut. Régler la longueur du câble en tirant dessus par le haut. Et serrer l'écrou du presse étoupe.

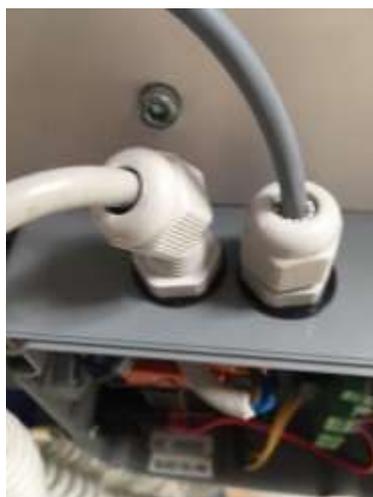

Refermer le boîtier et brancher le câble secteur du boîtier EZWHEEL. Vérifier que la led verte est bien présente sur le boîtier Linak.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX