

PROCEDURE

AJOUT ET BLOCAGE ARCEAU

ANTIVOL





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Installation.....	3

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au blocage de l'arceau antivol, il vous faut :

- Un jeu de clés Allen
- Un laillet
- Une douille
- Frein filet bleu
- Un clip (permet de bloquer la tige à sérum)
-



Temps de l'intervention : 10 Min

2. Installation

Pour commencer, procéder au dévissage des 2 supports accessoires à l'aide d'une clé Allen. Mettre de coté vos vis ainsi que les rondelles.



Prenez votre arceau antivol puis insérer le support accessoire de chaque côté.




Prendre le clip, puis l'insérer aux 2 extrémités de l'arceau.

A l'aide d'une douille de la taille du clip ainsi qu'un maillet, taper d'un coup sec afin d'insérer le clip jusqu'au bout. (Voir photos ci-dessous)



CLIP

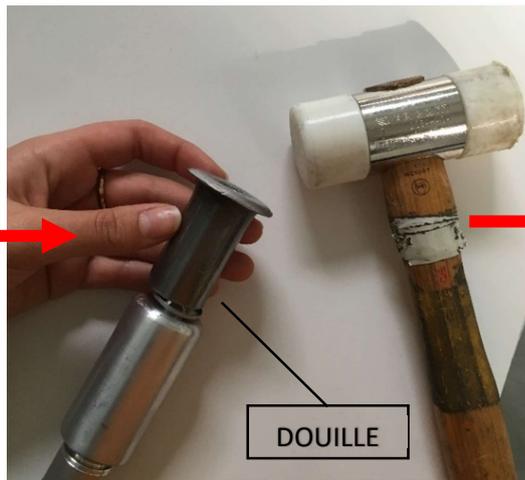

Une fois les supports accessoires insérés, il vous reste à fixer le tout sur la chaise.



Pour cela prenez les 2 vis ainsi que les 2 rondelles, (2xVis BHC M5x10 + 2X Rondelles plates 5,3x15x1,25).

Mettez du frein filet bleu sur les vis.



Positionner le support face aux trous prévus pour le support accessoire sur le châssis, puis visser vos 2 vis agrémenter de frein filet avec les rondelles en maintenant l'arceau.



CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX