

PROCEDURE DE BLOCAGE DE LA TIGE A SERUM I-MOVE





SOMMAIRE


- 1. Préparation outillage et pièces..... 3
- 2. Installation..... 3

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au blocage de la tige à serum, il vous faut :

- Un jeu de clés Allen
- Un maillet
- Une douille
- Frein filet bleu
- Un clip (permet de bloquer la tige à sérum)

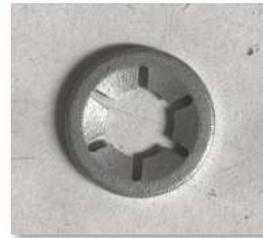

Temps de l'intervention : 10-15 Min

2. Installation

Choisir dans un premier temps le côté où vous souhaitez que la tige à sérum soit bloquée.

Une fois votre choix fait, procéder au dévissage du support accessoire à l'aide d'une clé Allen. Mettre de coté vos vis ainsi que les rondelles.



Prenez votre tige à sérum puis enfiler le support accessoire.




Prendre le clip, puis l'insérer au bout de la tige à sérum.

A l'aide d'une douille de la taille du clip ainsi qu'un maillet, taper d'un coup sec afin d'insérer le clip jusqu'au bout. (Voir photos ci-dessous)



CLIP

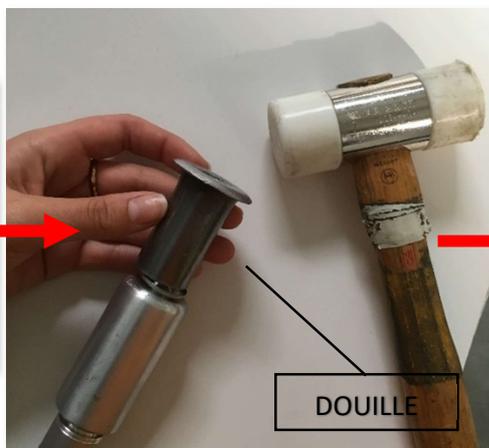

DOUILLE



Une fois votre tige à sérum bloquer sur le support accessoire, il vous reste à fixer le tout sur la chaise.

Pour cela prenez les 2 vis ainsi que les 2 rondelles, (2xVis BHC M5x10 + 2X Rondelles plates 5,3x15x1,25).

Mettez du frein filet bleu sur les vis.



Positionner le support face aux trous prévus pour le support accessoire sur le châssis, puis visser vos 2 vis agrémenter de frein filet avec les rondelles en maintenant la tige à sérum.



CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX