

PROCEDURE CHANGEMENT DE GARNITURE IMOVE





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	3
2.1 Démontage de la garniture dossier.....	3
2.2 Démontage de la garniture assise	4
3. Remontage.....	5
4. Vérification.....	6

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la garniture de la chaise, il vous faut :

- Jeu de clé Allen
- Jeu de clé Torx



Temps de l'intervention : 15-20 Min

2. Démontage

2.1 Démontage de la garniture dossier

Dos à la chaise, repérer les 4 vis, puis avec la clé Allen de 4 procéder au dévissage.



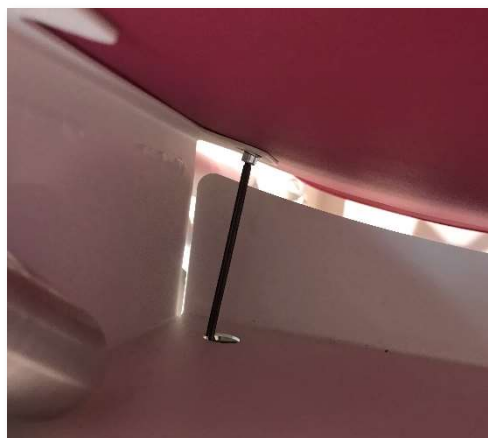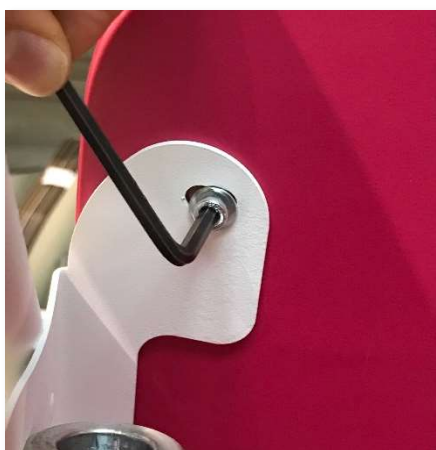

Mettre les vis ainsi que les rondelles de côté puis retirer la garniture à changer.



2.2 Démontage de la garniture assise

Repérer les 4 vis puis procéder au dévissage avec la clé.



Mettre les vis ainsi que les rondelles de côté puis retirer la garniture à changer.



Récupérer les angles blancs de la garniture à l'aide de la clé Torx en les dévissant puis réinstaller les sur la nouvelle garniture en les vissant.




Embout 25



3. Remontage

Prendre la nouvelle garniture, la positionner face aux trous de perçage du châssis puis visser la garniture.

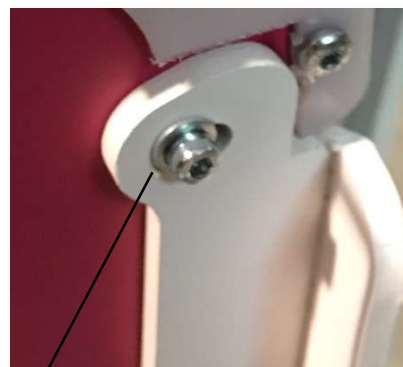

1. Vis
2. Rondelle
3. Châssis de chaise
4. Garniture

Sur votre garniture assise, fixer vos angles blancs, puis visser la garniture au châssis.



4. Vérification

Vérifier la fixation de la garniture, en contrôlant l'absence de jeu.

CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux