

PROCEDURE

VERIFICATION DU SYSTEME DE FREIN I-MOVE ENCASTRABLE



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Contrôle du système de frein.....	3
3. Vérification et spécification	7

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du système de frein, il vous faut :

- Frein filet vert
- Clé Allen de 4
- Visserie + paliers (au besoin)

Temps de l'intervention : 15-20 Min

2. Contrôle du système de frein

Le système de frein, est un ensemble très sollicité, nous conseillons d'effectuer ce contrôle régulièrement.



Placez-vous dos à votre chaise, afin d'avoir un accès complet au système de frein.

Contrôler le serrage de chaque vis (10 vis à l'intérieur puis 4 vis à l'extérieur), ajouter du frein filet vert au besoin sur les vis comme indiqué sur les photos suivantes.


1- Vérifier VISUELLEMENT la présence et l'état des paliers noirs ainsi que le serrage des



En cas de serrage insuffisant, vis absente ou d'absence de contact entre la vis et le palier, il faut procéder au recollage.

Reprendre la vis (ou changer la vis), et déposer du frein filet comme ci-dessous. Puis revisser.

Attention : ne pas serrer trop fort au risque de bloquer le système de freinage. Il faut juste venir au contact du palier.

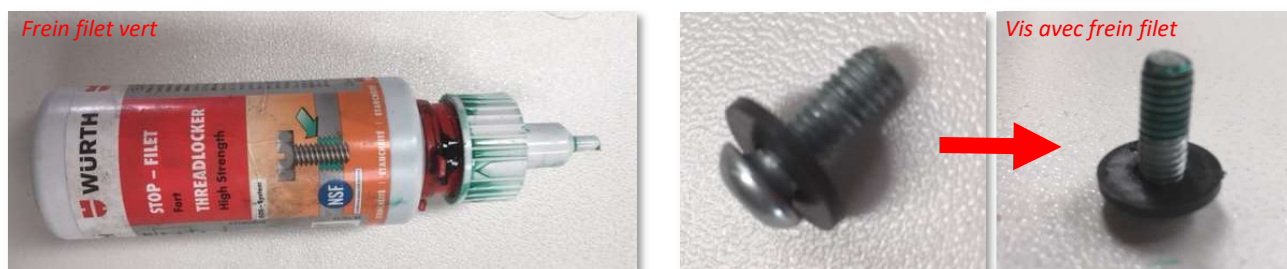

2- Vérifier VISUELLEMENT la présence et l'état des paliers noirs ainsi que le serrage des vis.



En cas de serrage insuffisant, vis absente ou d'absence de contact entre la vis et le palier, procéder comme à l'étape 1.

- 3- Vérifier **VISUELLEMENT** la présence de l'entretoise ainsi que le serrage de la vis de butée et du contre écrou.



- 4- Vérifier **VISUELLEMENT** le serrage des vis et l'absence de jeu latéral dans la pédale.



5- Vérifier l'absence de jeu et le serrage de l'appui frein.



3. Vérification et spécification

En cas de resserrage de vis avec du frein filet, il est important de ne pas utiliser la chaise pendant 12h pour s'assurer de l'optimisation du collage.

Une fois le temps de séchage respecté, vérifier le fonctionnement du système de frein. En position frein, en poussant la chaise, les roues ne doivent pas tourner.

CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux