

PROCEDURE

INSTALLATION BATTERIE



SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces 3
2. Démontage / remontage 3

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder à l'installation de la batterie, il vous faut :

- Tournevis cruciforme

Temps de l'intervention : 10 Min

2. Démontage / remontage

Pour commencer, retirer la plaque BMB à l'aide d'un tournevis cruciforme afin d'accéder à l'ensemble électrique.



Boitier de contrôle




Batterie

Vérin HV

Munissez-vous du support batterie et placez-le face aux trous de perçage prévus pour cela.

Le fixer avec 2 vis FHC M10X40 et 2 écrous M4. Attention à bien positionner les encoches du support batterie comme sur la photo ci-dessous.

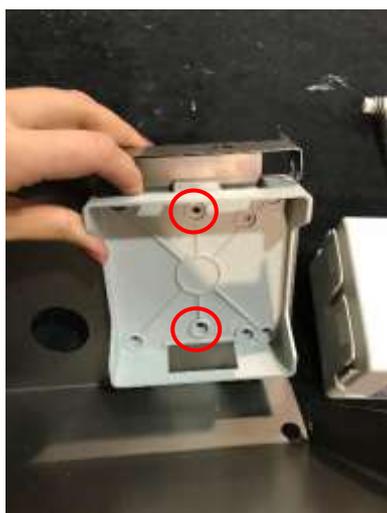


Munissez-vous de votre batterie.



Placer la batterie dans le support.



Munissez-vous du câble rallonge et connectez-le au câble de la batterie.

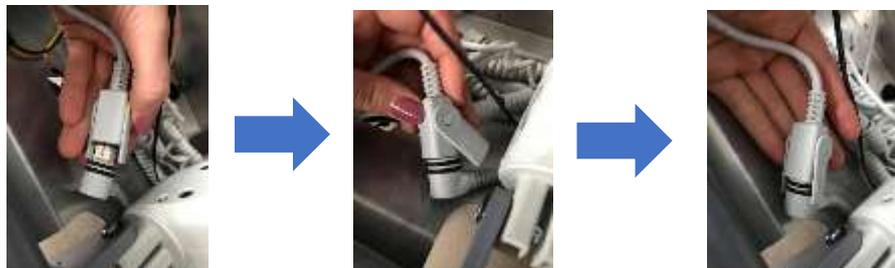

Passez le câble en dessous du vérin de hauteur variable et connectez-le au boîtier de contrôle.



CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX