

PROCEDURE

CLAVIA 5

CHANGEMENT BOITIER DE COMMANDE





SOMMAIRE

| | |
|--|---|
| 1. Préparation outillage et pièces | 3 |
| 2. Démontage..... | 3 |
| 3. Remontage | 8 |
| 4. Vérification | 9 |

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du boîtier de commande, il vous faut :

- Un tournevis plat

Temps de l'intervention : 5 Min


Afin de pouvoir accéder facilement au boîtier de commande, brancher le produit sur le secteur et le monter le produit en position la plus haute (dans le cas où le boîtier fonctionne pour la hauteur variable)




Puis débrancher le du secteur

2. Démontage


Repérer le boîtier de commande sous l'assise. La batterie se situe juste au-dessus.

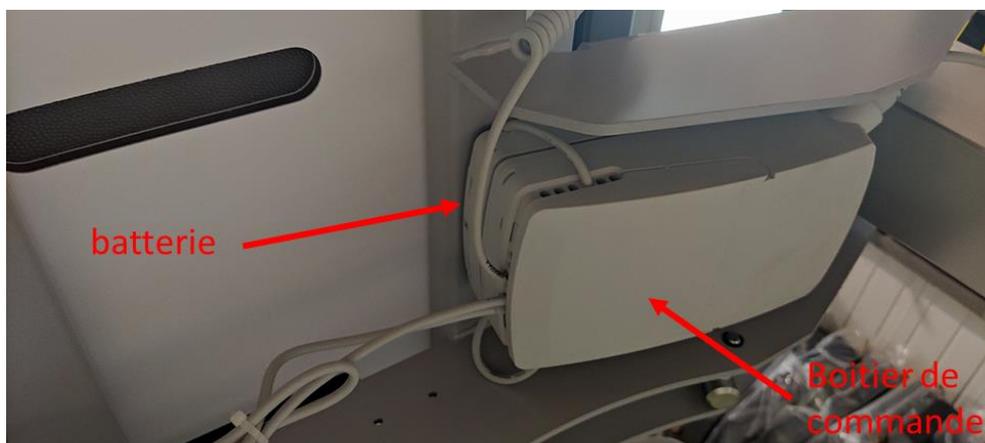


Commencer par ouvrir le capot du boîtier de commande. Pour cela, prendre un tournevis et appuyer sur les 2 languettes de chaque côté comme ci-dessous :

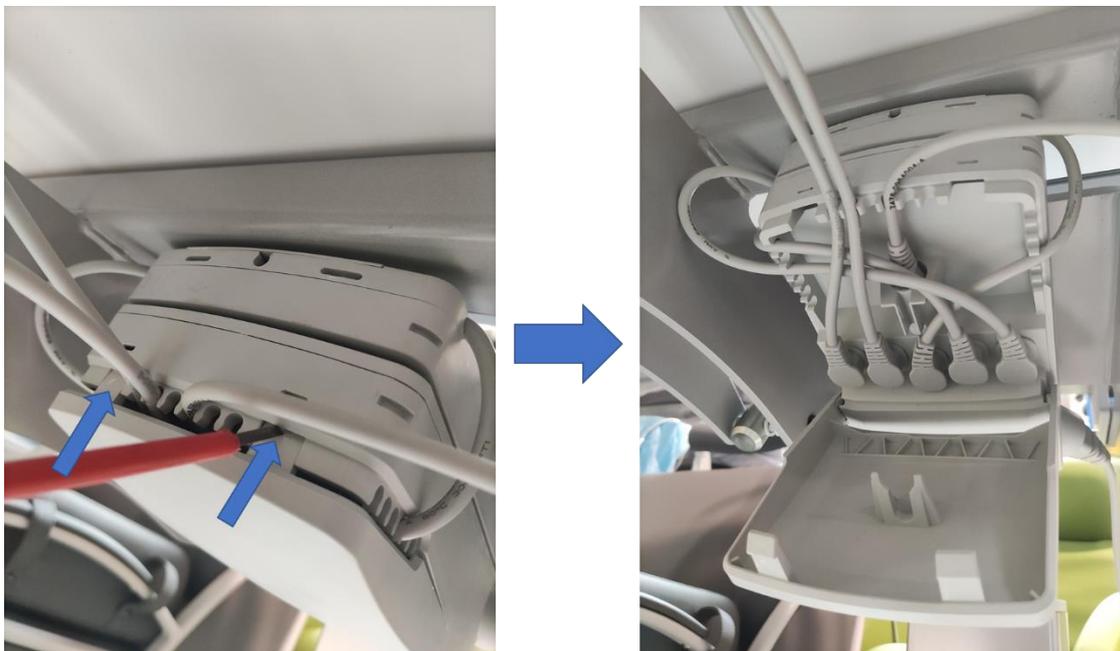

Ensuite débrancher le câble de la télécommande (connecteur sur l'avant) :

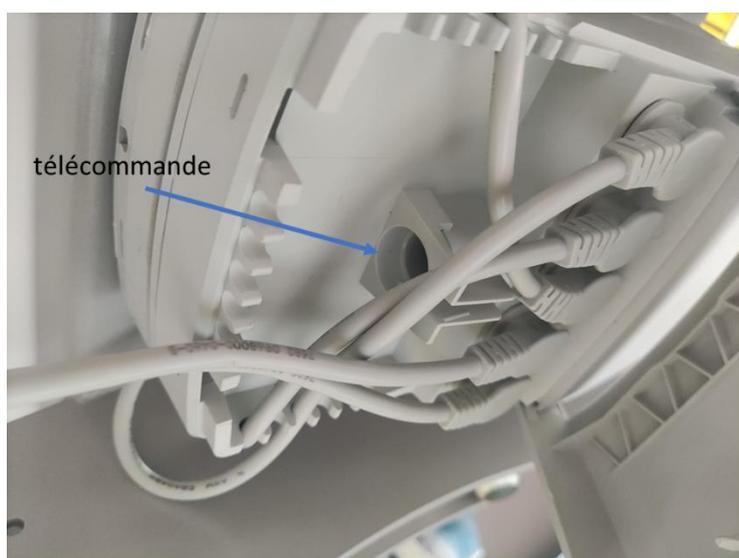


Puis le câble de la batterie (connecteur au-dessus de celui de la télécommande). Dans le cas où votre produit possède un Repose pied, ce sera le câble du répartiteur.

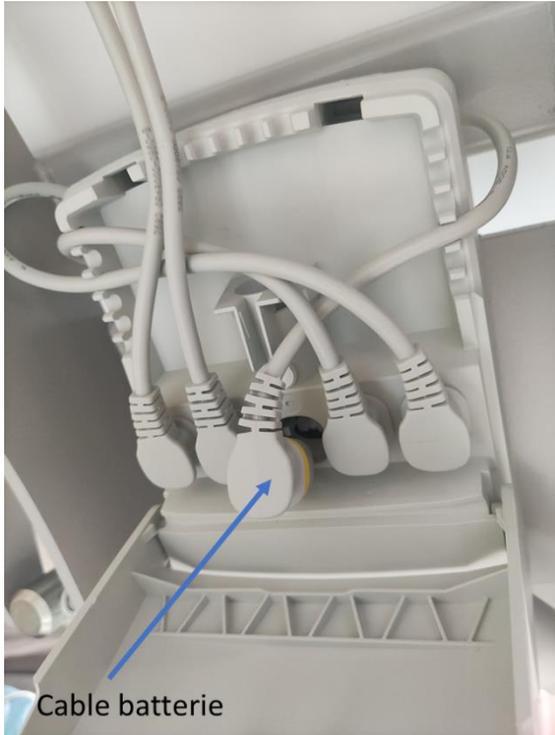


Afin d'éviter de faire des erreurs de branchement des vérins, nous conseillons de les débrancher plus tard dans la procédure.

Ensuite, placer vous du côté du branchement du câble d'alimentation sur le boîtier. Visualiser le clip pour déclipser l'ensemble boîtier batterie de l'assise.

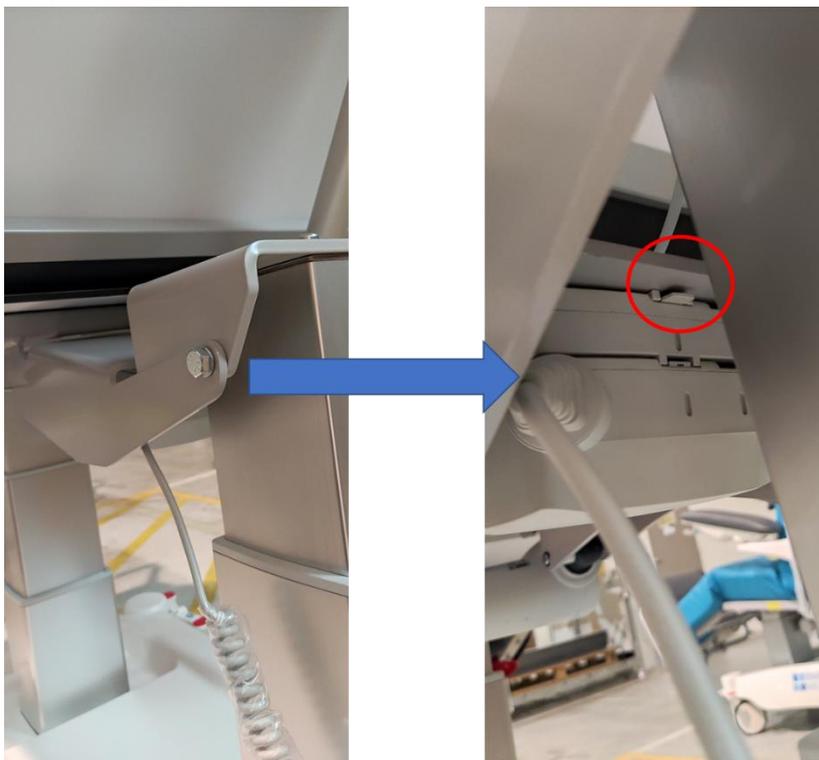

Appuyer sur le clip, tout en poussant le boîtier vers l'intérieur comme sur la photo (maintenir le boîtier) :

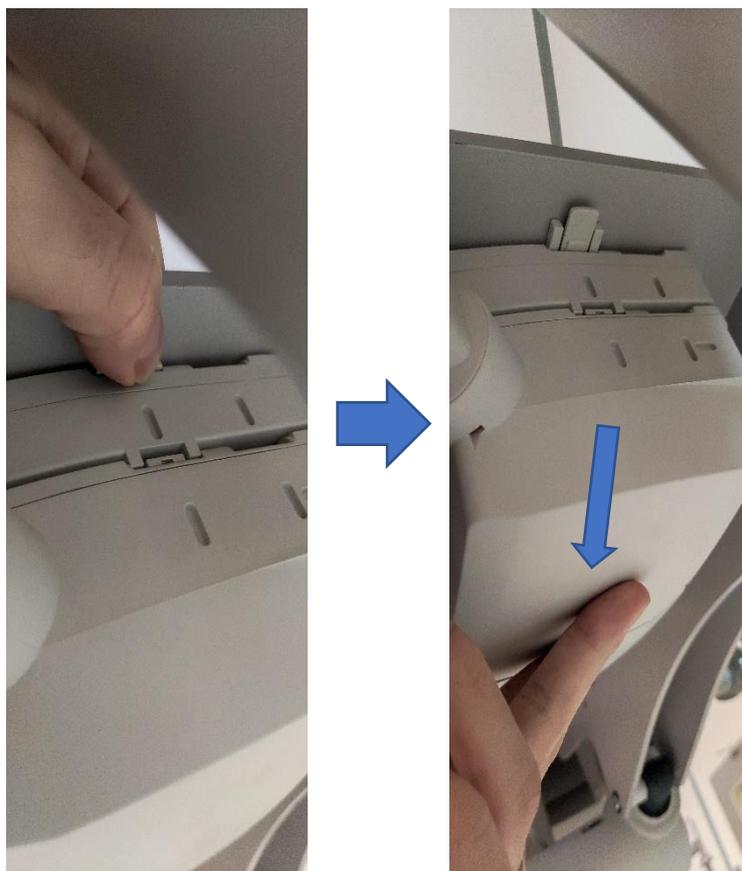

Ensuite, débrancher le câble d'alimentation du boîtier :



Ensuite, il faut désolidariser la batterie du boîtier. Pour cela, appuyer à l'aide d'un tournevis sur la languette et décaler la batterie.



Il ne reste plus qu'à prendre le nouveau boîtier de commande, en ayant ouvert le capot au préalable. Débrancher les câbles un à un pour les rebrancher sur le nouveau boîtier (en respectant le câblage).

- 1 – Vérin de relève buste
- 2 – Colonne tête
- 3 – Vérin de relève jambe
- 4 – Vérin de repose pied

3. Remontage

Commencer par rebrancher le câble d'alimentation sur le boîtier.

Ensuite, prendre la batterie et placer la comme ci-dessous, puis la remonter pour la clipser sur le boîtier de commande.




Puis rebrancher le câble de la batterie en appuyant correctement (le joint jaune ne doit pas être visible) ainsi que celui de la télécommande. Passer les câbles dans l'une des encoches.



Fermer le capot. Il ne reste plus qu'à replacer l'ensemble sur le couchage.

Positionner le boîtier à plat sur la structure et dans l'encoche. Puis le déplacer vers l'avant :

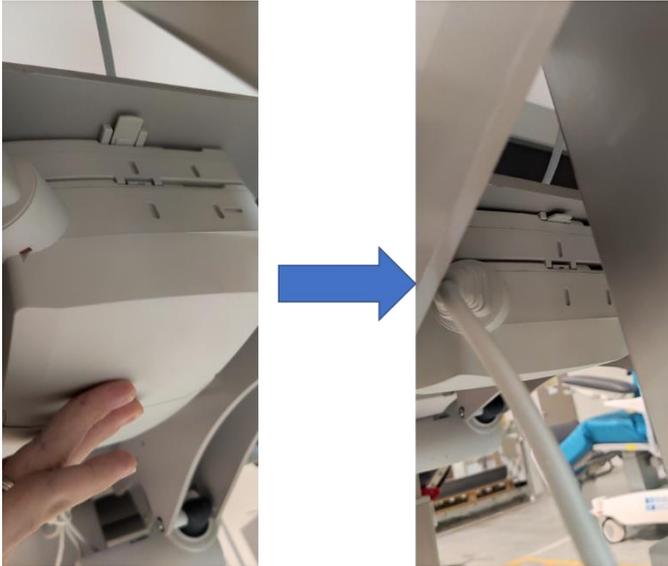

4. Vérification

Le boîtier est neuf et par conséquent, il n'est pas appairé avec la télécommande et ne possède aucune position.

Brancher votre produit sur le secteur et vérifier la présence de la led verte sur le boîtier.


Ensuite à l'aide de la télécommande, réaliser la procédure ci-dessous pour appairer la télécommande au boîtier.

A la 1^{ère} utilisation du boîtier (ou après chargement d'un soft), l'appairage du boîtier avec la télécommande est nécessaire. **Après avoir branché le chariot brancard sur secteur effectuer les étapes suivantes :**


Etape 1

Appuyer **simultanément** sur les touches « **ACCUEIL** » et « **DESCENTE RELEVÉ JAMBE** » jusqu'à l'extinction du signal sonore (bips répétitifs) soit 5 sec.


Attention : lors de l'appui sur les deux touches en simultané il faut **bien attendre que le vérin de relève buste aille en butée.**

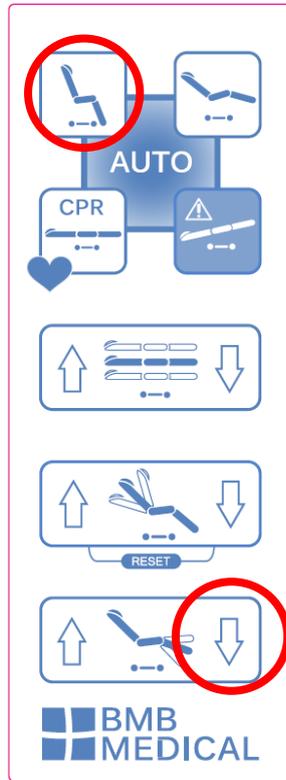

CLAVIA colonne

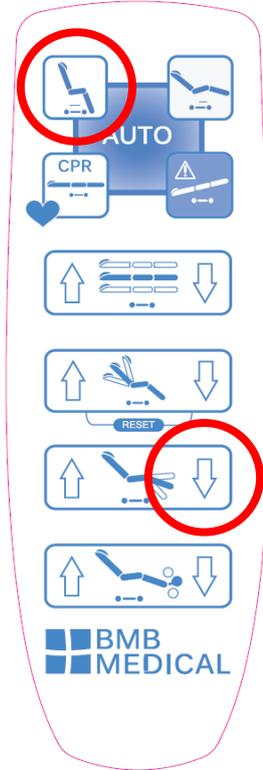


CLAVIA 5 vérins

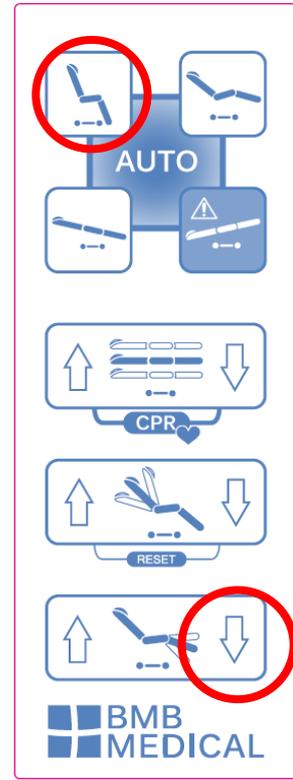

CLAVIA LSA CHIR


Étape 2

Appuyer sur la touche « **MONTEE HAUTEUR VARIABLE** » jusqu'à l'extinction du signal sonore (bips répétitifs)

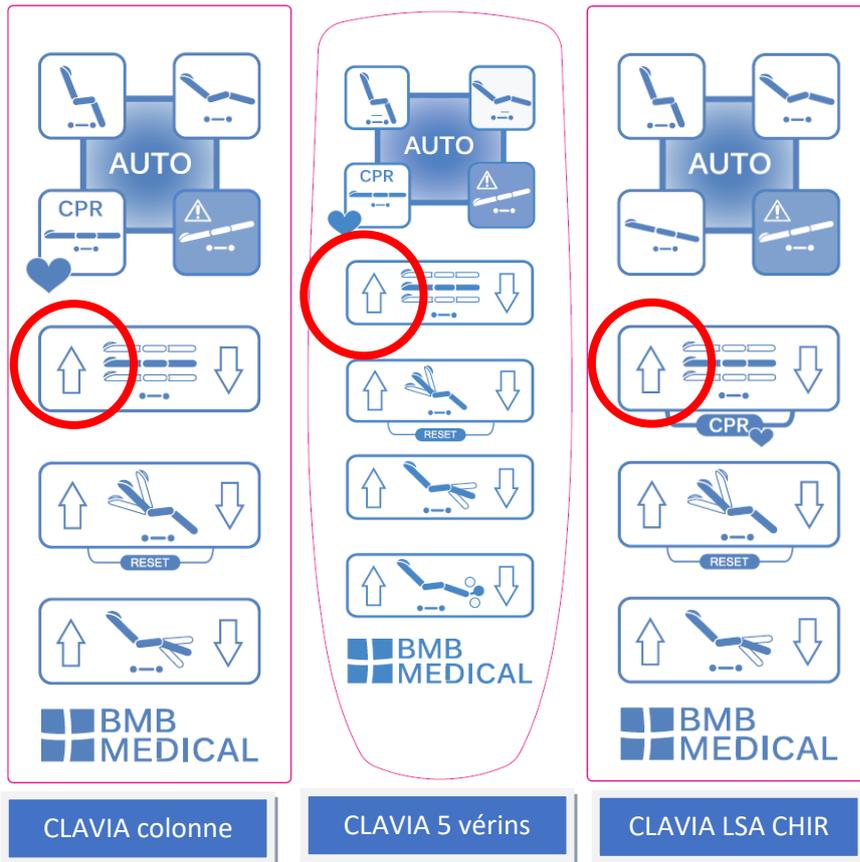


Etape 3

Appuyer sur la touche « **MONTEE RELEVÉ BUSTE** » jusqu'à l'extinction du signal sonore (bips répétitifs)

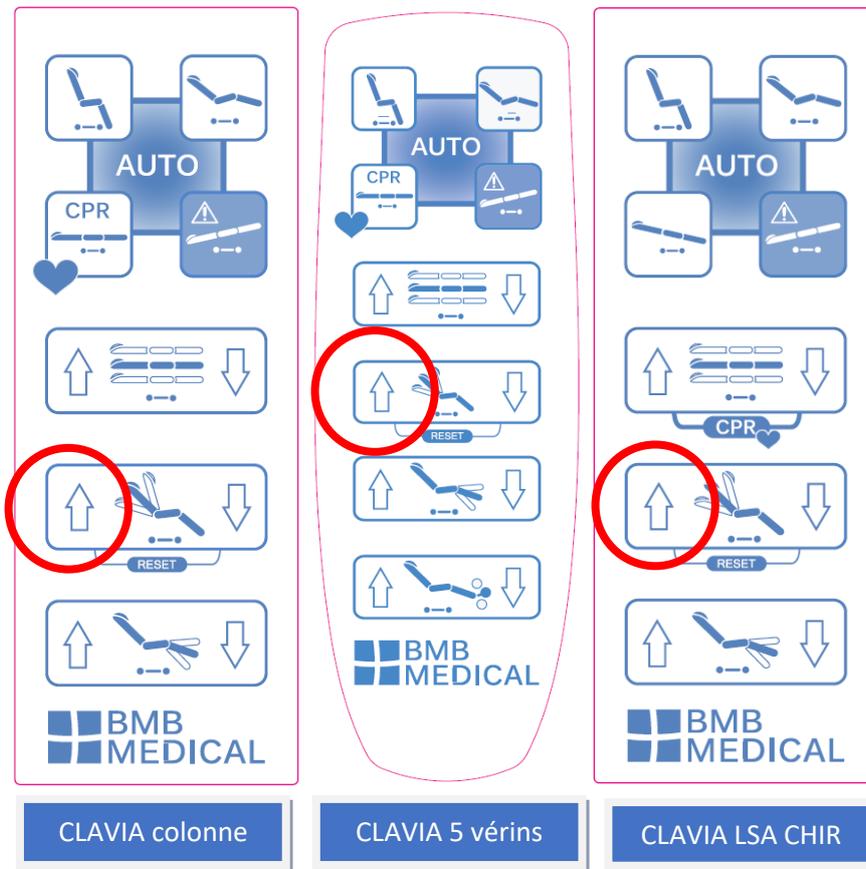

Étape 4

Appuyer sur la touche « **MONTEE RELEVÉ JAMBE** » jusqu'à l'extinction du signal sonore (bips répétitifs)

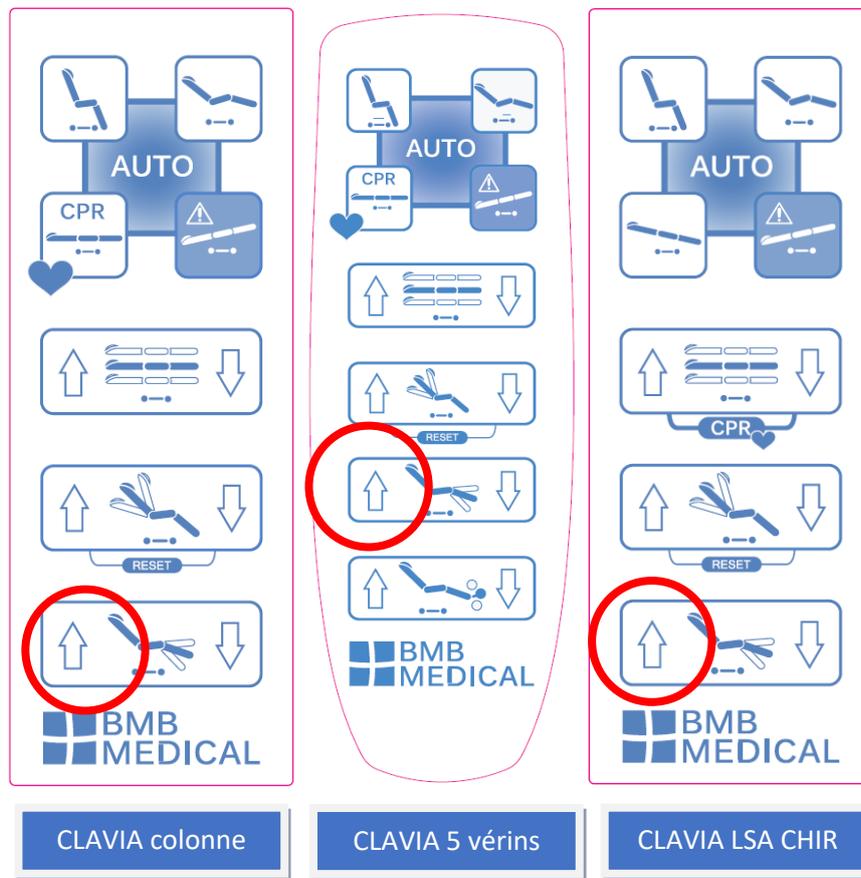

L'appairage est terminé.

Vous pouvez désormais remettre votre fauteuil à la position souhaitée.

CONTACT



Mail
sav@bmb-medical.com



Téléphone
04 74 08 71 73



Site internet
<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client
<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale
100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX