

PROCEDURE

CLAVIA 5

CHANGEMENT TÉLÉCOMMANDE





SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces	3
2. Démontage.....	3
3. Vérification.....	5

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de la télécommande, il vous faut :

- Un tournevis plat

Temps de l'intervention : 5 Min

2. Démontage


Repérer le boîtier de commande sous l'assise. La batterie se situe juste au-dessus.



Commencer par ouvrir le capot du boîtier de commande. Pour cela, prendre un tournevis et appuyer sur les 2 languettes de chaque côté comme ci-dessous :



Ensuite débrancher le câble de la télécommande (connecteur sur l'avant) :

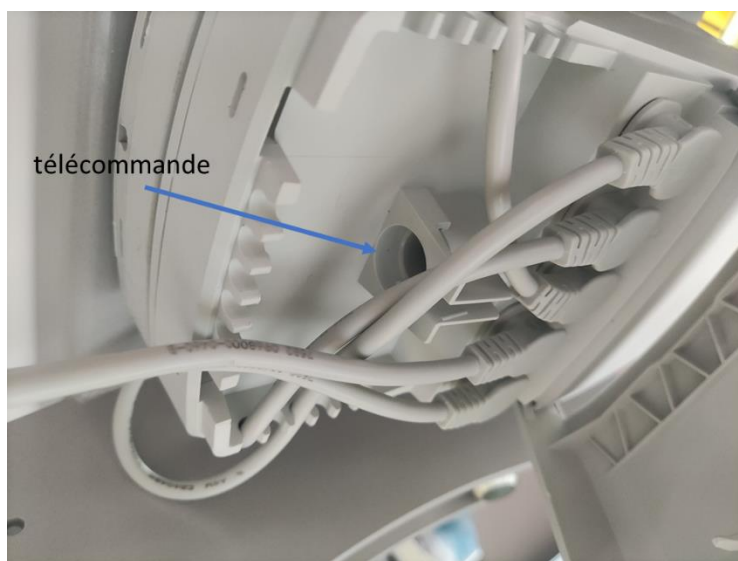

Prendre votre nouvelle télécommande (s'assurer au préalable que c'est la même référence).

Brancher la nouvelle télécommande sur l'emplacement correspondant. Attention, il y a un détrompeur, l'encoche du connecteur de la télécommande orienté vers le bas.



Fermer le capot.

3. Vérification

Brancher votre produit sur le secteur et vérifier la présence de la led verte sur le boîtier.

Ensuite à l'aide de la télécommande, effectuer différentes manipulations pour s'assurer du bon fonctionnement.

CONTACT



Mail
sav@bmb-medical.com



Téléphone
04 74 08 71 73



Site internet
<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client
<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale
100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX