

CHECK LIST

MAX-80



29/06/2020



L'entretien préventif doit être réalisé au minimum 1 fois par an. Il est préconisé d'établir un programme d'entretien préventif pour les produits BMB MEDICAL. Selon les conditions d'usage des produits, la fréquence des entretiens préventifs pourra être augmentée.

PREPARATION MATERIEL

OUTILLAGE

Avant de commencer l'entretien du matériel, munissez-vous de l'outillage suivant :



-  Jeu complet de Clés plates (7 à 19)
-  Frein filet
-  Maillet
-  Graisse ou lubrifiant
-  Tournevis plat et cruciforme
-  Jeu complet de Clés Allen
-  Cutter
-  Pinceau
-  Pince étau

Ce matériel permet de pouvoir réaliser une maintenance et réparation sur les fauteuils BMB Médical.

CHASSIS

ROUES

Roulettes :

- Vérification de l'état général des 4 roues.
- Vérification du fonctionnement des roues.
- Vérification, quand la pédale grise de la roue est en position basse – Image 1 -, que les roulettes sont freinées – Vérifier le bon fonctionnement des freins en déplaçant le produit.
- Contrôler la présence et le serrage des écrous de fixation des roulettes Image 2 - *En cas de serrage insuffisant, procéder au serrage **



Image 1



Image 2

COQUE

- Vérification de l'état général de la coque. Absence de fissure.



Image 3

- Vérification de la fixation du capot , présence des 12 rivets de chaque coté du capot. – Image 4.



Image 4

Serrage * : revisser de façon à ce que les éléments ne puissent pas entrer en mouvement / serrage à couple élevé
Serrage ** : revisser de façon à ce que les éléments ne présentent pas de jeu mais puissent entrer en mouvement

STRUCTURE

- Vérification du maintien en position des pieds lorsque ils sont dépliés , *Image 5 - En cas de serrage insuffisant, procéder au serrage * Image 6*



Image 5



Image 6

- Vérification de la présence des 4 pieds – Image 7



Image 7

- Vérification de la présence des 8 clips– Image 8



Image 8

- Vérification l'état général et de l'absence de jeu des panneaux de pied et tête – Image 9 - *En cas de serrage insuffisant, procéder au serrage **



Image 9

Serrage * : revisser de façon à ce que les éléments ne puissent pas entrer en mouvement / serrage à couple élevé
Serrage ** : revisser de façon à ce que les éléments ne présentent pas de jeu mais puissent entrer en mouvement

- Vérification de l'état général de la structure aluminium – Image 9



Image 9

- Vérification de la présence des bouchons carrés – Image 10



Image 10

COUCHAGE

MATELAS

- Vérification de l'état général du matelas- Image 11
- Vérification du bon fonctionnement de la fermeture éclair. – Image 11



Image 11

Serrage * : revisser de façon à ce que les éléments ne puissent pas entrer en mouvement / serrage à couple élevé
Serrage ** : revisser de façon à ce que les éléments ne présentent pas de jeu mais puissent entrer en mouvement

PRODUIT EN FIN DE VIE



A éliminer séparément des déchets ménagers.

Éliminez le produit ou ses composants conformément aux lois et réglementations locales et nationales en matière de protection de l'environnement et de recyclage des matières premières

Demandez aux autorités responsables de la protection de l'environnement le lieu d'élimination approprié.

Spécificités France : BMB MEDICAL remplit ses obligations relatives à la fin de vie des produits Assistant ambulatoire qu'il met sur le marché en finançant la filière de recyclage de Valdelia qui les reprend gratuitement (Plus d'informations sur www.valdelia.org).