

PROCEDURE

SYSTEME VERROUILLAGE

BARRIERE



14-09-2021

SOMMAIRE

1. Montage	3
2. Vérification.....	5

1. Montage

Temps de l'intervention : 5 Min

Pour procéder à la réparation du système de verrouillage de la barrière, il vous faut :
Le doigt de verrouillage BRLDGT, le ressort BRLRES et le bouchon SLO13N.



Sans ces pièces-ci le blocage de la barrière ne se fait pas.
Premièrement, positionner la barrière de façon à ce que le bras de barrière soit pratiquement perpendiculaire au couchage, voir photo ci-dessous.



Se munir du doigt de verrouillage, et l'insérer du côté plat dans le trou de la barrière.



Une fois installer, prendre le ressort et le positionner dedans.



Ensuite prendre le bouchon SLO13N et l'enfoncé à l'aide d'un maillet afin de maintenir le ressort à l'intérieur du trou de la barrière.



2. Vérification

Vérification du bon fonctionnement de la barrière.

CONTACT



Mail

sav@bmb-medical.com



Téléphone

04 74 08 71 73



Site internet

<http://www.bmbmedical.com/>



Espace client

<http://bmb-ubicx.com>



Adresse postale

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX