

# PROCEDURE D'INSTALLATION DE LA BUTEE DE CAME





**SOMMAIRE**

1. Préparation outillage et pièces .....	3
2. <b>Démontage</b> .....	3

## 1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder à l'installation de la butée vestiaire, il vous faut :


- une clé de 10

**Temps de l'intervention : 5 Min**

## 2. Démontage

Ouvrir la porte du vestiaire

Pour commencer, retirer le tiroir complètement en rentrant les pattes qui permet le blocage du tiroir.

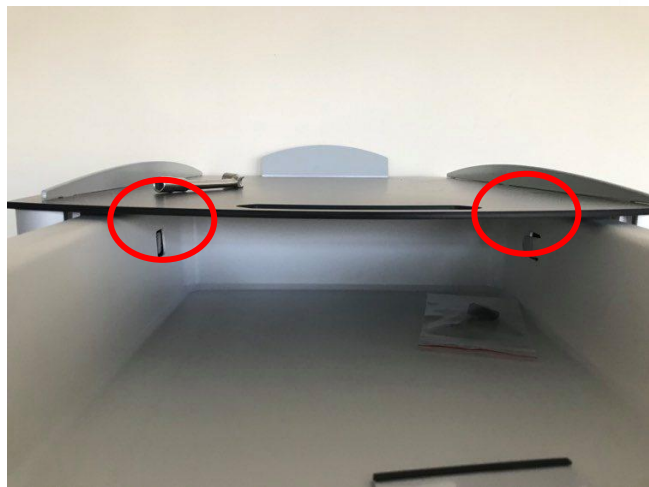

Une fois le tiroir complétement retiré, dévisser légèrement avec la clé à pipe les vis avant qui maintiennent la tôle sur le tiroir afin de pouvoir lever légèrement le plateau. Soulevez le plateau du coté ou les vis ont été dévissés.



Desserrer légèrement les 2 vis de la butée de tiroir afin de pouvoir la déplacer vers le bas de X cm.



Soulever la plaque supérieure pour pouvoir insérer dans le profilé la butée. La positionner à l'emplacement de la butée de tiroir. En fait, on réalise in décalage des butées.




Butée de tiroir

Butée de came

Revisser l'ensemble des vis pour verrouiller le positionnement. Repositionner la plaque supérieure et revisser les vis pour bloquer la tôle supérieure.

Réinstaller le tiroir en faisant attention a la mise en place des pattes.

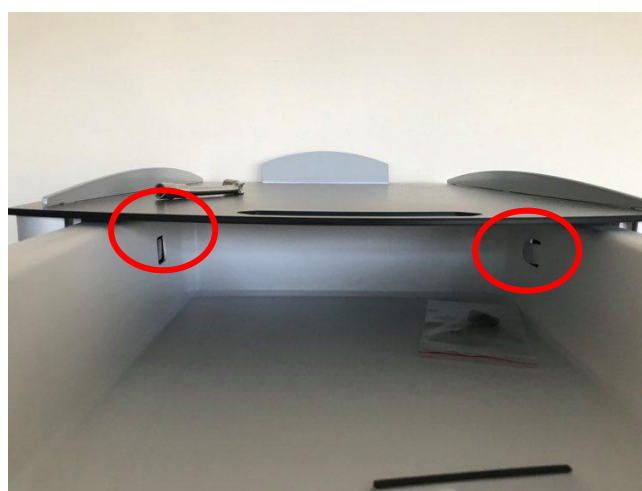

## CONTACT



**Mail**

[sav@bmb-medical.com](mailto:sav@bmb-medical.com)



**Téléphone**

04 74 08 71 73



**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>



**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>



**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVOUX