

CHARIOT BRANCARD





Nous nous sommes donnés pour premier objectif votre **satisfaction**. Nous avons placé le niveau de nos **exigences** à la hauteur où nous souhaiterions le trouver en tant que client.

En vous accompagnant dès la définition du produit et tout au long de sa vie, nous vous garantissons des produits **performants**, un service **réactif** et de **qualité**.

Nous tentons, en toute humilité, de **comprendre** votre **utilisation**, vos **contraintes**, et de redéfinir le circuit de vos patients afin d'**améliorer** vos **conditions de travail** et l'**efficacité** de votre **organisation**.

Nous basons nos relations sur une **confiance partagée** en faisant de notre priorité celle d'être à vos côtés sur le **long terme**.

COMPRENDRE VOTRE UTILISATION, VOS CONTRAINTES

Hauteur variable bilatérale

Ses colonnes hydrauliques de grande qualité ont une durée de vie supérieure à 30 000 cycles. Son long bras de levier réduit l'effort d'appui : un vrai confort pour le personnel.

Matelas hygiénique

Sans velcro, le nettoyage du matelas et du plan dur se réalise en toute simplicité. La housse résiste aux décontaminants et la fermeture éclair est protégée des liquides. De 8 à 15 cm, il apporte confort aux patients, même sur une longue durée.

Poignées escamotables

Leur forme ergonomique rend le poussage facile et confortable. En plastique ultra-résistant, elles ne rouillent pas.

Roues renforcées

Chaque roue supporte une charge de 220kg. Le bandage épais atténue les chocs et le bruit du roulement. Elles sont étanches à l'eau, comme à la poussière. Compatibles avec tout type de sol, y compris le goudron.

Protections d'angles

Sa forme a été spécialement étudiée pour amortir les impacts. Très résistante, la pièce est également démontable et recyclable. Trois coloris sont disponibles pour différencier les brancards entre les services.

5ème roue de guidage

Conduite intuitive et aisée, la cinquième roue réduit considérablement les efforts de poussée du personnel. Peu importe le poids, le brancard est léger et maniable.

Barrières résistantes

Munies de deux axes de rotation, elles sont 10 fois plus résistantes que la norme. Le bouton latéral positionné côté pieds est à la fois évident pour le personnel et inaccessible au patient. Escamotables sous le plan de couchage, elles facilitent les transferts.


Descente, Proclive et Déclive

Les positions s'actionnent avec le pied, de chaque côté du brancard : facile d'accès, même avec les mains stériles, souillées ou occupées. Les pédales sont placées de manière ergonomique, à une hauteur aisée pour chaque utilisateur.



LA MOBILITÉ

Nos brancards ont été conçus dans le but de faciliter votre vie au quotidien

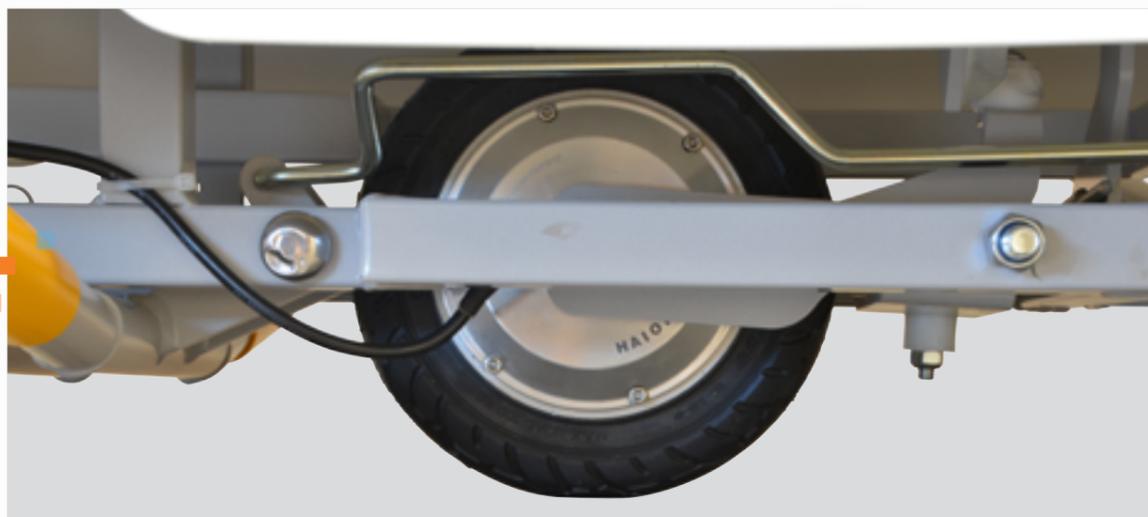

Nous avons conscience que votre temps est précieux. Chaque seconde compte. C'est pourquoi, notre brancard est si facile à utiliser. Sa cinquième roue directionnelle le rend léger et intuitif. Commandée par la même pédale que les autres roues, elle se met en place sans avoir à y penser. Ses roues renforcées s'adaptent à n'importe quel sol ou obstacle. Ses poignées de poussée épousent parfaitement la forme de vos mains. Améliorer vos conditions de travail est une de nos priorités.

Garantir la **sécurité** de vos patients



La sécurité de vos patients n'est pas une option. La stabilité de notre produit est telle que même disposé dans les conditions les moins favorables, le brancard ne bascule pas. En cas d'urgence, la position proclive, la position déclive ou la position CPR (cardiopulmonary resuscitation) sont atteintes en quelques secondes.



F I A B I L I T É

Des composants de qualité,
Une utilisation longue durée,
Une empreinte écologique maîtrisée



Notre conscience écologique nous a progressivement tourné vers la conception éco-responsable. BMB MEDICAL se préoccupe de l'impact écologique de ses produits à chaque étape de leur cycle de vie. Cet engagement se traduit par des actions sur les emballages, la politique des « 4 R » (Réduire, Remplacer, Recycler, Repenser) et, un travail sur les matériaux. Nos produits sont pensés selon la norme IEC60601-1-9 définissant les exigences pour une **conception éco-responsable.**

Nos produits sont testés sur banc d'essai avec des contraintes nettement supérieures à ce qu'ils peuvent subir dans le quotidien. Nos colonnes ne nécessitent aucun entretien. Nos plans de couchage sont réalisés en stratifié compact, matériau extrêmement résistant et imputrescible. Nos protections d'angles résistent aux chocs et au vieillissement. Nos barrières munies de deux solides axes de rotation, sont particulièrement robustes. Choisir BMB MEDICAL est un gage de qualité mais également une économie non négligeable sur votre budget maintenance.

S O M M A I R E

▶ C A R E O

▶ C A R U I

▶ C A R U I K I D S

▶ I - C A R E A M B U L A T O R Y

▶ I - C A R E E M E R G E N C Y

▶ I - C A R E O P H T A L M O L O G Y

▶ I - C A R E M O T O R I S E

▶ P R E L E



BRANCARD HV HYDRAULIQUE CAREO

CAREO est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Robuste et maniable, il répond parfaitement aux fonctions de base exigées dans le brancardage.

Radio transparent, équipé de série d'un relève buste assisté et d'une proclive déclive, il est également destiné au bloc ou aux urgences.

Sa conception éprouvée ainsi que la qualité de ses composants garantissent une maintenance réduite.

Son esthétique soignée participe à la bonne image de votre établissement.

Confortable

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



CAREO

DIMENSIONS CAREO

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	201 cm	74 cm
HAUTEUR VARIABLE	64 - 97 cm (matelas inclus 8 cm)	

POIDS PRODUIT : 80 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur variable hydraulique

- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 8 cm
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Plan dur en ABS thermoformé, radio transparent
- 2 emplacements pour tige porte sérum côté tête
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds
- 2 roues à blocage directionnel côté tête
- Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux - Aluminium anodisé
- Barre de poussée fixe côté pieds
- Capot de châssis avec support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé



2 emplacements pour tige porte sérum côté tête



Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.



Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 8 cm



Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux. Aluminium anodisé




Capot de châssis avec support obus



Pare-chocs (aux 4 angles)



5ème roue directionnelle
CRO5E

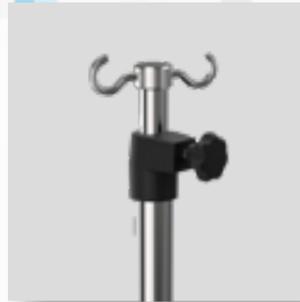

Tige porte sérum amovible
2 crochets, réglage par molette
TSR2



Barres de poussée escamotables
côté pieds
BPP



Barres de poussée
escamotables côté tête
BPT



Support obus vertical
CROSO2



Support rouleau papier à la tête
CROSP




Support dossier sous tête
CRODOC



Crochets porte sac situés de chaque
côté, sous le plan de couchage
PSU



Matelas confort
CEOMM

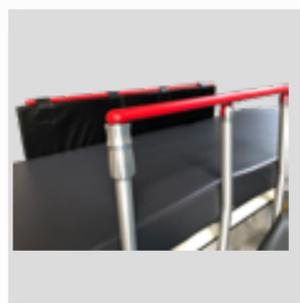

Protection enfant pour
barrières (la paire)
CROPB



Plateau repas universel
PRU

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CRO5E	5ème roulette directionnelle
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
BPP	Barres de poussée escamotables côté pieds
BPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CEOMM	Matelas Confort pour CAREO
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute



BRANCARD HV HYDRAULIQUE CARVI

CARVI est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Léger, robuste et intuitif, il est destiné aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.



Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



CARVI

DIMENSIONS CARVI

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	216 cm	68 / 78 / 88 cm
HAUTEUR VARIABLE	65 - 98 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 90 / 94 / 98 Kg (selon modèle)
 POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 250 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur variable hydraulique


- Hauteur variable : 57 - 90 cm (sans matelas de 8 cm d'épaisseur)
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 8cm
- Plan dur en résine, matériau radio transparent
- Commande bilatérale de la hauteur variable et de proclive déclive
- 6 emplacements pour tige porte sérum
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- 4 roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté pieds
- 2 roues à blocage directionnel côté tête
- Barrières pliantes à 2 barreaux horizontaux - Aluminium anodisé
- Barres de poussée escamotables côté pieds 2 parties
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé



6 emplacements pour tige porte sérum



Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.

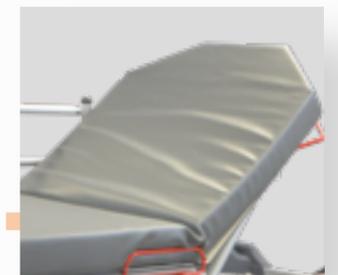

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 8 cm



Barres de poussée escamotables côté pieds (2 parties)



Capot de châssis avec panier à effets et support obus



Pare-chocs (aux 4 angles)

ACCESSOIRES



5ème roue directionnelle
CRO5E



Roulettes renforcées pour CARVI
(CRO5E obligatoire)
CRORR




Système antistatique
CLORA




Barrières 3 barreaux horizontaux
CROB3B



Panneau de lit en lieu et place
d'une barre de poussée
MLOPL

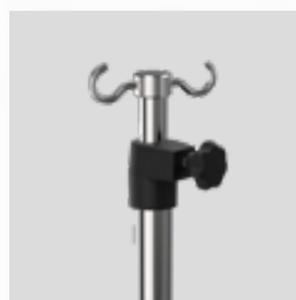


Tige porte sérum amovible
en 2 parties, 2 crochets
TSR2

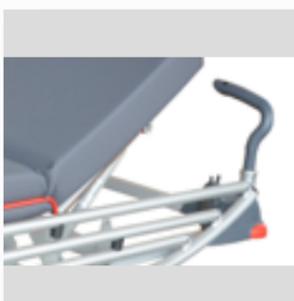


Barres de poussée escamotables
côté tête
CROBPT



Barre de poussée escamotable côté
pieds en 1 partie
CROBPP1

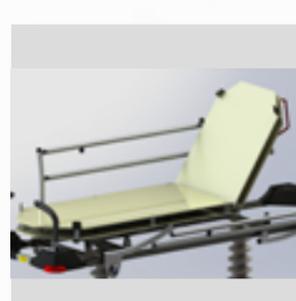

Support cassette radio
(incompatible avec CORBE + CRORJ +CORJE)
CROK7

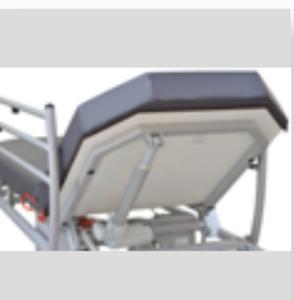

Relève-buste électrique à
débrayage manuel
CORBE



Relève-jambes avec plicature des genoux
Relève buste et plicature des genoux
électrique
CRORJ & CORJE




Télécommande patient
COTLC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CRO5E	5ème roulette directionnelle
CRORR	Roulettes renforcées pour CARVI (CRO5E Obligatoire)
CLORA	Système antistatique
CROB3B	Barrières 3 barreaux horizontaux
MLOPL	Panneau de lit en lieu et place d'une barre de poussée
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROBPP1	Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (double plan dur) (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel (verins électriques)
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques (verins électriques)
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux (verins à gaz)
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade : 2 emplacements disponibles (1 plateau en largeur 60cm / 1 ou 2 plateaux en largeur 70 et 80 cm) "
MC	Matelas Confort, mousse HR (35 kg/m3)- Epaisseur 10 cm
MMC	Matelas Grand Confort, mousse HR (35 kg/m3), 2 cm viscoélastique - Epaisseur totale 12 cm
EQUI	Prise d'équipotentialité
CRORT	Rails techniques latéraux
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute

ACCESSOIRES



Support obus vertical
CROSO2

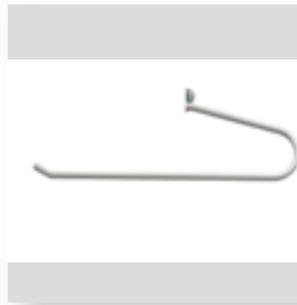


Support rouleau papier à la tête
CROSP




Support dossier sous tête
CRODOC




Crochets porte sac situés de chaque côté,
sous le plan de couchage
PSU

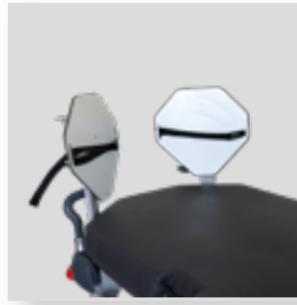

Plateau support scope au
pied du malade
CROPC

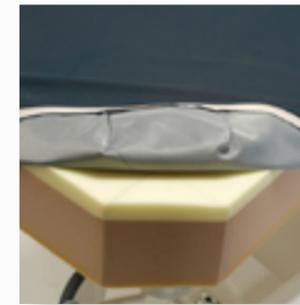

Matelas confort
MC & MMC

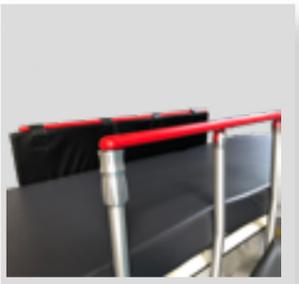

Protection enfant pour
barrières (la paire)
CROPB



Plateau repas universel
PRU





BRANCARD HV HYDRAULIQUE CARVI KIDS

Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers pédiatriques

CARVI KIDS est un chariot brancard pédiatrique à hauteur variable, conçu pour accueillir et transférer un enfant en toute sécurité.

Equipé de barrière et du kit pédiatrique tête, il est conforme à la recommandation de l'ANSM du 26 avril 2010 concernant l'accueil des enfants de moins de 146 cm.


CARVI KIDS est léger, robuste et intuitif. Il est également polyvalent puisque destiné aux services de brancardage, urgences et réveil.

CARVI KIDS

DIMENSIONS CARVI KIDS

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	199 cm	73 cm
HAUTEUR VARIABLE	65 - 98 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 85 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 250 Kg

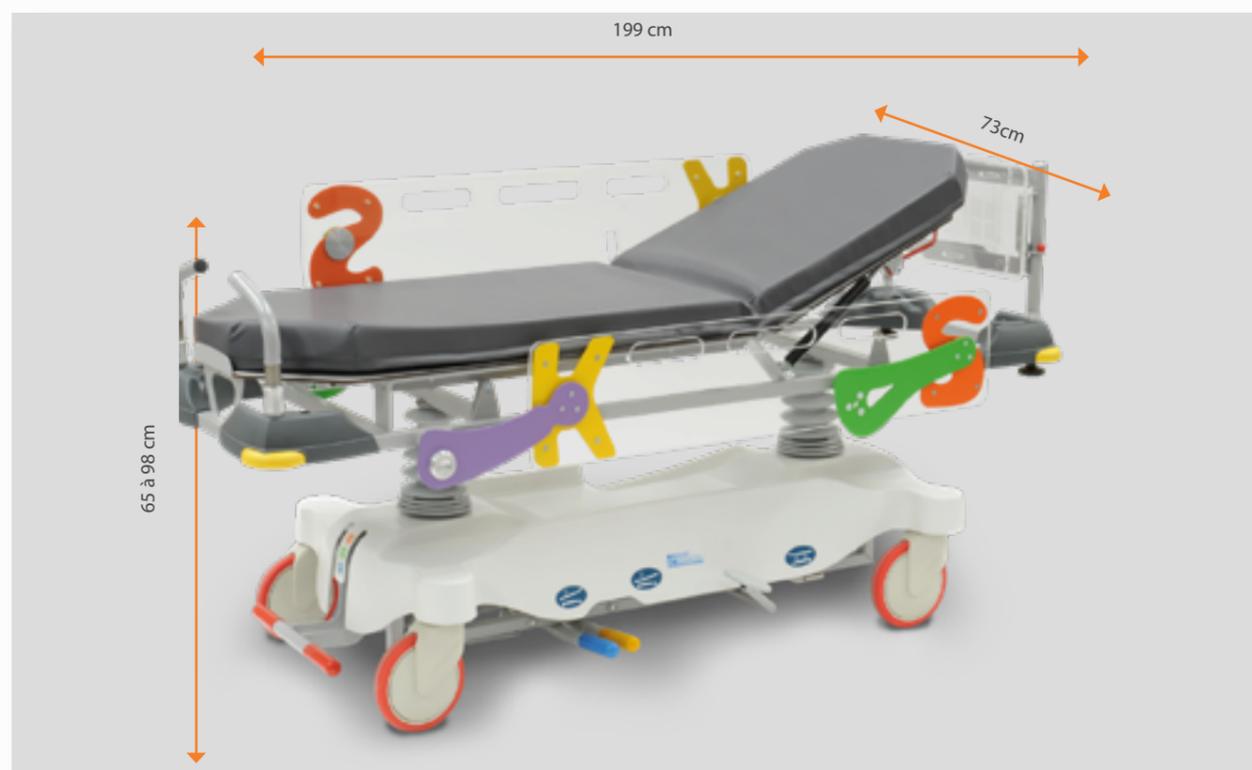

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard pédiatrique à hauteur variable hydraulique

- Hauteur variable : 57 - 90 cm (sans matelas de 8 cm d'épaisseur)
- Procline-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m3) - Epaisseur : 8cm
- Plan dur en résine, matériau radio transparent
- Commande bilatérale de la hauteur variable et de procline déclive
- 6 emplacements pour tige porte sérum
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté pieds
- 2 roues à blocage directionnel côté tête
- Barrières pliantes à 2 barreaux horizontaux - Aluminium anodisé
- Barres de poussée escamotables côté pieds 2 parties à préciser
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

6 emplacements pour tige porte sérum

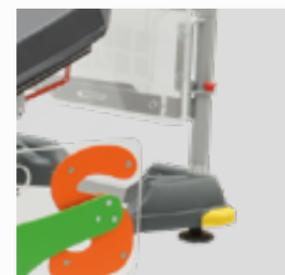

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m3). Epaisseur : 8 cm



Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.



Barres de poussée escamotables côté pieds (2 parties)



Pare-chocs (aux 4 angles)

Capot de châssis avec panier à effets et support obus



ACCESSOIRES



5ème roue directionnelle
CRO5E




Système antistatique
CLORA



Barrières 3 barreaux horizontaux
CROB3B




Panneau de lit en lieu
et place d'une barre de
poussée

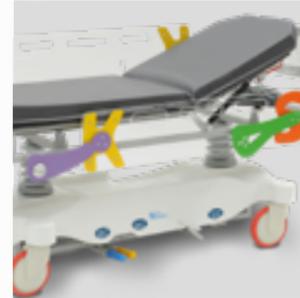

Barrières pédiatriques
en polycarbonate
CKOBP



Kit pédiatrique côté tête
CKOKT

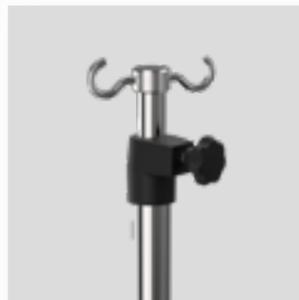


Tige porte sérum
TSR2



Barres de poussée
escamotables côté tête
CROBPT



Barre de poussée escamotable côté
pieds en 1 partie
CROBPP1

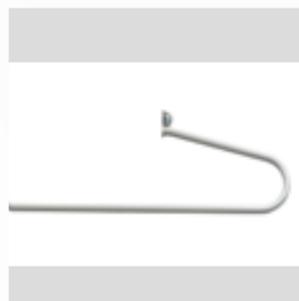

Support rouleau papier à la tête
CROSP




Support dossier sous têtère
CRODOC




Crochets porte sac situés de chaque côté,
sous le plan de couchage
PSU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CRO5E	5ème roulette directionnelle
CLORA	Système antistatique
CROB3B	Barrières 3 barreaux horizontaux
MLOPL	Panneau de lit en lieu et place d'une barre de poussée
CKOBP	Barrières pédiatriques en polycarbonate
CKOKT	Kit pédiatrique côté tête
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROBPP1	Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous têtère
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade
MC	Matelas Confort, mousse HR - Epaisseur 10 cm
EQUI	Prise d'équipotentialité
CKOCL	Coussin de protection latéral
CKOCT	Coussin de protection tête (CKOCL obligatoire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute

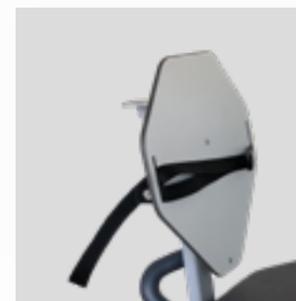

Plateau support scope au pied du malade
CROPSC

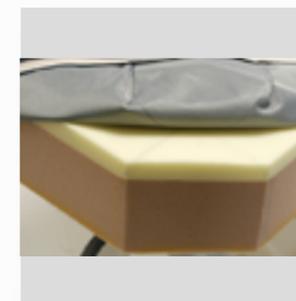

Matelas confort
MC



Coussin de protection
CKOCL & CKOCT



HV HYDRAULIQUE I-CARE AMBULATORY

I-CARE est un chariot brancard à hauteur variable hydraulique, destiné à un usage intensif.

Sa large gamme et les nombreux accessoires disponibles, le destinent aux services d'urgences, de réveil ou de chirurgie ambulatoire.

Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



I-CARE AMBULATORY

DIMENSIONS I-CARE AMBULATORY

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	216 cm	68 / 78 / 88 cm
HAUTEUR VARIABLE	68 - 101cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 80 / 85 / 90 Kg (selon modèle)
 POIDS MAX PATIENT : 255 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 320 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur variable hydraulique

- Dimensions hors tout : 68 x 216 cm, 78 x 216 cm ou 88 x 216 cm (selon modèle)
- Hauteur variable : 58 - 91 cm (sans un matelas de 10 cm d'épaisseur).
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre.
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°).
- Couchage 2 sections : 60 x 197 cm, 70 x 197 cm ou 80 x 197 cm
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 10cm
- Plan dur en résine, matériau radio transparent.
- Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive déclive.
- 6 emplacements pour tige porte sérum.
- Pare-chocs (aux 4 angles).
- Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté tête et pieds.
- 5ème roue directionnelle.
- Barrières pliantes 3 barreaux horizontaux. Aluminium anodisé.
- Barres de poussée escamotables côté pieds 2 parties
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus.
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

6 emplacements pour tige porte sérum

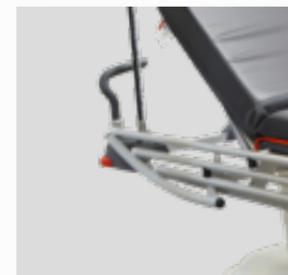


Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 10 cm




Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.



Barres de poussée escamotables côté pieds (2 parties)

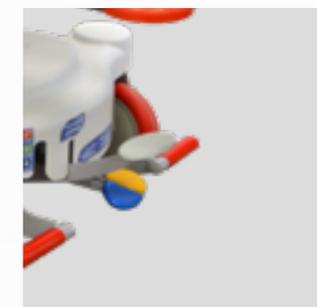

Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive déclive

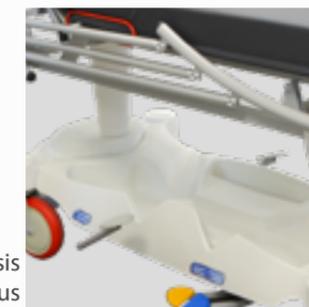


Capot de châssis avec panier à effets et support obus


ACCESSOIRES



Système antistatique
CLORA

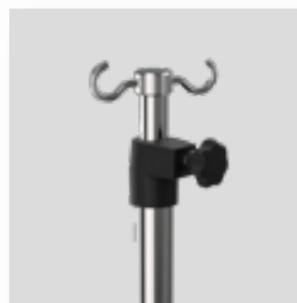

Tige porte serum
TSR2

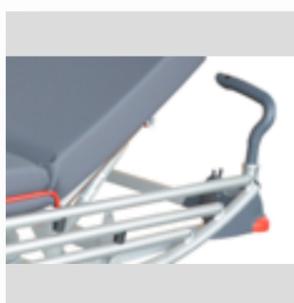

Barres de poussée
escamotables côté tête
CROBPT



Barre de poussée escamotable côté
pieds en 1 partie
CROBPP1



Support cassette radio sous le plan de couchage
(incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CROK7




Relève-buste électrique à
débrayage manuel
CORBE




Relève-jambes avec plicature des genoux ou
Relève buste et plicature des genoux électrique
CRORJ & CORJE



Télécommande patient
COTLC

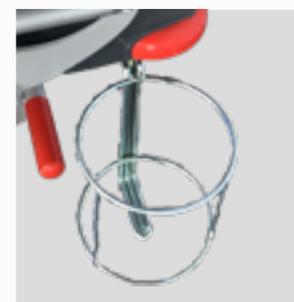

Support obus vertical
CROSO2

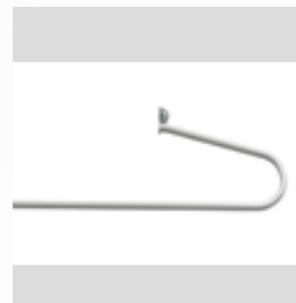

Support rouleau
papier à la tête
CROSP




Support dossier sous tête
CRODOC




Crochets porte sac situés de chaque
côté, sous le plan de couchage
PSU


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CLORA	Système anti statique
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROBPP1	Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (double plan dur) (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel (vérins électriques)
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques à débrayage manuel (vérins électriques)
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux (vérins à gaz)
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade : 2 emplacements disponibles (1 plateau en largeur 60 cm / 1 ou 2 plateaux en largeur 70 et 80 cm) "
MMM	Matelas Grand Confort, mousse HR (35 kg/m3), 2 cm viscoélastique - Epaisseur totale 12 cm
EQUI	Prise d'équipotentialité
CRORT	Rails techniques latéraux
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute

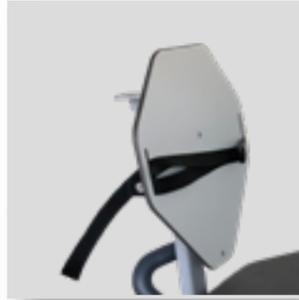

Plateau support scope au pied du malade
CROPSC

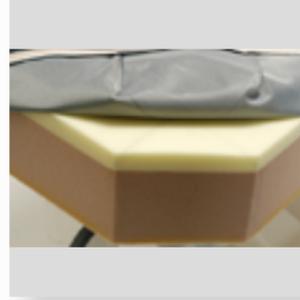

Matelas confort
MMM

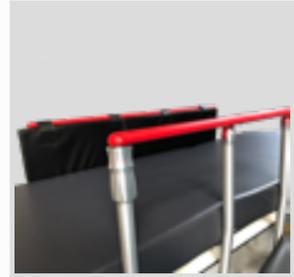

Protection enfant pour barrières (la paire)
CROPB



PRU
Plateau repas universel
Plateau extensible
à fixer sur barrières : 65 à 88 cm
Rebords anti chute Compatible
avec les plateaux normalisés :
GastroNorm – GN1/1 : 53 x 32.5 cm
EuroNorm : 53 x 37 cm
Adaptable à toutes les largeurs de couchage
Charge de fonctionnement en sécurité : 10Kg





HV HYDRAULIQUE I-CARE EMERGENCY

I-CARE est un chariot brancard à hauteur variable hydraulique, destiné à un usage intensif.

Sa large gamme et les nombreux accessoires disponibles, le destinent aux services d'urgences, de réveil ou de chirurgie ambulatoire.

Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



I-CARE EMERGENCY

DIMENSIONS I-CARE EMERGENCY

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	216 cm	74 / 84 cm
HAUTEUR VARIABLE	68 - 101 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 80 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 255 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 320 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur variable hydraulique

- Hauteur variable : 58 - 91 cm (sans matelas de 10 cm d'épaisseur)
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 10cm
- Plan dur en résine, matériau radio transparent
- Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive déclive
- 6 emplacements pour tige porte sérum
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté tête et pieds
- 5ème roue directionnelle
- Barrières pliantes 5 barreaux verticaux - Aluminium anodisé
- Barres de poussée escamotables côté pieds 2 parties
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

6 emplacements pour tige porte sérum

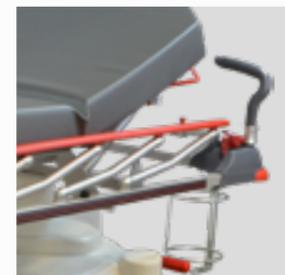


Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 10 cm




Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.



Barres de poussée escamotables côté pieds (2 parties)

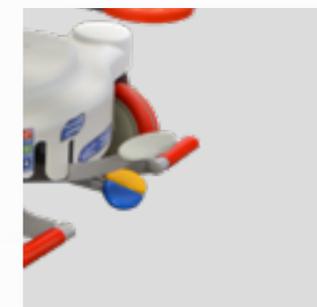

Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive déclive

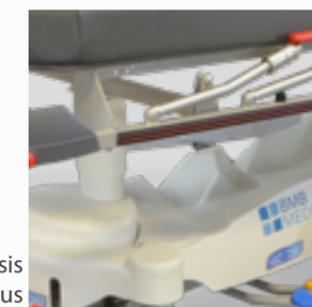


Capot de châssis avec panier à effets et support obus


ACCESSOIRES



Système antistatique
CLORA

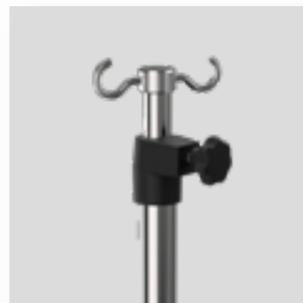

Tige porte serum
TSR2

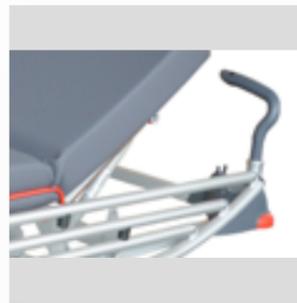

Barres de poussée
escamotables côté tête
CROBPT



Barre de poussée escamotable côté
pieds en 1 partie
CROBPP1



Support cassette radio sous le plan de
couchage (incompatible avec CORBE +
CRORJ + CORJE)
CROK7



Relève-buste électrique à
débrayage manuel
CORBE




Relève-jambes avec plicature des genoux
Relève buste et plicature des genoux électrique
CRORJ & CORJE



Télécommande patient
COTLC



Support obus vertical
CROSO2

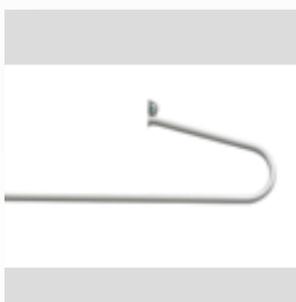

Support rouleau papier à la tête
CROSP



Support dossier sous têtère
CRODOC



Crochets porte sac situés de chaque
côté, sous le plan de couchage
PSU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CLORA	Système antistatique
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROBPP1	Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (double plan dur) (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux
CRORT	Rails techniques latéraux
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous têtère
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade. : 2 emplacements disponibles (1 plateau en largeur 60cm / 1 ou 2 plateaux en largeur 70 cm)"
MMM	Matelas Grand Confort, mousse HR(35 kg/m3), 2 cm viscoélastique - Epaisseur totale 12 cm
EQUI	Prise d'équipotentialité
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute



HV HYDRAULIQUE I-CARE OPHTALMOLOGY

I-CARE est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Ses têtes multi-positions et amovibles en font un produit parfaitement adapté à la chirurgie ambulatoire.

I-CARE OPHT est destiné aux actes ophtalmologiques, stomatologiques, ORL, de chirurgie de la main...

Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation hauteur variable & proclive/déclive

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers




I-CARE OPHTHALMOLOGY

DIMENSIONS I-CARE OPHTHALMOLOGY

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	201 cm / 235 cm (avec tête)	84 cm
HAUTEUR VARIABLE	66 - 99 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 90 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg

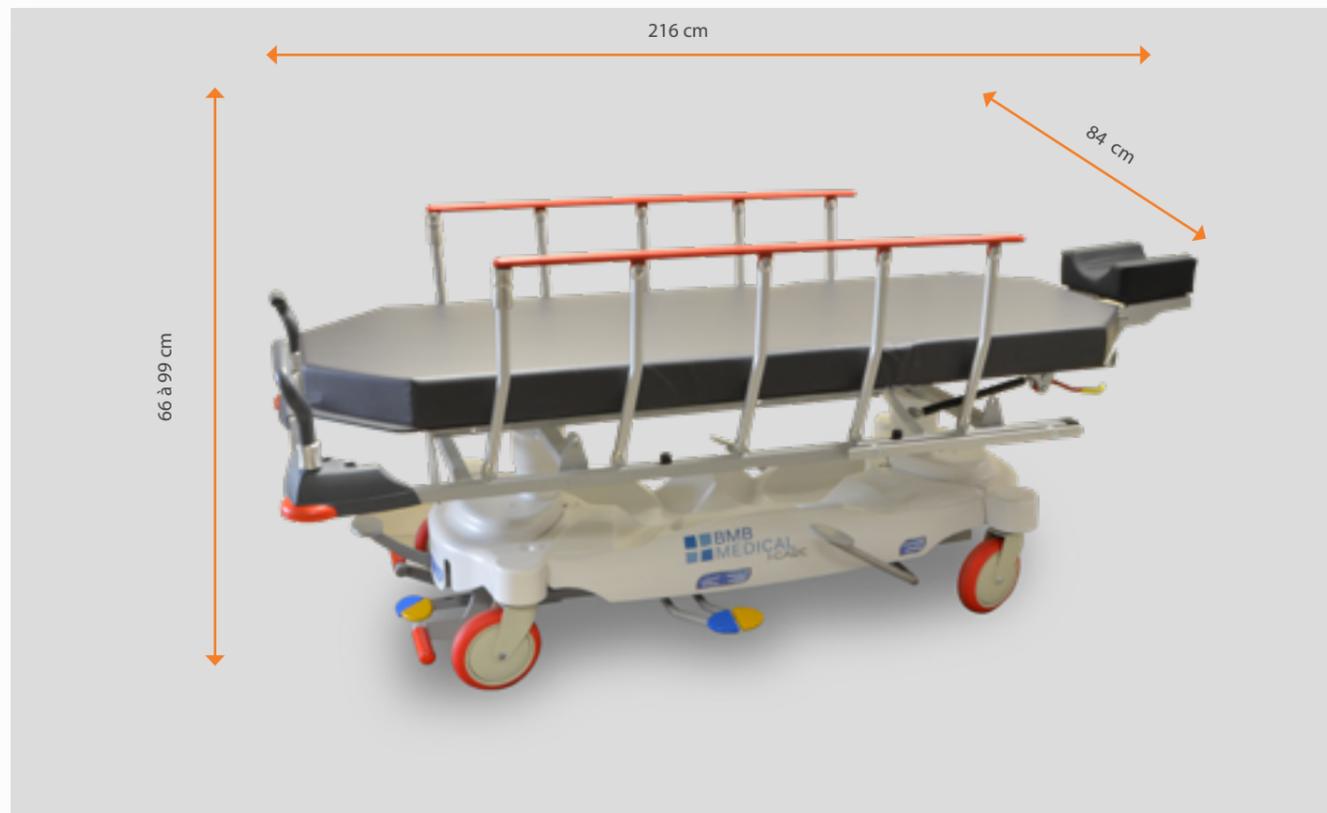

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur variable hydraulique

- Hauteur variable : 58 - 91 cm (sans un matelas de 8 cm d'épaisseur)
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 70°)
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m3) - Epaisseur : 8 cm
- Plan dur en résine, matériau radio transparent
- Commande bilatérale aux pieds de la hauteur variable / proclive déclive / freins
- Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté tête et pieds
- 5ème roue directionnelle
- Barrières pliantes 5 barreaux verticaux - Aluminium anodisé
- Barre de poussée escamotables côté pieds 2 parties.
- Rails techniques latéraux de chaque côté à la tête du patient
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

5ème roue directionnelle




Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m3). Epaisseur : 8 cm



Roues servofrein Ø 200 mm commande centralisée côté pieds.



Barres de poussée escamotables côté pieds (2 parties)

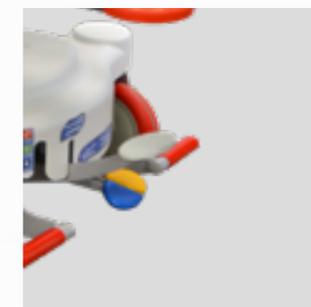


Commande bilatérale aux pieds de la hauteur variable et de proclive déclive



Capot de châssis avec panier à effets et support obus


ACCESSOIRES

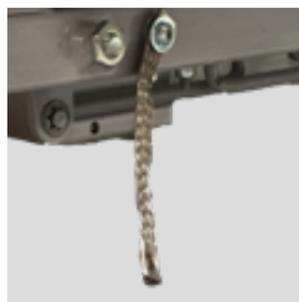

Système antistatique
CLORA



Tête amovible double articulations pour interventions ophtalmologiques + coussin creux
LCA-OPH

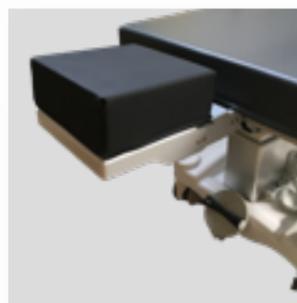


Tête amovible double articulations pour interventions stomatologiques + coussin plat
LCA-PLA




Tête amovible pour interventions stomatologiques et ORL
LCA-STO




Coussin creux supplémentaire pour tête amovible double articulations
LCA-CC

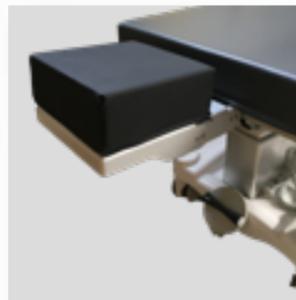


Coussin creux supplémentaire pour tête amovible double articulations
LCA-CP

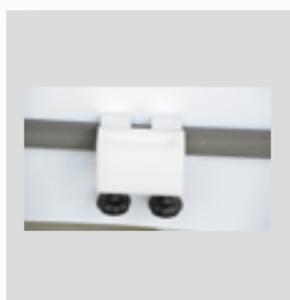

Support tête à fixation sur rail technique
LCA-SUP

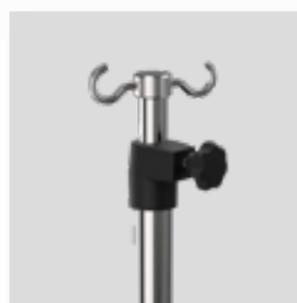

Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2

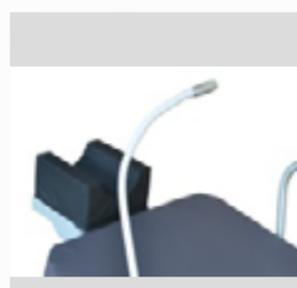


Flexible support champ avec arrivée d'oxygène
FSC



Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CROBPP1



Relève-jambes avec plicature des genoux
CRORJ

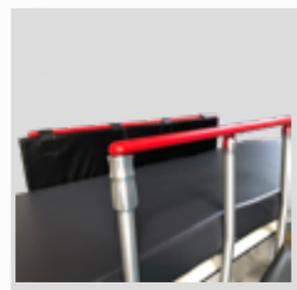

Protection enfant pour barrières (la paire)
CROPB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CLORA	Système anti statique
LCA-OPH	Tête amovible double articulations pour interventions ophtalmologiques + coussin creux
LCA-PLA	Tête amovible double articulations pour interventions stomatologiques + coussin plat
LCA-STO	Tête amovible pour interventions stomatologiques et ORL
LCA-CC	Coussin creux supplémentaire pour tête amovible double articulations
LCA-CP	Coussin plat supplémentaire pour tête amovible double articulations
LCA-SUP	Support tête à fixation sur rail technique
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
FSC	Flexible support champ avec arrivée d'oxygène
CROBPP1	Barre de poussée escamotable côté pieds en 1 partie
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux
EQUI	Prise d'équipotentialité
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute



PRU
Plateau repas universel
Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm
Rebords anti chute Compatible avec les plateaux normalisés :
GastroNorm – GN1/1 : 53 x 32.5 cm
EuroNorm : 53 x 37 cm
Adaptable à toutes les largeurs de couchage
Charge de fonctionnement en sécurité : 10Kg

MOTORISÉ I-CARE U EZ-GO EMERGENCY

I-CARE U EZ-GO est un chariot brancard motorisé. Il est équipé d'une cinquième roue motorisée autonome, de deux batteries et d'un chargeur externe.

Son autonomie est de 5 km par batterie avec une recharge de 5 heures.

Confortable, pour le patient et le personnel hospitalier

Adaptable nombreuses options disponibles

Simple à conduire, roue motorisée, commande par poignée rotative

Utilisation continue, deux batteries et un chargeur externe inclus



I-CARE U EZ-GO EMERGENCY

DIMENSIONS I-CARE U EZ-GO EMERGENCY

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	221 cm	84 / 94 cm
HAUTEUR VARIABLE	66 - 99 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 92 / 97 Kg (selon modèle)
 POIDS MAX PATIENT : 255 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 320 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard motorisé

- Dimensions hors tout : 84 x 221 cm ou 94 x 221 cm (selon modèle)
- Hauteur variable : 58 - 91 cm (sans un matelas de 8 cm d'épaisseur)
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m3) - Epaisseur : 8 cm
- Traction motorisée par roue autonome
- Batteries rackables - Autonomie par batterie : 5 kms - Temps de charge : 5 h
- Batterie lithium sans effet mémoire.
- Fourni avec deux batteries et un chargeur externe.
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse (côté pieds).
- Plan dur en résine, matériau radio transparent.
- Commande bilatérale de la hauteur variable et de proclive déclive.
- Barres de poussée fixe côté pieds.
- Barres de poussée escamotables côté tête.
- 6 emplacements pour tige porte sérum.
- Pare-chocs (aux 4 angles).
- Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté pieds
- 5ème roue directionnelle (roue motorisée)
- Système antistatique
- Barrières pliantes 5 barreaux verticaux - Aluminium anodisé
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

6 emplacements pour tige porte sérum

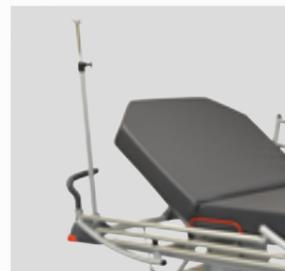


Batteries rechargeables par chargeur externe

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse



Barres de poussée escamotables côté tête (2 parties)

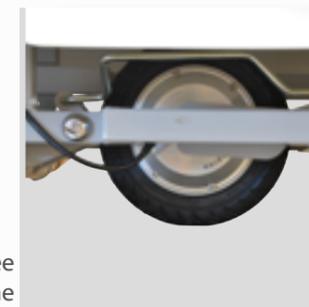


Traction motorisée par roue autonome



Commande bilatérale + pieds de la hauteur variable et de proclive déclive

ACCESSOIRES

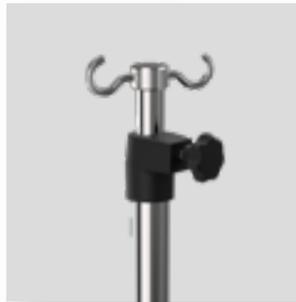

Tige porte serum
TSR2



Plateau repas universel
PRU




Relève-buste électrique à débrayage manuel
CORBE




Relève-jambes avec plicature des genoux
Relève buste et plicature des genoux électrique
CRORJ & CORJE



Batterie supplémentaire
EZOBA

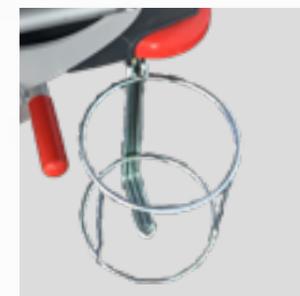

Support obus vertical
CROSO2

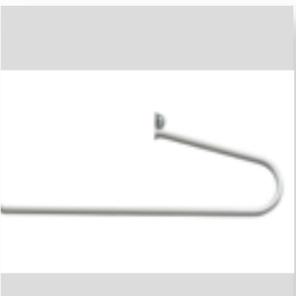

Support rouleau papier à la tête
CROSP



Support dossier sous tête
CRODOC




Crochets porte sac situés de chaque côté,
sous le plan de couchage
PSU



Plateau support scope au pied
du malade
CROPSC



Matelas confort
MMM

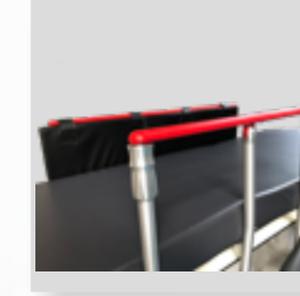

Protection enfant pour
barrières (la paire)
CROPB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (double plan dur) (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques à débrayage manuel
COBBA	Batterie pour CORBE et CORJE
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux
EZSBA	Moins value batterie
EZOBA	Batterie supplémentaire
EZOCH	Chargeur externe version murale
EZOPO	Chargeur externe version mobile
EZOS1	Station de recharge 1 chargeur
EZOS2	Station de recharge 2 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS3	Station de recharge 3 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS4	Station de recharge 4 chargeurs (une multiprises incluse)
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade
MC	Matelas confort, mousse HR (35kg/m3) - Epaisseur 10cm
MMC	Matelas grand confort, mousse HR (35kg/m3), 2 cm viscoélastique - Epaisseur totale 12cm.
MCU	Matelas ultra confort mousse HR (35kg/m3) confort longue durée - propriétés anti-escarres - Epaisseur totale 15cm
EQUI	Prise d'équipotentialité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CRORT	Rails techniques latéraux
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute



Batterie supplémentaire
EZOB



Chargeur externe version murale
EZOC



Chargeur externe version mobile
EZOP



Station de recharge 1 chargeur
EZOS1



Station de recharge 2/3/4 chargeurs
(une multiprise inclus)
EZOS2 - EZOS3 - EZOS4





MOTORISÉ I-CARE U EZ-GO AMBULATORY

Confortable, pour le patient et le personnel hospitalier

Adaptable nombreuses options disponibles

Simple à conduire, roue motorisée, commande par poignée rotative

Utilisation continue, deux batteries et un chargeur externe inclus



I-CARE U EZ-GO est un chariot brancard motorisé. Il est équipé d'une cinquième roue motorisée autonome, de deux batteries et d'un chargeur externe.

Son autonomie est de 5 km par batterie avec une recharge de 5 heures.

I-CARE U EZ-GO AMBULATORY

DIMENSIONS I-CARE U EZ-GO AMBULATORY

	LONGUEUR	LARGEUR
HORS TOUT	221 cm	78 / 88 cm
HAUTEUR VARIABLE	66 - 99 cm (matelas inclus)	

POIDS PRODUIT : 102 / 107 Kg (selon modèle)
 POIDS MAX PATIENT : 255 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 320 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard motorisé

- Hauteur variable : 58 - 91 cm (sans un matelas de 8 cm d'épaisseur)
- Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 8 cm
- Traction motorisée par roue autonome
- Batteries rackables - Autonomie par batterie : 5 kms - Temps de charge : 5 h
- Batterie lithium sans effet mémoire
- Fourni avec deux batteries et un chargeur externe
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse (côté pieds)
- Plan dur en résine, matériau radio transparent
- Commande bilatérale de la hauteur variable et de proclive déclive
- Barres de poussée fixe côté pieds
- Barres de poussée escamotables côté tête
- 6 emplacements pour tige porte sérum
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté pieds
- 5ème roue directionnelle (roue motorisée)
- Système antistatique
- Barrières pliantes 3 barreaux horizontaux - Aluminium anodisé
- Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

6 emplacements pour tige porte sérum

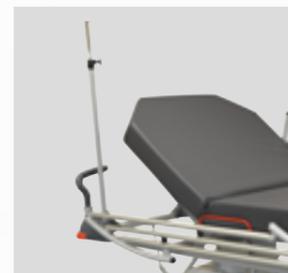

Batteries rechargeables par chargeur externe

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse



Barres de poussée escamotables côté tête (2 parties)




Traction motorisée par roue autonome



Commande bilatérale + pieds de la hauteur variable et de proclive déclive

ACCESSOIRES

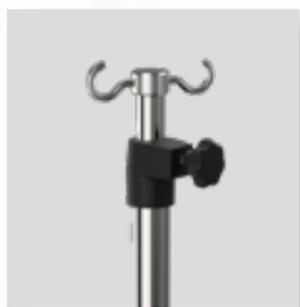

Tige porte serum
TSR2



Plateau repas universel
PRU



Relève-buste électrique à
débrayage manuel
CORBE




Relève-jambes avec plicature des genoux
Relève buste et plicature des genoux électrique
CRORJ & CORJE



Batterie supplémentaire
EZOBA



Support obus vertical
CROSO2

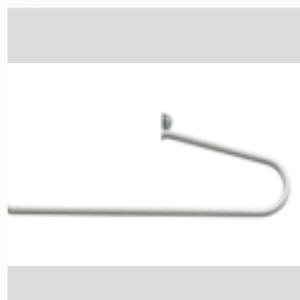

Support rouleau papier à la tête
CROSP



Support dossier sous tête
CRODOC



Crochets porte sac situés de chaque côté,
sous le plan de couchage
PSU



Plateau support scope au pied du malade
CROPSC




Matelas confort
MMM



Protection enfant pour barrières (la paire)
CROPB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (double plan dur) (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel (vérins électriques)
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques à débrayage manuel (vérins à gaz)
COBBA	Batterie pour CORBE et CORJE
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux
EZSBA	Moins value batterie
EZOBA	Batterie supplémentaire
EZOCH	Chargeur externe version murale
EZOPO	Chargeur externe version mobile
EZOS1	Station de recharge 1 chargeur
EZOS2	Station de recharge 2 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS3	Station de recharge 3 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS4	Station de recharge 4 chargeurs (une multiprises incluse)
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade : 2 emplacements disponibles (1 plateau en largeur 60 cm / 1 ou 2 plateaux en largeur 70 et 80 cm)
MC	Matelas confort, mousse HR (35kg/m3) - Epaisseur 10cm
MMC	Matelas grand confort, mousse HR (35kg/m3), 2 cm viscoélastique - Epaisseur totale 12cm.
MCU	Matelas ultra confort mousse HR (35kg/m3) confort longue durée - propriétés anti-escarres - Epaisseur totale 15cm
EQUI	Prise d'équipotentialité
CRORT	Rails techniques latéraux

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (ETU-R obligatoire)
CROPB	Protection enfant pour barrières (la paire)
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute

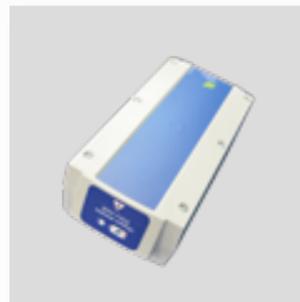

Batterie supplémentaire
EZOBA



Chargeur externe version murale
EZOCH



Chargeur externe version mobile
EZOPO



Station de recharge 1 chargeur
EZOS1



Station de recharge 2/3/4 chargeurs
(une multiprises inclus)
EZOS2 - EZOS3 - EZOS4





BRANCARD À HAUTEUR FIXE PRELE

PRELE est un chariot brancard à hauteur fixe.

Très léger et maniable, il est destiné aux services de brancardage.

Équipé d'un relève-buste assisté et d'une roue à blocage directionnel, PRELE constitue un basique du brancardage qui ne sacrifie en rien le confort du personnel soignant.

Facile d'utilisation

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



PRELE

DIMENSIONS PRELE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	201 cm	74 cm	88 cm (avec matelas)

POIDS PRODUIT : 50 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS


Alliant légèreté, robustesse et intuitivité, notre gamme CHARIOT BRANCARD est adaptée aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

Brancard à hauteur fixe

- Hauteur fixe
- Plan dur en ABS thermoformé, radio transparent
- Matelas amovible en mousse HR (35 kg/m³) - Epaisseur : 8cm
- 2 emplacements pour tige porte sérum côté tête
- Pare-chocs (aux 4 angles)
- Relève buste assisté par 2 vérins à gaz (0 - 90°)
- Roues Ø 150 mm à frein individuel
- 1 roue à blocage directionnel côté tête
- Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux - Aluminium anodisé
- Barres de poussée fixe côté pieds
- Panier à effets
- Housse déhoussable - Jersey enduit PVC - Coloris gris foncé

2 emplacements pour tige porte sérum côté tête

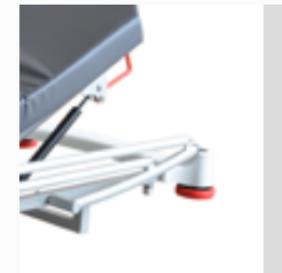

Roues Ø 150 mm à frein individuel


Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 8 cm



Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux. Aluminium anodisé




Pare-chocs (aux 4 angles)

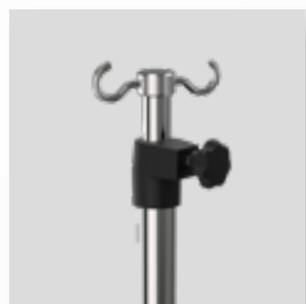

Tige porte sérum amovible
2 crochets, réglage par molette
TSR2



Barres de poussée escamotables
côté pieds
BPP

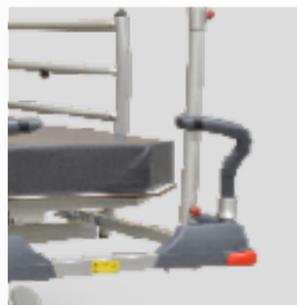


Barres de poussée
escamotables côté tête
BPT




Support rouleau papier à la tête
CROSP




Support dossier sous tête
CRODOC

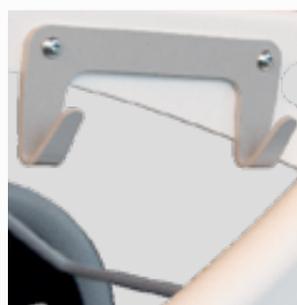

Crochets porte sac situés de chaque côté,
sous le plan de couchage
PSU

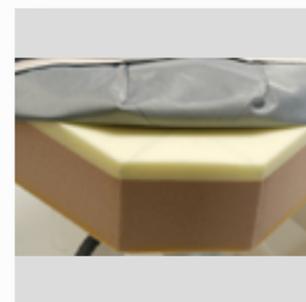

Matelas confort
CEOMM

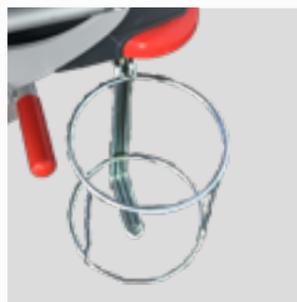

Support obus vertical
CROSO2



Plateau repas universel
PRU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
BPP	Barres de poussée escamotables côté pieds
BPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sac situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROSO2	Support obus vertical
PRU	Plateau repas universel Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm Rebords anti chute
CEOMM	Matelas confort

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.

Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.

Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001

01604 TREVOUX Cedex

FRANCE

www.bmb-medical.com